


Sistem za terapiju za pacijenta Citadel


Priprema za postavljanje/prenos pacijenta

1

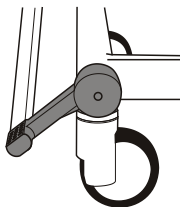


Aktivirajte kočnice za točkice na okviru kreveta.

2

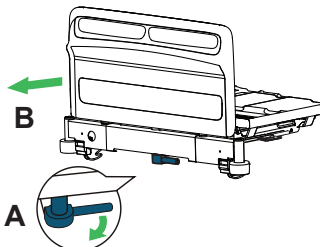


Produžite okvir i dušek po potrebi.

3




Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje tokom dve sekunde na kontrolnoj tabli da biste aktivirali dovod vazduha do jedinice.

4

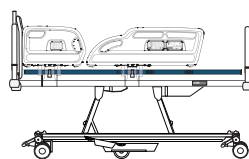


Poravnajte površinu za pacijenta.

5




Pritisnite dugme za učvršćivanje dušeka da biste naduvali dušek.

6

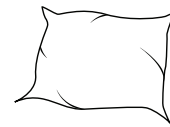

Dodajte jastuke, čebad i drugu opremu.


7

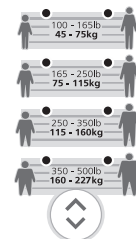

Podesite početni pritisak vazduha: Pritisnite dugme za unapred podešene postavke za visinu/težinu da biste izabrali profil pacijenta.

Postavljanje pacijenta


Prenos pacijenta sa terapijskog sistema za pacijente Citadel

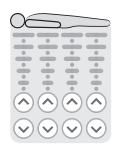

Za podešavanje pritiska dušeka pritisnite dugmad za podešavanje zone pritiska.


Pomoću strelica nagore pritisak se povećava, a smanjuje pomoću strelica nadole.

1

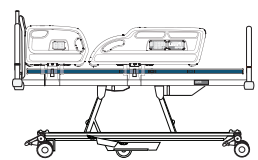


Poravnajte površinu za pacijenta.

2

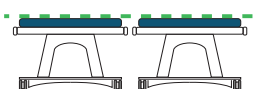


Podesite visinu površine za pacijenta tako da bude iste kao visina površine sa koje se pacijent prebacuje.

3

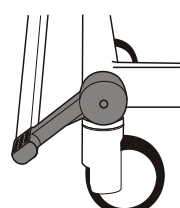

Aktivirajte kočnice na obe jedinice.

4

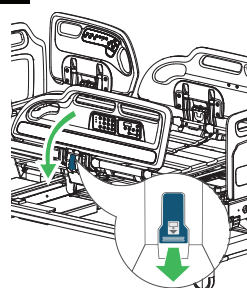


Spustite bočne šine.

5

Prebacite pacijenta (pridržavajući se svih važećih bezbednosnih pravila i protokola institucije).

6



Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje tokom dve sekunde da biste isključili jedinicu, ako se pacijent neće vraćati.


Transport pacijenta

1




Pritisnite dugme za transport pacijenta da biste naduvali vazdušni dušek malo iznad podešenog pritiska.

2

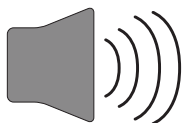


Nakon zvučnog signala i kada indikator dugmeta za transport počne da svetli zeleno, isključite kabl za napajanje i obmotajte ga oko kuke kod uzglavlja.

3

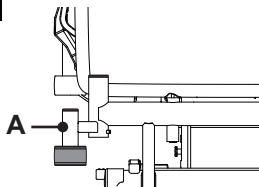


Postavite IV terapiju pacijenta na stalke za infuziju, zatim u otvore (A) koji se nalaze na sva četiri ugla kreveta.

4

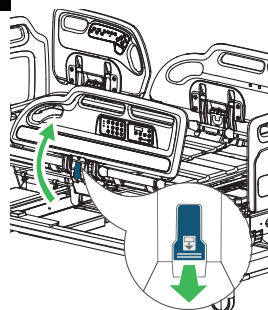


Podignite bočne šine.

5

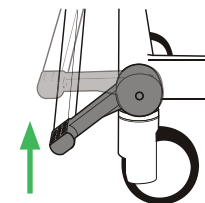

Otpustite kočnice.

6

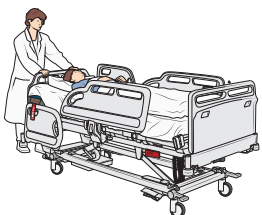

Prebacite pacijenta, sledeći sva primenjiva pravila sigurnosti i protokole ustanove.

7

Odmah po transportu pacijenta aktivirajte kočnice za točkice na okviru kreveta i uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

8



Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje na kontrolnoj jedinici dušeka tokom dve sekunde da biste uključili kontrolnu jedinicu.

