



Citadel Hasta Tedavi Sistemi

Hasta Yerleşimi / Transferi için Hazırlık

- 1**

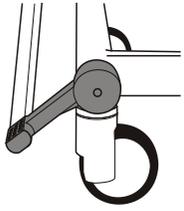


Yatak profilinin tekerlek frenlerini etkinleştirin.
- 2**

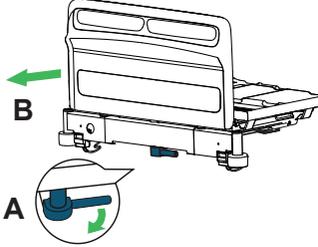

İhtiyaç halinde profili ve şilteyi uzatın.
- 3**



Üniteye hava beslemesini etkinleştirmek için kontrol panelindeki Açma/Kapatma düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.
- 4**

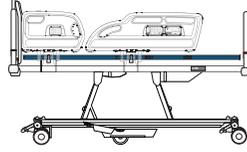


Hasta yüzeyini dengeleyin.
- 5**



Sert Şilte düğmesine basarak şilteyi şişirin.
- 6**



Yastık, battaniye ve diğer ekipmanları ekleyin.
- 7**

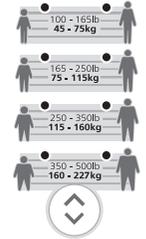

Başlangıçtaki hava basınçlarını ayarlayın: Hastanın profilini seçmek için Boy/Ağırlık ön ayarlarına basın.

Hasta Yerleşimi

Citadel hasta tedavi sisteminden hasta transferi


- 1**




Basınç Bölgesi Ayarı düğmelerine basarak şilte basıncını ayarlayın. Basıncı artırmak için yukarı azaltmak içinse aşağı ok tuşlarına basın.
- 1**




Hasta yüzeyini dengeleyin.
- 2**

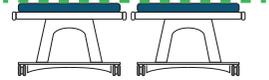

Hastanın yüzey yüksekliğini hastanın transfer edildiği yüzey yüksekliğiyle aynı seviyeye ayarlayın.
- 3**

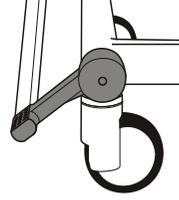

İki ünite de frenleri etkinleştirin.
- 4**

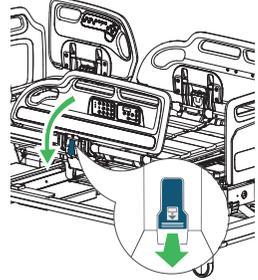

Kenar korkuluklarını indirin.
- 5**

Hastanın transferini gerçekleştirin (tüm geçerli güvenlik kurallarını ve kurum protokollerini takip ederek).
- 6**



Hasta geri dönmeyecekse üniteyi kapatmak için Açma/Kapatma düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.


Hasta taşıma

1




Hasta Taşıma düğmesine basarak Havalı Yatağı ayar basıncını hafifçe geçecek şekilde şişirin.

2

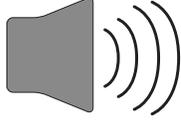


Sinyal sesi duyulduktan ve taşıma düğmesi göstergesi yeşil yandıktan sonra, güç kablosunu prizden çıkarın, kabloyu baş ucu kısmındaki kancaya sarın.

3

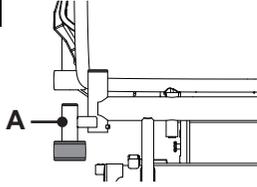


Hastanın tedavi serumunu serum askılarına ve ardından yatağın dört köşesinde de bulunan soketlere (A) yerleştirin.

4

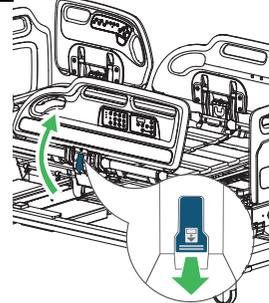


Kenar korkuluklarını yükseltin.

5

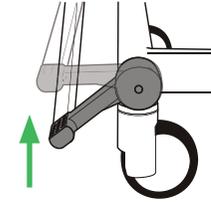

Frenleri serbest bırakın.

6

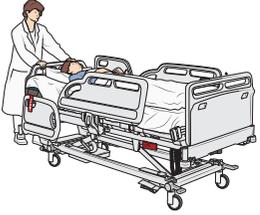

Tüm geçerli güvenlik kurallarını ve kurum protokollerini takip ederek hastayı taşıyın.

7

Hastayı taşıdıktan sonra yatak profilindeki tekerlek frenlerini etkinleştirin ve ardından vakit geçirmeden güç kablosunu duvardaki prize takın.

8



Kontrol ünitesini açmak için şilte kontrol ünitesindeki Açma/ Kapatma düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.

