


Система для лікування пацієнта Citadel


Підготовка до розміщення/перенесення пацієнта

1

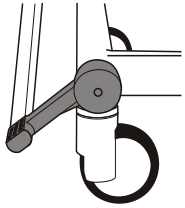


Застосуйте гальма коліщаток на каркасі ліжка.

2

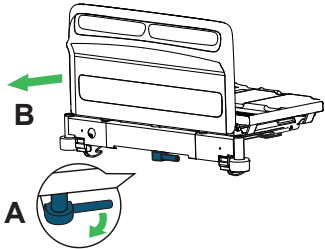


За необхідності витягніть каркас і матрац.

3




Натисніть і утримуйте протягом двох секунд кнопку «Увімк./вимк.» на панелі керування, щоб активувати подачу повітря в пристрій.

4

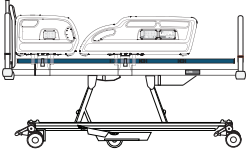


Вирівняйте поверхню для пацієнта.

5




Натисніть на кнопку жорсткого матраца, щоб надути матрац.

6

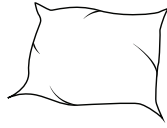

Додайте подушки, ковдри та інше обладнання.

7

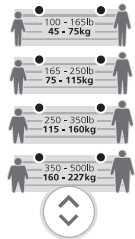

Встановіть початковий тиск повітря: натискайте на попередні установки зросту/маси, щоб вибрати профіль пацієнта.

Розміщення пацієнта




Натискайте кнопки регулювання зони тиску, щоб відрегулювати тиск матраца.

Натискайте стрілки «вгору», щоб збільшити тиск, і стрілки «вниз», щоб зменшити тиск.


Перенесення пацієнта з системи для лікування пацієнта Citadel

1

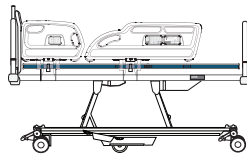


Вирівняйте поверхню для пацієнта.

2

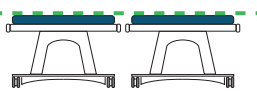


Відрегулюйте висоту поверхні для пацієнта до рівня поверхні для перенесення пацієнта.

3

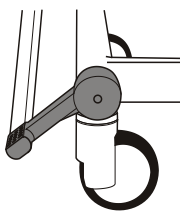

Застосуйте гальма на обох пристроях.

4

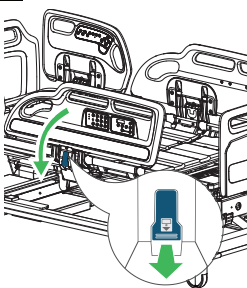


Опустіть бічні поручні.

5

Перенесіть пацієнта (дотримуючись усіх відповідних правил безпеки та протоколів установи).

6



Натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./вимк.» протягом двох секунд, щоб вимкнути пристрій, якщо пацієнт не повертатиметься.


Транспортування пацієнта

1




Натисніть кнопку транспортування пацієнта, щоб надути повітряний матрац трохи більше встановленого тиску.

2

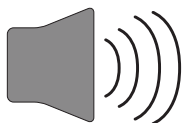


Після того, як пролунає звуковий сигнал і індикатор кнопки транспортування засвітиться зеленим, відключіть шнур живлення, намотайте шнур на гачок на кінці з боку голови.

3

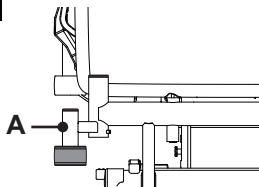


Потім розмістіть систему для лікування пацієнта з внутрішньовенним введенням на стійках для в/в введення в гніздах (A), розташованих у всіх чотирьох кутах ліжка.

4

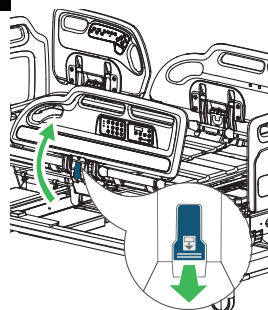


Підніміть бічні поручні.

5

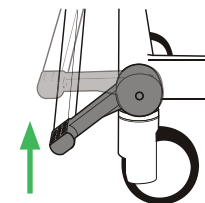

Відпустіть гальма.

6

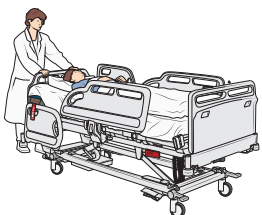

Перенесіть пацієнта, дотримуючись усіх відповідних правил безпеки та протоколів установи.

7

Після транспортування пацієнта застосуйте гальма коліщаток на каркасі ліжка і негайно підключіть шнур живлення до розетки.

8



Натисніть і утримуйте кнопку «Увімк./вимк.» на блоці керування матрацом протягом двох секунд, щоб увімкнути блок керування.

