


Citadel 患者治疗系统


患者放置 / 转运准备

1

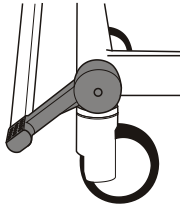


锁定床架的脚轮制动器。

2

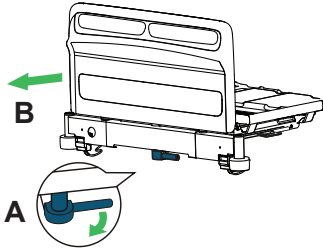


如有必要，延长床架和床垫。

3




按住控制面板的开 / 关按钮两秒，开始为装置供气。

4

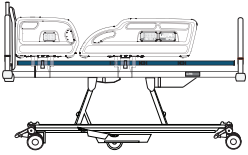


放平患者表面。

5




按加硬床垫按钮，为床垫充气。

6

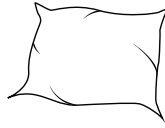

添加枕头、毯子及其他设备。


7

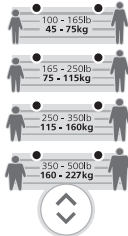

设置初始气压：按高度 / 重量预设值，选择与患者相配的设置。


放置患者

从 Citadel 患者治疗系统转运患者




按“压力区调整”按钮，调整床垫压力。
向上箭头加压，向下箭头减压。

1

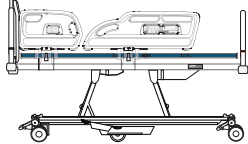


放平患者表面。

2

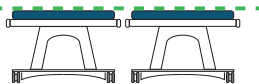


调节患者表面的高度，使其与患者转运表面高度相同。

3

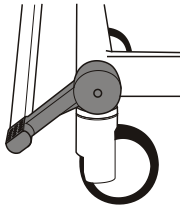

锁定两个装置的制动脚轮。

4

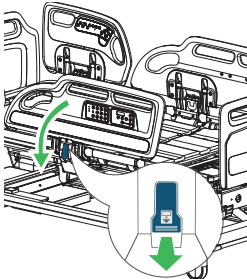


降低侧护栏。

5

转运患者（遵守所有适用的安全规则与制度章程）。

6



如果患者不再回来，请按住开 / 关按钮两秒，关闭装置。


患者转运

1




按患者转运按钮为气垫充气，让其压力稍高于设置的压力。

2

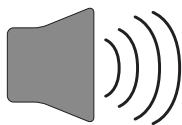


发出声音提示并且转运按钮指示灯变绿后，拔下电源线，绕好放到头端部挂钩上。

3

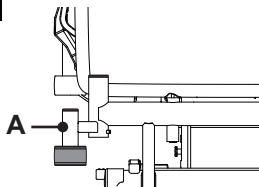


将患者的输液瓶放在输液吊杆上，然后插入位于床架四角的插孔内 (A)。

4

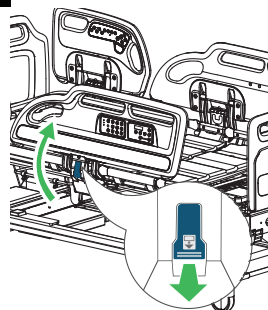


升高侧护栏。

5

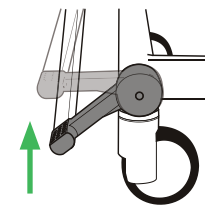

释放制动装置。

6

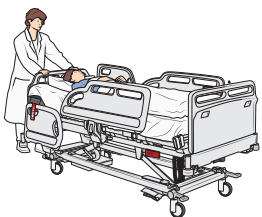

遵照所有适用的安全规则和制度章程转运患者。

7

完成患者转运后，锁定床架脚轮制动器，立即将电源线插入墙壁插座。

8



按住床垫控制装置上的开/关按钮两秒，打开控制装置。

