


Citadel 病患治療系統


準備安置/轉移病患

1

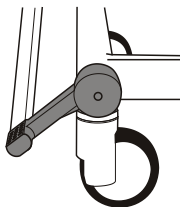


使用病床的腳輪煞車。

2

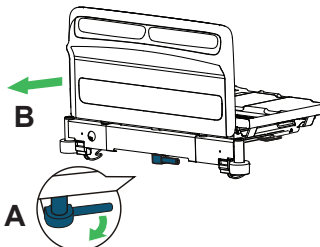


請視需要延伸床架與床墊。

3




按住控制面板上的開/關鈕兩秒，啟動單元的供氣。

4

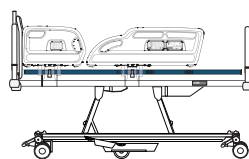


使病患的平面水平。

5




請按「穩定床墊」按鈕，以對床墊充氣。

6

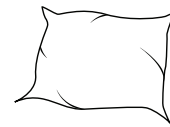

放上枕頭、毯子以及其他設備。


7

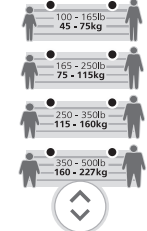

設定初始氣壓：請按下重量/體重預設值，以選擇病患設定檔。


病患安置

從 Citadel 病患治療系統轉移病患




按壓「壓力區域調整」鈕以調整床墊的壓力。
按壓向上箭頭以增加壓力，及向下箭頭以減低壓力。

1

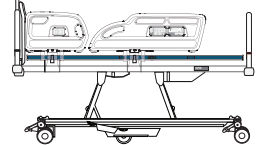


使病患的平面水平。

2

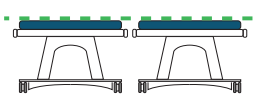


調整病患所處的高度，使其與病患要轉移到的平面等高。

3

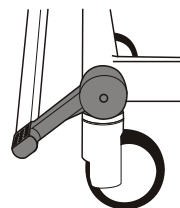

施用兩個裝置上的制動器。

4

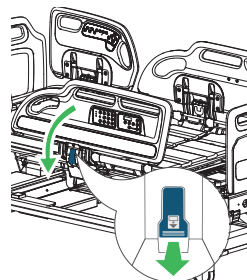


降下床邊護欄。

5

進行病患轉移 (遵守所有適用安全規定與機構協定)。

6



如果病患不再回到原來床位，請按住壓開/關鈕兩秒以關閉。


運送病患

1




請按下「病患運送按鈕」，將充氣床墊充氣至略高於設定的壓力。

2

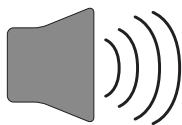


在發出提示音，且轉移按鈕指示燈轉為綠色後，請拔掉電源線，並將其捲起收至頭部端的掛鉤上。

3

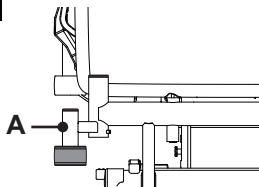


請將病患的靜脈注射治療置於靜脈注射桿上，並將注射桿放入床所有四個角落上的插槽 (A) 中。

4

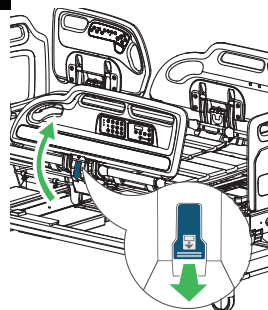


將床邊護欄升起。

5

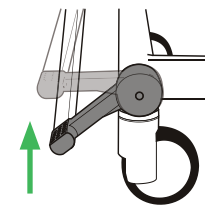

釋放腳輪制動器。

6

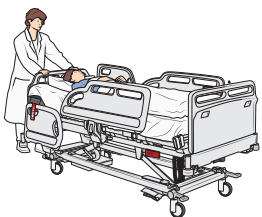

遵守所有適用之安全規定與機構協議來運送病患。

7

在病患運送完成後，請立即使用床架上的腳輪煞車，然後將電源線插入插座。

8



按住床墊控制單元上的開/關鈕兩秒以打開控制單元。

