

SOLLEVATORE MOBILE PASSIVO

# Maxi 500®



Il sollevatore carrellato Maxi 500 è stato progettato per aiutare gli assistenti a sollevare e trasferire pazienti e residenti in ospedali, case di cura, ambienti di assistenza domiciliare e altre strutture residenziali.

## GALLERIA DELLA MOBILITÀ ARJO



© Arjo 2019

**D.** Non è in grado di sostenere il proprio peso sugli arti inferiori. È in grado di stare seduta se ben sostenuta.

**E.** Ha difficoltà a stare seduta, pertanto rimane a letto in posizione sdraiata o semisdraiata, sedendosi solo su sedie speciali che offrono il massimo sostegno.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare Arjo.

- **Capacità di sollevamento**

Carico di lavoro sicuro: 227 kg (500 lb).

- **Familiarità**

La barra di sollevamento è disponibile con una configurazione a 2 punti ad asola o a 4 punti con il sistema di posizionamento dinamico (DPS) manuale Arjo.

- **Doppi comandi**

Maxi 500 può essere azionato dall'attuatore e/o dalla pulsantiera di controllo, consentendo all'assistente di rimanere accanto al paziente/residente durante l'uso del sollevapazienti.

- **Semplicità**

Intuitivo e di facile utilizzo.

- **Bilancia opzionale**

Integrando la pesatura nelle procedure di trasferimento si elimina la necessità di posizionare il paziente/residente su una bilancia fissa, facilitando così le operazioni di routine per assistito ed assistente.

# Caratteristiche principali

## BILANCIA (OPZIONALE)

La bilancia sospesa opzionale consente efficienti operazioni di pesatura.

## RUOTE A BASSO ATTRITO

Ruote a basso attrito, con le posteriori dotate di freni per bloccare il sollevapazienti in posizione durante lo stoccaggio e il sollevamento dal pavimento.

## SOLUZIONE PER L'ATTRITO ELEVATO

Il disco di attrito riduce l'oscillazione della barra di sollevamento durante i trasferimenti del paziente/residente.

## DOPPI COMANDI

Oltre alla pulsantiera di controllo, le funzioni elettriche di Maxi 500 possono essere attivate dal pannello di controllo posto sull'attuatore.

## CHASSIS CON STAFFE REGOLABILI

Lo chassis con staffe regolabili elettricamente, azionato dalla pulsantiera di controllo, consente l'accesso per il sollevamento e trasferimento da/a sedie ampie, sedie a rotelle o WC/comode.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Carico di lavoro sicuro (SWL)	227 kg	500 lb
Peso del sollevapazienti (con barra di sollevamento e batteria)	57 kg	126 lb
Altezza di sollevamento max	1.860 mm	73 1/4"
Altezza di sollevamento min	650 mm	25 5/8"
Escursione di sollevamento	1.210 mm	47 5/8"
Altezza min. totale per lo stoccaggio	1.320 mm	52"
Larghezza esterna con chassis chiuso	680 mm	26 3/4"
Larghezza esterna con chassis aperto	1.080 mm	42 1/2"
Larghezza interna con chassis chiuso	550 mm	21 2/3"
Larghezza interna con chassis aperto	950 mm	37 2/5"
Altezza staffe chassis (dal pavimento al punto più alto delle staffe dello chassis)	120 mm	4 3/4"
Spazio sotto le staffe dello chassis (dal pavimento alla base dello chassis)	28 mm	1 1/8"
Lunghezza del sollevapazienti	1.140 mm	44 7/8"
Diametro di sterzata	1.330 mm	55 3/8"
Classe di protezione del sollevapazienti	IP24	
Classe di protezione della pulsantiera di controllo	IPX7	
Batteria	24 V, 4 Ah	
Spia carica batteria		
Il contaore visualizza il tempo totale di utilizzo (ore)		
Arresto di emergenza e discesa di emergenza		
Interruzione automatica della discesa in caso di ostacoli		
Ruote a basso attrito, quelle posteriori con freni		

## ACCESSORI

Barra di sollevamento ad asola 2 punti


Barra di sollevamento a 4 punti con Sistema di Posizionamento Dinamico (DPS)

Vasta gamma di corsetti per scopi specifici e Flites

Accessori opzionali: bilancia sospesa

Disinfettanti Arjo

## REQUISITI DI SPAZIO

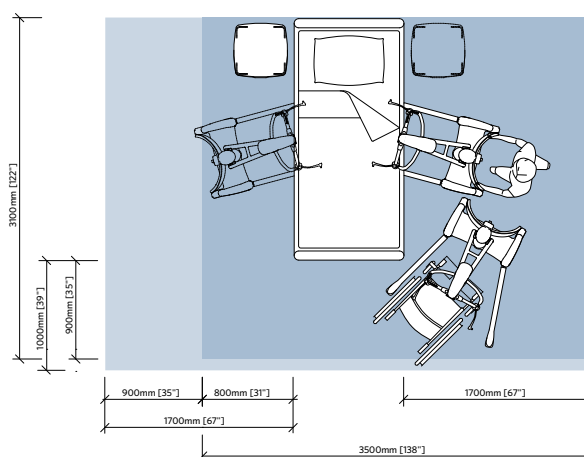

- L'area blu mostra lo spazio minimo necessario per consentire all'assistente di utilizzare il sollevapazienti a pavimento in modo ergonomico da un lato.
- L'area azzurra mostra l'estensione di spazio necessaria per facilitare le attività da entrambi i lati, al fine di assicurare un accesso adeguato al paziente, al sollevapazienti a pavimento e all'assistente.

Novembre 2019. Arjo raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso. ® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo Arjo.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500  
Arjo S.p.A • Via Giacomo Peroni 400-402 • 00131 Roma • Italia • +39 067426211

Arjo.A00152.1.0.IT.IT

**arjo**