

Sistema de tratamiento de pacientes y estructura de cama Citadel



Limpiar y desinfectar con una frecuencia semanal, y antes de cada paciente.

Limpiar diariamente el sistema Citadel

Los cuidados y la limpieza diarios consisten en el lavado de todas las superficies y las barandillas laterales.

1. Siga las instrucciones de cuidado y limpieza de la superficie de apoyo del paciente específica que se utilice.
2. Si fuese posible, retire al paciente de la cama antes de limpiarla.
3. Desconecte el sistema Citadel de la toma de corriente.
4. Examine el cable de alimentación en busca de signos de desgaste o daños. El sistema Citadel nunca se debe usar si el cable de alimentación está desgastado o dañado.
5. Limpie las superficies con un paño humedecido con agua jabonosa templada o desinfectante hospitalario autorizado.
6. Enjuague con un paño humedecido con agua limpia.
7. Deje que todos los componentes se sequen completamente antes de volver a utilizarlos.
8. Inspeccione todos los componentes antes de su uso.
9. Conecte el sistema Citadel a la toma de corriente y realice los ajustes necesarios.

Limpiar y desinfección del sistema Citadel entre pacientes

Limpiar

1. Retire el colchón y todos los accesorios de la cama.
2. Retire el cabecero, el piecero y las láminas del somier antes de la limpieza.
3. Limpie todas las superficies con un paño desechable humedecido con agua templada y un detergente neutro.
4. Empiece por las partes superiores y continúe con todas las superficies horizontales. Trabaje hacia las secciones inferiores de la cama y limpie las ruedas en último lugar. Preste atención a las áreas en las que se pueda acumular polvo o suciedad.
5. Limpie estas áreas con un paño desechable nuevo humedecido con agua limpia y séquelas con toallas de papel desechables.
6. Espere a que los componentes limpios se sequen.

Desinfección

7. Después de limpiar la cama, limpie todas las superficies con dicloroisocianurato sódico (NaDCC) en una concentración de 1.000 partes por millón (0,1%) de cloro disponible.

Si hay manchas de fluidos corporales, p. ej. sangre, se deberá aumentar la concentración de NaDCC hasta 10 000 partes por millón (1 %) de cloro disponible.

8. Limpie estas áreas con un paño desechable nuevo humedecido con agua limpia y séquelas con toallas de papel desechables.
9. Vuelva a colocar el colchón en la cama.

