

Sustav za terapiju i sustav okvira kreveta Citadel



Očistite i dezinficirajte krevet tjedno te prije novih pacijenata.

Dnevno čišćenje sustava Citadel

Dnevna njega i čišćenje sastoje se od brisanja svih površina i bočnih šina.

- Pridržavajte se upute za održavanje i čišćenje određene potporne površine pacijenta koja se upotrebljava.
- Ako je moguće, pacijent ne bi trebao biti na krevetu prilikom čišćenja.
- Iskopčajte sustav Citadel iz zidne utičnice.
- Pregledajte ima li na kabelu za napajanje tragova istrošenosti ili oštećenja. Sustav Citadel ne smije raditi s istrošenim ili oštećenim kabelom za napajanje.
- Prebrišite površine krpom namočenom u toplu sapunastu vodu ili odobren bolnički dezinficijens.
- Isperite krpom namočenom u čistu vodu.
- Pričekajte da se osuši do kraja prije vraćanja u upotrebu.
- Provjerite kod svih dijelova ima li oštećenja.
- Ukopčajte sustav Citadel u zidnu utičnicu i prilagodite postavke.

Čišćenje i dezinfekcija sustava Citadel nakon svakog pacijenta

Čišćenje

- S kreveta uklonite madrac i kompletan dodatni pribor.
- Skinite ploče uzglavlja i podnožja te ploče platforme za madrac prije čišćenja.
- Očistite sve površine krpom za jednokratnu upotrebu navlaženom topлом vodom i neutralnim deterdžentom.
- Započnite kod gornjih dijelova i nastavite duž svih horizontalnih površina. Čistite prema donjim dijelovima kreveta i na kraju očistite kotače. Obratite pozornost na područja na kojima se zadržava prašina ili prljavština
- Obrišite novom krpom za jednokratnu uporabu navlaženom čistom vodom, a zatim osušite papirnatim ručnicima za jednokratnu uporabu.
- Pričekajte da se očišćeni dijelovi osuše.

Dezinfekcija

- Nakon čišćenja kreveta, obrišite sve površine natrijevim dikloroizocijanuratom (NaDCC) u koncentraciji od 1000 dijelova na milijun (0,1%) dostupnog klora. U slučaju izljevanja tjelesnih tekućina, npr. krvi, koncentraciju NaDCC-a potrebno je povećati na 10 000 dijelova na milijun (1 %) slobodnog klora.
- Obrišite novom krpom za jednokratnu uporabu navlaženom čistom vodom i osušite papirnatim ručnicima za jednokratnu uporabu.
- Vratite madrac na krevet.

