

# Citadel 환자 치료 및 침대 프레임 시스템

신규 환자를 받기 전에 매주 세척하고 소독하십시오.

## 일일 Citadel 시스템 세척

일일 관리 및 세척은 모든 표면과 측면 레일을 닦아내는 것으로 구성됩니다.

1. 사용 중인 특정 환자 지지대 표면의 경우 관리 및 세척 지침을 따르십시오.
2. 가능한 경우 세척 전에 환자를 침대에서 내려오도록 하십시오.
3. 벽 콘센트에서 Citadel 시스템을 분리하십시오.
4. 마모 또는 손상의 징후가 없는지 전원 코드를 검사하십시오. Citadel 시스템은 마모되거나 손상된 전원 케이블과 함께 사용해서는 절대 안 됩니다.
5. 따뜻한 비눗물이나 허가된 병원 소독제에 적신 천으로 표면을 닦으십시오.
6. 깨끗한 물에 적신 천으로 헹구십시오.
7. 다시 사용하기에 앞서 모든 구성품이 완전히 마르도록 하십시오.
8. 사용 전에 손상된 곳은 없는지 모든 부품을 확인하십시오.
9. Citadel 시스템을 벽 콘센트에 플러그 연결하고 설정을 조정합니다.

## 환자 간 Citadel System 세척 및 소독

### 세정

1. 침대에서 매트리스와 모든 부속품을 분리합니다.
2. 세척을 하기에 앞서 헤드 및 풋 보드와 매트리스 플랫폼 시트를 분리합니다.
3. 따뜻한 물과 중성 세제에 적신 일회용 천으로 모든 표면을 닦습니다.
4. 윗부분부터 시작하여 모든 평평한 표면을 전부 닦습니다. 침대의 아랫부분을 향해 작업하고 바퀴를 마지막으로 청소하십시오. 먼지나 이물질이 쌓일 수 있는 곳은 주의를 기울입니다.
5. 깨끗한 물에 적신 새로운 일회용 천으로 닦아내고 일회용 종이 타월로 습기를 제거합니다.
6. 세척한 부품을 말리십시오.

### 소독

7. 침대를 세척한 후 백만 분의 천(0.1%)의 농도로 유효 염소량을 지닌 염화이소시아늄산나트륨(NaDCC)으로 전체 표면을 닦으십시오.  
체액(예: 혈흔)을 닦는 경우, NaDCC의 농도를 백만 분의 만(1%) 유효 염소량으로 증가시켜야 합니다.
8. 깨끗한 물에 적신 새로운 일회용 천으로 닦아내고 일회용 종이 타월로 습기를 제거합니다.
9. 매트리스를 침대에 놓으십시오.