

Bolnišnični sistem za zdravljenje in sistem posteljnega okvira Citadel



Čistite in razkužujte enkrat tedensko in ob pripravi za novega oskrbovanca.

Dnevno čiščenje sistema Citadel

V okviru dnevnega čiščenja je treba obrisati vse površine in stranske ograje.

1. Upoštevajte navodila za nego in čiščenje opornih podlog za oskrbovanca, ki jih uporabljate.
2. Pred čiščenjem premestite oskrbovanca s postelje, če je to mogoče.
3. Odklopite sistem Citadel iz električnega omrežja.
4. Prepričajte se, da napajalni kabel ni obrabljen ali poškodovan. Sistema Citadel ne uporabljajte z obrabljenim ali poškodovanim napajalnim kablom.
5. Površine obrišite s krpo, navlaženo s toplo milnico ali odobrenim bolnišničnim razkužilom.
6. Sperite s krpo, navlaženo s čisto vodo.
7. Preden nadaljujete z uporabo, počakajte, da se vse komponente popolnoma posušijo.
8. Pred uporabo preglejte vse dele, ali so morda poškodovani.
9. Priklopite sistem Citadel v električno vtičnico in prilagodite nastavitve.

Čiščenje in razkuževanje sistema Citadel pred naslednjim oskrbovancem

Čiščenje

1. S postelje odstranite vzmetnico in vso dodatno opremo.
2. Pred čiščenjem odstranite vzglavne in vznožne stranice ter podloge dna vzmetnice.
3. Očistite vse površine s krpo za enkratno uporabo, navlaženo z vodo in nevtralnimi čistilnimi sredstvi.
4. Začnite pri vzglavju in čistite vzdolž vodoravnih površin. Nadaljujte proti vznožju postelje in nazadnje očistite kolesca. Bodite pozorni na površine, na katerih se lahko nabira prah ali umazanija.
5. Površine obrišite z novo krpo za enkratno uporabo, namočeno v čisto vodo, in jih osušite s papirnimi brisačami za enkratno uporabo.
6. Počakajte, da se očiščeni deli posušijo.

Razkuževanje

7. Ko posteljo očistite, vse površine obrišite z raztopino natrijevega dikloroizocianurata (NaDCC) s koncentracijo klora 1.000 delcev na milijon (0,1 %).
V primeru nabranih telesnih tekočin, npr. krvi, mora biti koncentracija klora v NaDCC povišana na 10.000 delcev na milijon (1 %).
8. Površine obrišite z novo krpo za enkratno uporabo, namočeno v čisto vodo, in jih osušite s papirnimi brisačami za enkratno uporabo.
9. Vzmetnico položite nazaj na posteljo.

