

ระบบบำบัดผู้ป่วย และระบบโครงเตียง Citadel

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์ และก่อนที่ผู้ป่วยใหม่จะใช้งาน

การทำความสะอาด Citadel System ประจำวัน

การดูแลและทำความสะอาดประจำวันประกอบด้วย การเช็ดพื้นผิวและราวกันข้างเตียงทั้งหมด

1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลและทำความสะอาดสำหรับพื้นผิวรองรับผู้ป่วยเฉพาะที่ใช้งาน
2. นำผู้ป่วยออกจากเตียงก่อนทำความสะอาด หากเป็นไปได้
3. ถอดปลั๊ก Citadel System จากเต้ารับที่ผนัง
4. ตรวจสอบสายไฟเพื่อดูว่ามีการชำรุดสึกหรอหรือไม่ ไม่ควรใช้งาน Citadel System หากสายไฟชำรุดสึกหรอ
5. เช็ดพื้นผิวด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นผสมสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
6. เช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด
7. ปลดปล่อยให้ส่วนประกอบทั้งหมดแห้งสนิทก่อนนำกลับไปใช้งาน
8. ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อหาจุดชำรุดก่อนใช้งาน
9. เสียบปลั๊ก Citadel System เข้ากับเต้ารับที่ผนังและปรับการตั้งค่า

การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ Citadel System เมื่อเปลี่ยนผู้ป่วย

การทำความสะอาด

1. ถอดที่นอนและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากเตียง
2. ถอดแผ่นปิดหัวเตียง แผ่นปิดปลายเตียง และแผ่นรองที่นอนเพื่อทำความสะอาด
3. ทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดด้วยผ้าใช้แล้วทิ้งชุบน้ำอุ่นและน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง
4. เริ่มที่ส่วนบนและเช็ดพื้นผิวทั้งหมดไปตามแนวนอน ทำความสะอาดต่อที่ส่วนล่างของเตียงและล้อเลื่อนเป็นส่วนใหญ่ ใส่ใจเป็นพิเศษบริเวณที่อาจมีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกสะสม
5. เช็ดด้วยผ้าใช้แล้วทิ้งผืนใหม่ที่ชุบน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูใช้แล้วทิ้ง
6. รอให้ชิ้นส่วนที่ทำความสะอาดแล้วแห้ง

การฆ่าเชื้อ

7. หลังจากทำความสะอาดเตียง ให้เช็ดพื้นผิวทั้งหมดด้วยโซเดียมไดคลอไรไฮดรอกไซด์ (NaDCC) ที่มีความเข้มข้นของคลอรีน 1,000 ส่วนต่อล้าน (0.1%)
ในกรณีเปื้อนของเหลวในร่างกาย เช่น เลือด สารละลาย NaDCC ควรเพิ่มความเข้มข้นของคลอรีนเป็น 10,000 ส่วนต่อล้าน (1%)
8. เช็ดด้วยผ้าใช้แล้วทิ้งผืนใหม่ที่ชุบน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูใช้แล้วทิ้ง
9. วางเบาะที่นอนลงบนเตียง