

Acessórios necessários:

- Vestuário de proteção
- Detergente neutro
- Dicloroisocianurato de sódio (NaDCC) numa concentração de 1 000 ppm (0,1%) de cloro disponível.
- Dicloroisocianurato de sódio (NaDCC) numa concentração de 10 000 ppm (1%) de cloro disponível
- Água quente
- Panos descartáveis
- Toalhas de papel descartáveis

A cama deve ser limpa e desinfetada todas as semanas e antes de ser utilizada por um novo paciente.

## Limpeza e desinfecção entre pacientes

### Limpeza

1. Retire o colchão e todos os acessórios da cama.
2. Retire os lençóis da cabeceira, da placa dos pés e do estrado do colchão da cama.
3. Limpe todas as superfícies com um pano descartável humedecido com água e detergente neutro.  
Comece pelas partes superiores da cama e trabalhe ao longo de todas as superfícies horizontais.  
Trabalhe metodicamente em direção às partes inferiores da cama e limpe as rodas por último.
4. Passe um novo pano descartável humedecido com água e seque com toalhas de papel descartáveis.
5. Deixe as partes limpas secarem.

### Desinfecção

6. Depois de limpar a cama, limpe todas as superfícies com dicloroisocianurato de sódio (NaDCC) numa concentração de 1 000 partes por milhão (0,1%) de cloro disponível. No caso de derrame de fluidos corporais, por exemplo, sangue, a concentração de NaDCC deve ser aumentada para 10 000 partes por milhão (1%) de cloro disponível.
7. Passe um novo pano descartável umedecido com água limpa e seque com toalhas de papel descartáveis.
8. Coloque novamente o colchão na cama.

## Limpeza diária

O cuidado e limpeza diários incluem a limpeza de todas as superfícies e grades laterais.

1. Siga as instruções de cuidados e limpeza para a superfície de suporte específica do paciente em utilização.
2. Se possível, retire o paciente da cama antes da limpeza.
3. Desligue o Sistema de cuidados bariátricos Citadel Plus da tomada de parede.
4. Inspeccione o cabo de alimentação para deteção de sinais de desgaste ou danos. O Sistema de cuidados bariátricos Citadel Plus não deverá ser utilizado com um cabo de alimentação desgastado ou danificado. Contacte a Arjo se detetar danos.
5. Limpe as superfícies com um pano humedecido em água morna com detergente ou desinfetante hospitalar aprovado.
6. Enxague com um pano humedecido com água limpa.
7. Deixe que todos os componentes sequem completamente antes de voltar a usar os mesmos.
8. Inspeccione todas as peças para deteção de sinais de danos, antes de voltarem a ser utilizadas. Contacte a Arjo, conforme necessário, para obter assistência técnica ou substituição.
9. Ligue o Sistema de cuidados bariátricos Citadel Plus à tomada de parede e regule as definições.