



Citadel Plus


Panel de control del cuidador

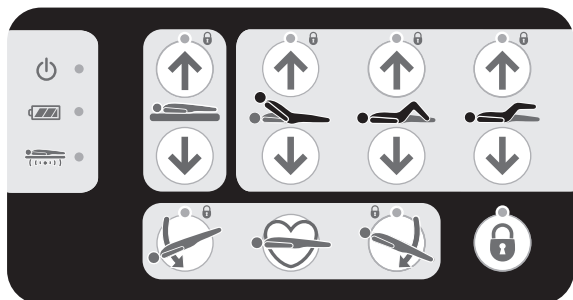


Panel de control del personal de enfermería

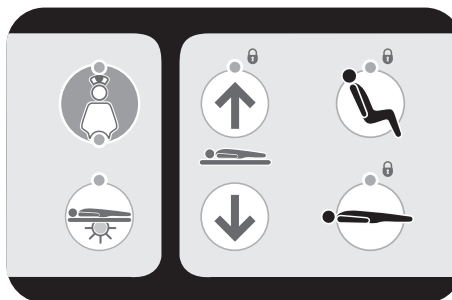

Mando para pacientes

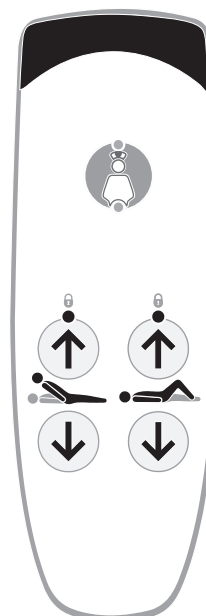

Panel de control del paciente

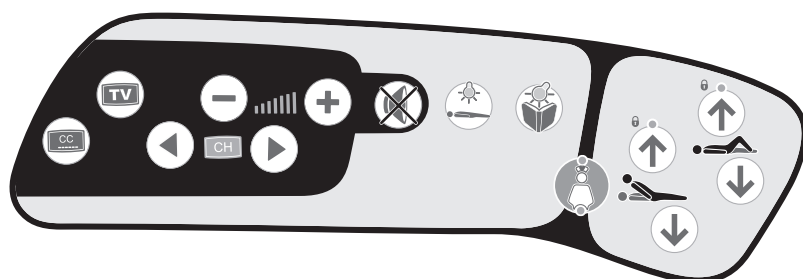

● Indicador de encendido



● Indicador LED del estado de la batería



● Batería completamente cargada



● Carga de la batería



● Batería descargada



Indicador del sistema antiatrapamiento (AES): cuando está iluminado, el sistema AES se ha activado y la obstrucción se tiene que eliminar antes de bajar la estructura.



Altura del somier: eleve o baje el somier.



Ángulo del respaldo: eleve o baje el respaldo.



Sección de los muslos: elevar o bajar la sección de los muslos.

Sección de la pantorrilla: eleve o baje la sección de la pantorrilla.



Bajar el cabecero
(posición de Trendelenburg)



Bajar el extremo del piecero
(posición anti-Trendelenburg)



Posición RCP: coloca el somier y baja la altura de la cama.



Bloqueo de funciones: pulse el botón y, a continuación, pulse los botones del panel de control del cuidador seleccionado para bloquear/desbloquear la función. Luz amarilla = bloqueada.



Asiento automático

(solo panel de control del personal de enfermería): mantenga pulsado para la posición de silla.



Descenso automático del asiento

(solo panel de control del personal de enfermería): mantenga pulsado para volver a la posición de nivel horizontal.



Luz bajo la cama

(solo el panel de control del personal de enfermería)



Llamada al personal de enfermería

(disponible en modelos seleccionados): pulse el botón para solicitar asistencia.



Lámpara de lectura

(disponible en modelos seleccionados): pulse el botón para encender la luz.



Lámpara de lectura encendida/apagada

(disponible en modelos seleccionados)



Sonido encendido/apagado (silenciado)

(disponible en modelos seleccionados)



Descenso del volumen

(disponible en modelos seleccionados)



Subida del volumen

(disponible en modelos seleccionados)



Bajar canal

(disponible en modelos seleccionados)



Subir canal

(disponible en modelos seleccionados)



Televisión encendida/apagada



(disponible en modelos seleccionados)



Subtitulado activado/desactivado

(disponible en modelos seleccionados)

Panel de control de báscula

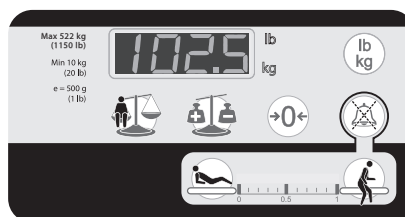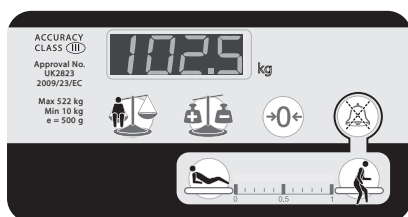

Cero: pulse el botón para restablecer el sistema de pesaje cuando la cama se instala por primera vez y antes de que se coloque un nuevo paciente en la cama.



Autocompensación: pulse el botón al agregar o retirar elementos de la cama sin que esto afecte al peso indicado del paciente.



Pesar: pulse el botón para mostrar el peso.



Seleccionar unidades: pulse el botón para seleccionar la unidad de pesaje.



Botón silenciador VariZone: pulse el botón para silenciar la alarma de salida durante tres minutos.

Umbral de detección de movimiento del

paciente: un indicador muestra la sensibilidad seleccionada del movimiento del paciente.



En cama: pulse el botón para reactivar o activar la detección de movimiento del paciente y aumentar la sensibilidad.



Salida: pulse el botón para reactivar o activar la detección de movimiento del paciente y reducir la sensibilidad.

