




контролен панел за придружаващия

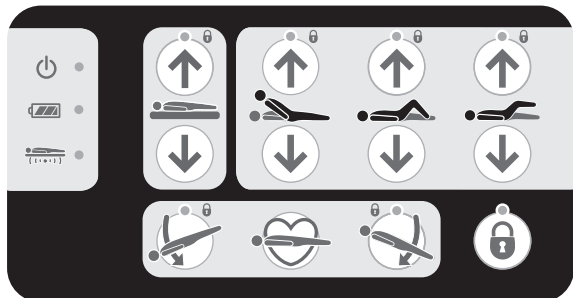


Контролен панел за медицински сестри

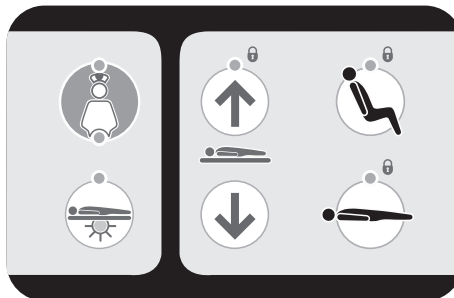

Ръчен контролер за пациента

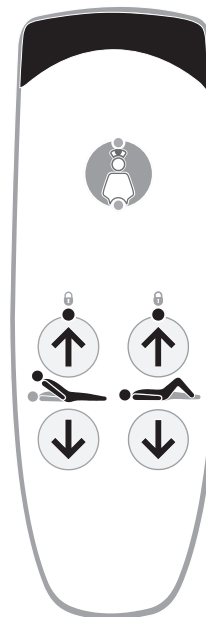

Контролен панел за пациента

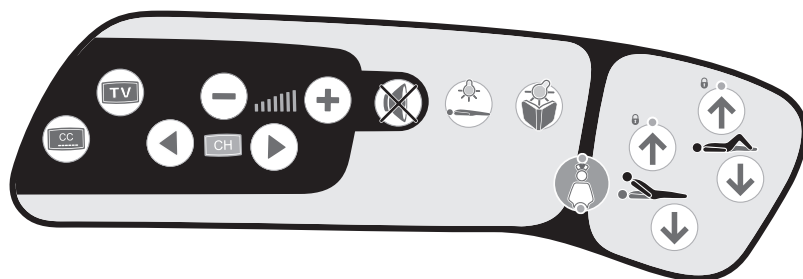

- Индикатор за включено захранване



- LED индикатор за състоянието на батерията



Напълно заредена батерия



Зареждане на батерията



Разредена батерия



Индикатор на системата против заклещване (AES) - Когато свети, системата AES е активирана и е необходимо да се премахне препятствие, преди рамката да бъде снижена.



Височина на матрачната платформа - Повдигане или снижаване на матрачната платформа.



Ъгъл на опората за гърба – Повдигане или снижаване на опората за гърба.



Секция за бедрата - Повдигане или снижаване на секцията за бедрата.



Секция за прасците - Повдигане или снижаване на секцията за прасците.



Сваляне на края при главата (Позиция Тренделенбург)



Сваляне на края при краката (Позиция обратен Тренделенбург)



Позиция на КПР - изравнява матрачната платформа и снижава височината на леглото



Заклучване на функциите – Натиснете бутона, след което натиснете изборния бутон (или бутони) за контролен панел за придружаващия, за да заключите или отключите функцията. Жълта светлина = заключено.



Автоматична позиция на стол

(само на контролния панел за медицински сестри) – Натиснете и задръжте за позиция на стол.



Автоматична позиция на стол – Надолу

(само за контролния панел за медицински сестри) – Натиснете и задръжте за връщане в хоризонтална позиция.



Лампа под леглото

(само за контролния панел за медицински сестри)



Извикване на медицинска сестра

(предлага се на определени модели) – Натиснете, за да поискате помощ.



Лампа за четене

(предлага се на определени модели) – Натиснете, за да включите лампата.



Лампа за четене включена/изключена

(предлага се при определени модели)



Звук включен/изключен (заглушаване)

(предлага се при определени модели)



Намаляване на силата на звука

(предлага се при определени модели)



Усилване на силата на звука

(предлага се при определени модели)



Предишен канал

(предлага се при определени модели)



Следващ канал

(предлага се при определени модели)



Телевизия включена/изключена



(предлага се при определени модели)



Субтитри включени/изключени

(предлага се при определени модели)

Контролен панел на кантара

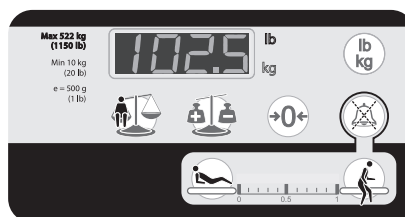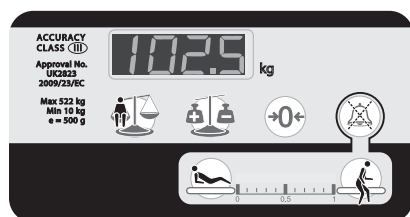

Нула – Натиснете за нулиране на системата за претегляне при първата настройка на леглото и преди настаняването на нов пациент в леглото.



Автоматична компенсация – Натиснете, когато се добавят на или премахват от леглото елементи, без да се засяга указаното тегло на пациента.



Тегло – Натиснете, за да се изведе теглото.



Избрани м.ед. – Натиснете за избор на единица за тегло.



Бутон за заглушаване VariZone – Натиснете, за да заглушите алармата за излизане за три минути.

Праг за откриване на движение на пациента – Индикатор показва избраната чувствителност за движение на пациента.



В леглото – Натиснете за повторно активиране или активиране на функцията за разпознаване на движението на пациента и за увеличаване на чувствителността.



Отсъствие – Натиснете за повторно активиране или активиране на функцията за разпознаване на движението на пациента и за намаляване на чувствителността.