


Maxi Sky 2 PLUS



Transfer vanuit zittende positie naar rugligging

1

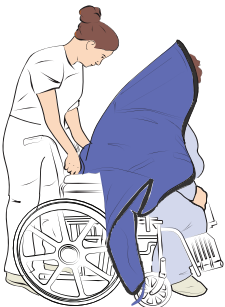

Breng de tilband om de zorgvrager aan. Let er bij gebruik van een tilband met hoofdsteun op dat die tot aan de bovenkant van het hoofd van de zorgvrager reikt.

2




Trek elke beenriem onder de dij door zodat deze aan de binnenkant van de dij tevoorschijn komt.

3



Tilband met lusbevestiging

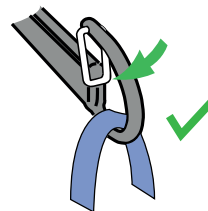


Plaats de bevestigingslus aan de haak. Verzekert u ervan dat de veiligheidsvergrendeling gesloten is.

4




Plaats het tiljuk onder een hoek van 45° en voldoende dichtbij om eerst de schouderlussen en vervolgens de beenlussen te kunnen bevestigen. Breng eerst het voeteneind van het tiljuk omhoog door de knop 'Achterover kantelen' te bedienen, om de beenlussen op spanning te brengen.

5

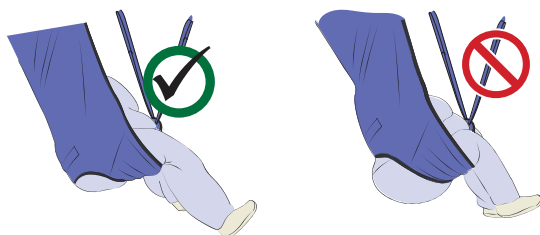


De tilband moet rond het zitvlak van de zorgvrager zijn aangebracht, voor een betere ondersteuning en een juiste installatie.

6

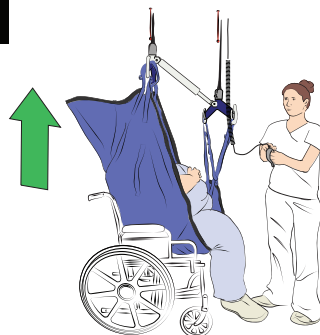


Breng de zorgvrager omhoog.

7

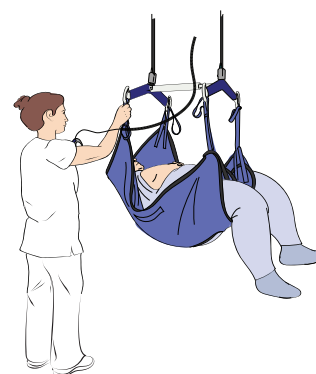

Verplaats de zorgvrager.


8

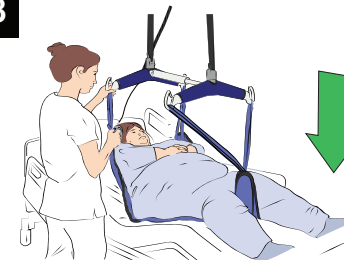

Breng de zorgvrager omlaag tot er geen spanning meer is. Maak eerst de beenlussen en vervolgens de schouderlussen los.

Transfer vanuit rugligging naar zittende positie

1

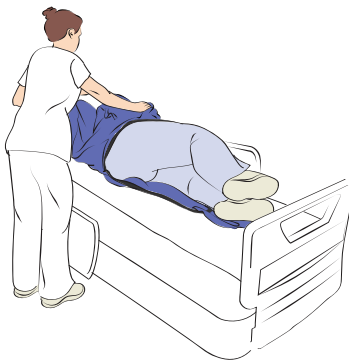

Draai de zorgvrager op zijn/haar zijde. Vouw de tilband dubbel en plaats hem op het bed langs de rug van de zorgvrager.

2




Rol de zorgvrager terug op de tilband en rol de zorgvrager vervolgens door, zodat het gevouwen deel van de tilband kan worden opgevouwen.

3




Tilband met lusbevestiging

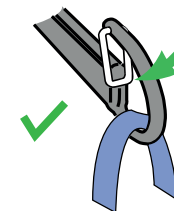


Plaats de bevestigingslus aan de haak. Verzekert u ervan dat de veiligheidsvergrendeling gesloten is.

4

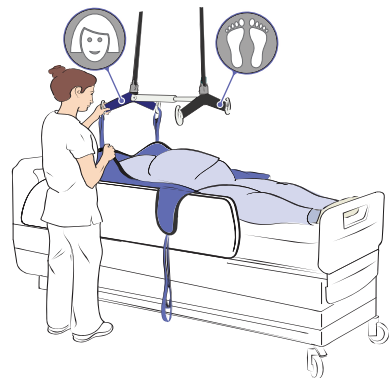


Plaats het tiljuk in de horizontale stand en voldoende dichtbij om de lussen te kunnen bevestigen. Bevestig de schouder- en beenlussen van de tilband aan het tiljuk.

5

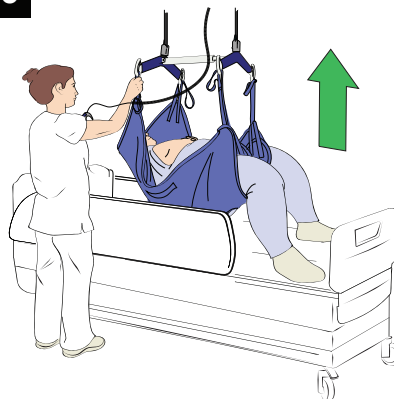


Breng de zorgvrager omhoog.

6

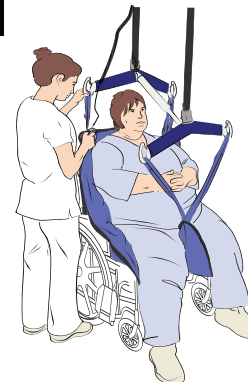

Verplaats de zorgvrager.

7

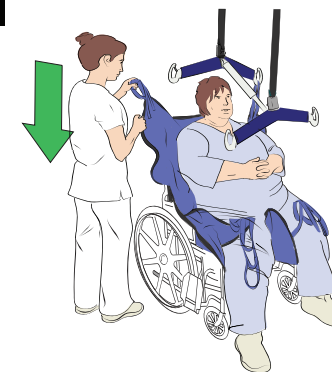

Breng de zorgvrager omlaag tot er geen spanning meer is. Maak eerst de beenlussen en vervolgens de schouderlussen los.

Herpositionering – in bed omhoog of opzij verplaatsen

1



Plaats de tilband onder de zorgvrager en positioneer de tillift boven de zorgvrager.


2

 Tilband met lusbevestiging



Plaats de bevestigingslus aan de haak. Verzekert u ervan dat de veiligheidsvergrendeling gesloten is.

3



Bevestig zoveel mogelijk tilbandlussen aan het tiljuk.

4



Breng omhoog totdat de heupen worden ondersteund en verplaats dan omhoog of opzij.

5



Breng de zorgvrager omlaag op de nieuwe locatie en koppel alle tilbandlussen los.

Herpositionering – draaien in bed

1



Plaats de tilband onder de zorgvrager en positioneer de tillift boven de zorgvrager. Plaats het tiljuk onder een hoek van 45° om de lussen te bevestigen.

2

 Tilband met lusbevestiging



Plaats de bevestigingslus aan de haak. Verzekert u ervan dat de veiligheidsvergrendeling gesloten is.

3



Bevestig zoveel mogelijk tilbandlussen van één kant van de tilband aan het tiljuk. Breng omhoog tot de zorgvrager in de gewenste positie is gerold.


4



Breng omlaag tot er geen spanning meer is en maak alle lussen los.

Horizontale transfers – van of naar aangrenzende horizontale vlakken

1

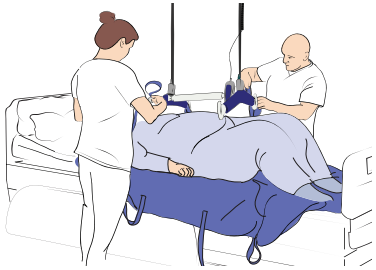


Plaats de lift voldoende dichtbij om de lussen te kunnen bevestigen.

2




Tilband met lusbevestiging

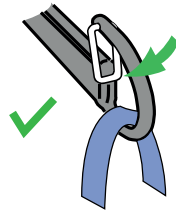


Plaats de bevestigingslus aan de haak.
Verzekert u ervan dat de veiligheidsvergrendeling gesloten is.

3

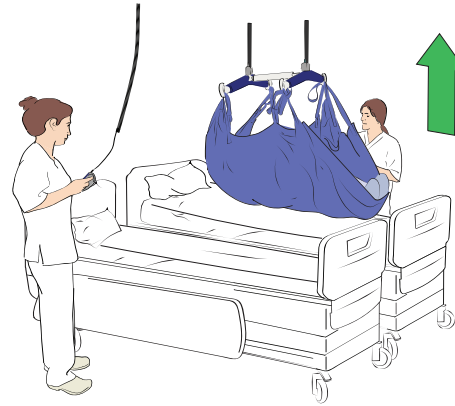


Bevestig de lussen aan het tiljuk.
Breng de zorgvrager omhoog totdat die volledig wordt ondersteund.

4

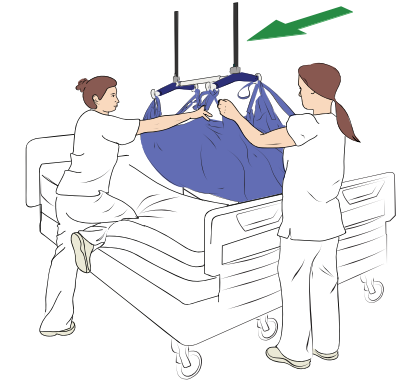

Verplaats de zorgvrager naar het nieuwe oppervlak en zorg ervoor dat hij/zij midden boven het nieuwe oppervlak is gepositioneerd.

5

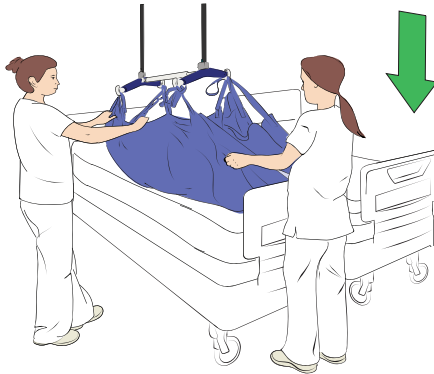

Laat de zorgvrager op het bed zakken.
Breng het tiljuk verder omlaag om de bevestigingslussen los te koppelen.
Breng het tiljuk omhoog en plaats de plafondlift uit de buurt van de zorgvrager.

