


Maxi Sky 2 PLUS



Transferul din poziția așezat în poziția culcat pe spate

1

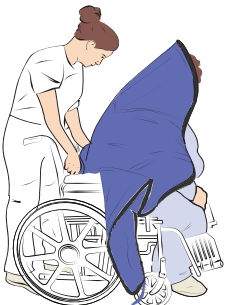

Așezați hamul în jurul pacientului. În cazul hamurilor cu suport pentru cap, extindeți suportul până când ajunge în partea de sus a capului pacientului.

2




Trageți fiecare curea pentru picioare sub coapsă astfel încât să fie așezată pe partea interioară a coapsei.

3



Ham cu bride

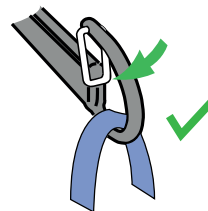


Atașați brida de prindere de cârlig. Asigurați-vă că încuietorea cu arc este închisă.

4




Poziționați bara de întindere la 45° și suficient de aproape pentru a prinde bridele pentru umeri, apoi pe cele pentru picioare. Ridicați capătul dinspre picioare al barei de întindere, folosind mai întâi butonul „Înclinare” pentru a crea tensiune pe bridele pentru picioare.

5

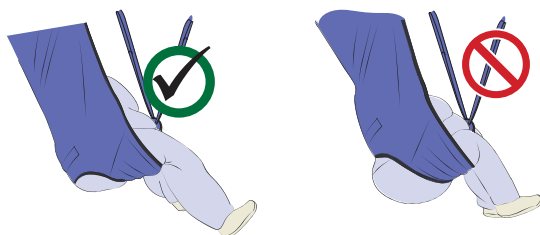


Hamul trebuie să cuprindă șezutul pacientului pentru a oferi mai multă susținere și pentru a fi instalat corect.

6

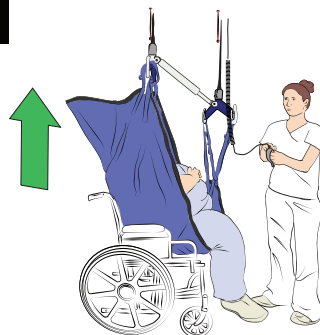


Ridicați pacientul.

7

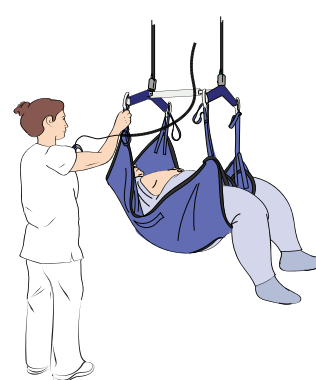

Mutați pacientul.

8

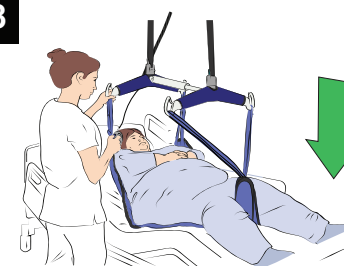

Coborâți până când hamul nu mai este întins. Desprindeți bridele pentru picioare, apoi pe cele pentru umeri.

Transferul din poziția culcat pe spate în poziția așezat

1



Mutați pacientul pe o parte, prin rostogolire. Pliați hamul și așezați-l pe pat, de-a lungul spatelui pacientului.

2




Rostogoliți pacientul înapoi pe ham și apoi în direcție opusă, astfel încât partea pliată a hamului să poată fi îndreptată.

3




Ham cu bride

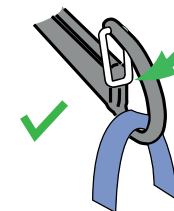


Atașați brida de prindere de cârlig. Asigurați-vă că încuietoarea cu arc este închisă.

4

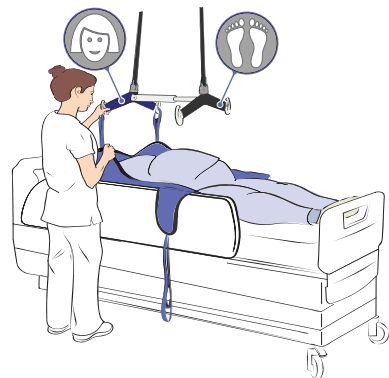


Așezați bara de întindere în poziție dreaptă și suficient de aproape pentru a putea prinde bridele. Cuplați bridele hamului pentru umeri și pe cele pentru picioare la bara de întindere.

5

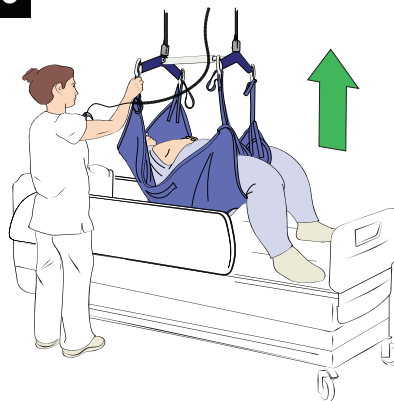


Ridicați pacientul.

6

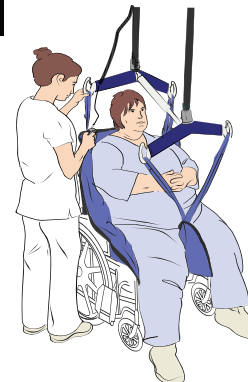

Mutați pacientul.


7

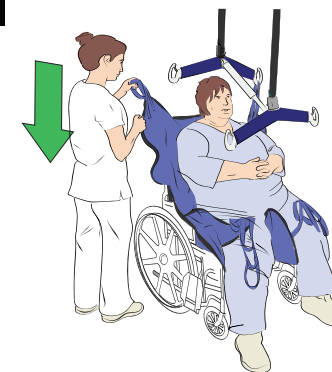

Coborâți până când hamul nu mai este întins. Desprindeți bridele pentru picioare, apoi pe cele pentru umeri.

Repoziționarea – mutarea în sus sau pe o parte a patului


1

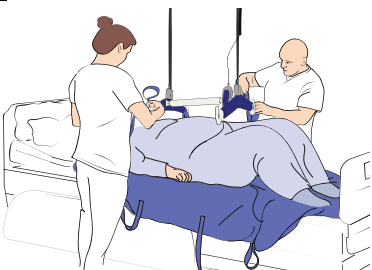

Poziționați hamul sub pacient, iar elevatorul peste pacient.


2

! Ham cu bride

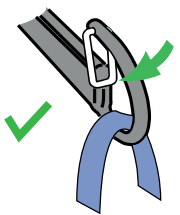


Atașați brida de prindere de cârlig. Asigurați-vă că încuietoarea cu arc este închisă.

3




Atașați cât mai multe bride ale hamului la bara de întindere.

4

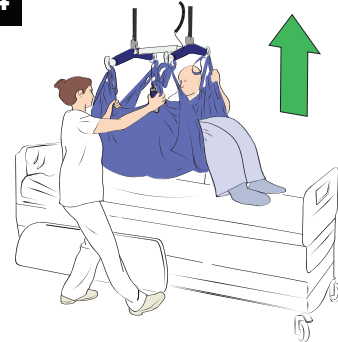

Ridicați până când șoldurile sunt sprijinite și deplasați în sus sau în lateral.


5

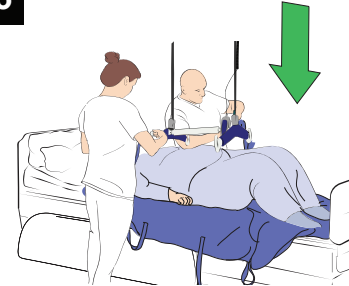

Coborâți pacientul în noul loc dorit și detașați toate bridele hamului.

Repoziționarea – întoarcerea în pat


1

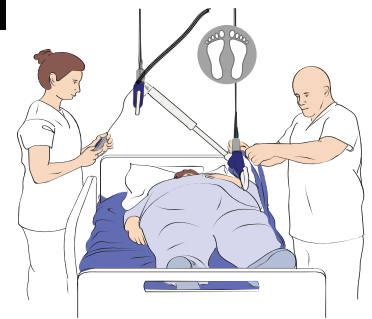

Poziționați hamul sub pacient, iar elevatorul peste pacient. Poziționați barele de întindere la 45° pentru a prinde bridele.


2

! Ham cu bride

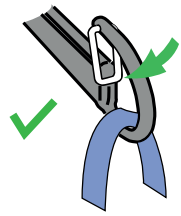


Atașați brida de prindere de cârlig. Asigurați-vă că încuietoarea cu arc este închisă.

3



Atașați cât mai multe bride ale hamului de pe o parte a hamului la bara de întindere. Ridicați până când pacientul ajunge în poziția dorită.


4

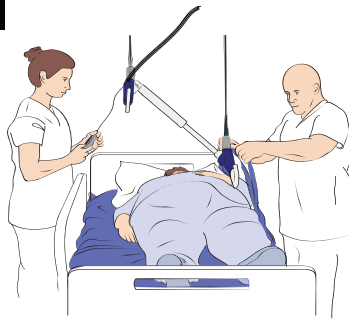

Coborâți până când hamul nu este întins, apoi detașați toate bridele.

Transferul lateral – de pe sau pe suprafețe drepte adiacente

1

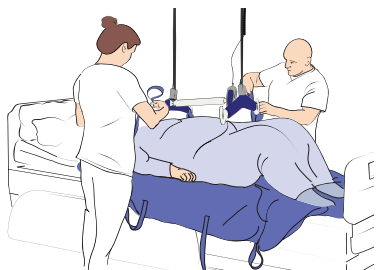


Poziționați elevatorul suficient de aproape pentru a putea prinde bridele.

2




Ham cu bride

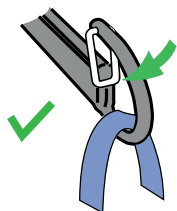


Atașați brida de prindere de cârlig. Asigurați-vă că încuietoarea cu arc este închisă.

3

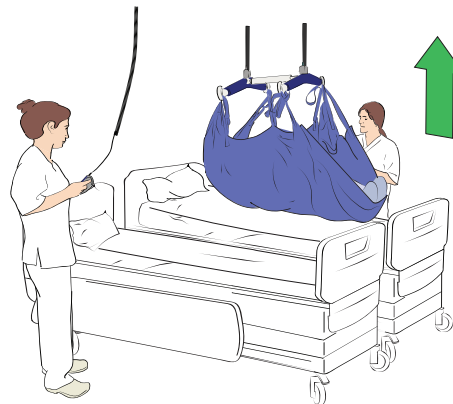


Prindeți bridele de bara de întindere. Ridicați pacientul până când este complet susținut.

4

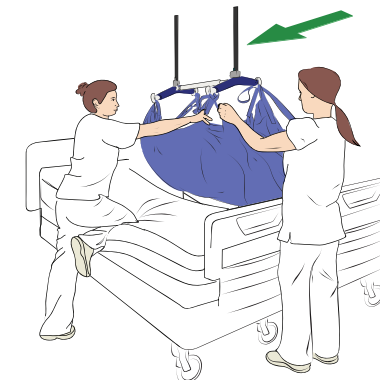

Mutați pacientul pe noua suprafață, poziționându-l central pe aceasta.

5

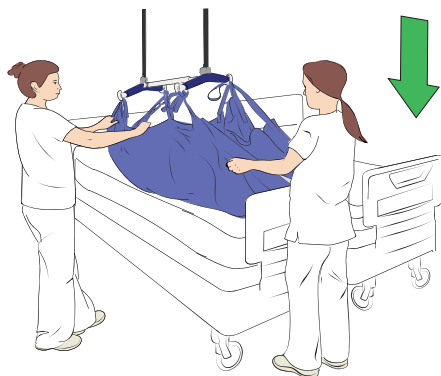

Coborâți pacientul pe pat. Coborâți bara de întindere mai jos pentru a putea scoate bridele.

Ridicați bara de întindere și îndepărtați elevatorul suspendat de pacient.

