


Maxi Sky 2 PLUS



Oturur pozisyondan sırtüstü pozisyona transfer

1

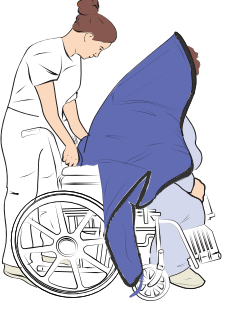

Askıyı hastanın etrafına yerleştirin. Baş destekli askının hastanın başının üzerine dek uzandığından emin olun.

2




Her bir bacak kayışını uylukların iç kısmından çıkacak şekilde uylukların altından geçirin.

3



Halka hasta taşıma aparatı

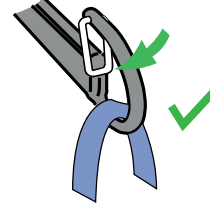


Bağlantı halkasını kancaya yerleştirin. Emniyet mandalının kapalı olduğundan emin olun.

4




Önce omuz halkalarını ardından da bacak halkalarını takmak için taşıma kolunu 45°'lik bir açıyla ve yeterince yakın bir konuma yerleştirin. Askının bacak halkalarını germek için "Yatırma" düğmesini kullanarak önce taşıma kolunun ayak ucunu kaldırın.

5

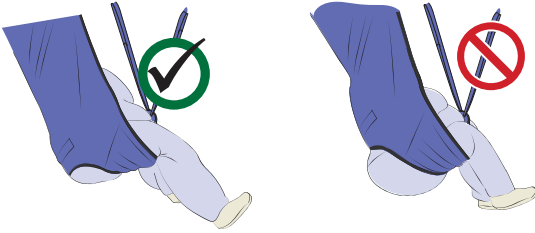


Daha iyi destek sağlamak ve kurulumun düzgün olması için askı, hastanın kalçalarını sarmalıdır.

6

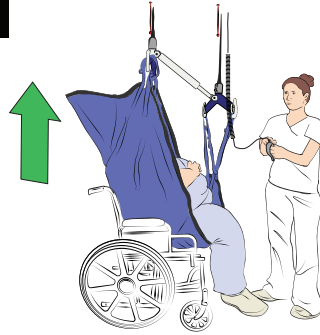


Hastayı kaldırın.

7

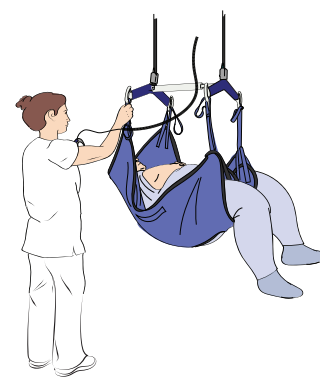

Hastayı taşıyın.

8

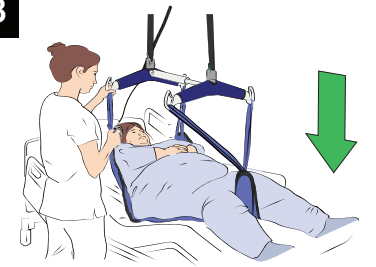

Gerilim kalmayana dek alçaltın. Önce bacak halkalarını ardından da omuz halkalarını sökün.


Sırtüstü pozisyonndan oturur pozisyona transfer

1



Hastayı yan tarafına döndürün. Askıyı ikiye katlayın ve hastanın sırtı boyunca uzanacak şekilde yatağa yerleştirin.

2

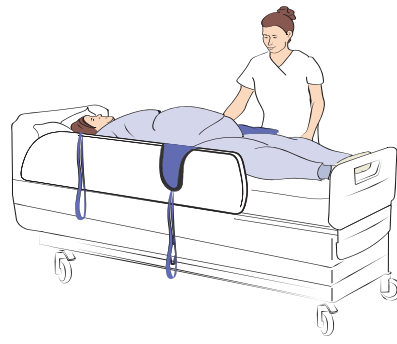


Hastayı önce askının üzerine ve ardından diğer tarafa döndürerek askının katlanan kısmının açılabilmesini sağlayın.

3




Halka hasta taşıma aparatı

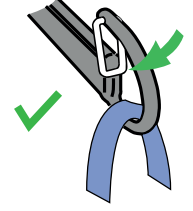


Bağlantı halkasını kancaya yerleştirin. Emniyet mandalının kapalı olduğundan emin olun.

4

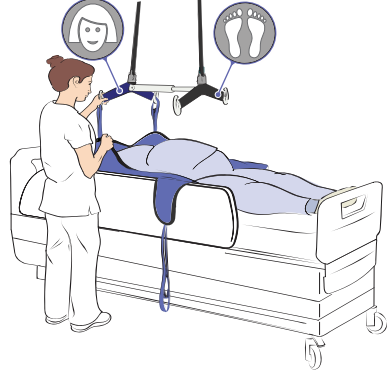


Taşıma kolunu düz ve yeterince yakın bir konuma yerleştirin. Askının omuz ve bacak halkalarını taşıma koluna takın.

5

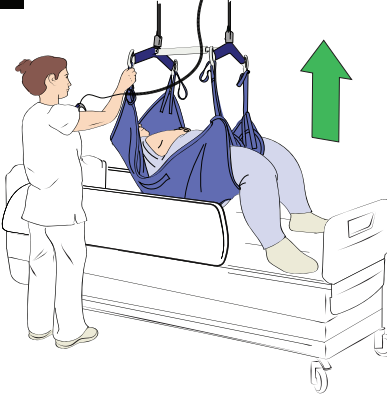

Hastayı kaldırın.

6

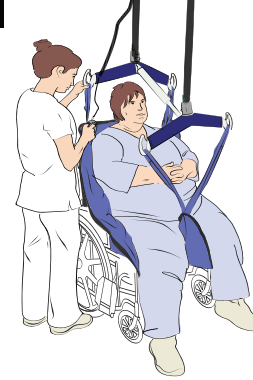

Hastayı taşıyın.

7



Gerilim kalmayana dek alçaltın. Önce bacak halkalarını ardından da omuz halkalarını sökün.

Yeniden pozisyonlandırma - yatakta yukarı veya yanlara hareket ettirme

1



Askıyı hastanın altına yerleştirin ve lifti hastanın üzerine konumlandırın.

2



Halka hasta taşıma aparatı

Bağlantı halkasını kancaya yerleştirin. Emniyet mandalının kapalı olduğundan emin olun.

3



Taşıma koluna mümkün olduğunca çok askı halkası takın.

4



Kalçalar desteklenip yukarı veya yana hareket edene dek kaldırmaya devam edin.


5



Hastayı yeni konumuna indirin ve tüm askı halkalarını çıkarın.


Yeniden pozisyonlandırma - yatakta döndürme

1

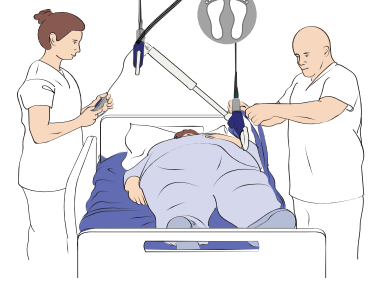

Askıyı hastanın altına yerleştirin ve lifti hastanın üzerine konumlandırın. Halkaları takmak için taşıma kollarını 45° açıyla yerleştirin.


2

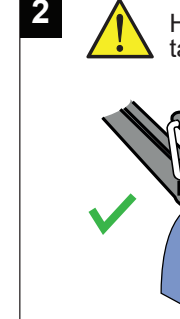

Halka hasta taşıma aparatı


Bağlantı halkasını kancaya yerleştirin. Emniyet mandalının kapalı olduğundan emin olun.

3

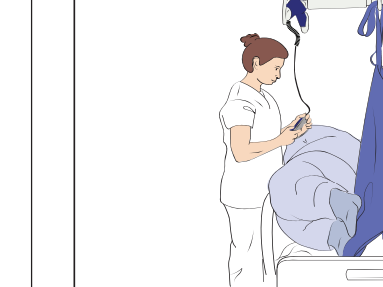

Bir taraf ile taşıma kolu arasına mümkün olduğunca çok askı halkası takın. Hasta istenen pozisyona dönene dek kaldırın.


4

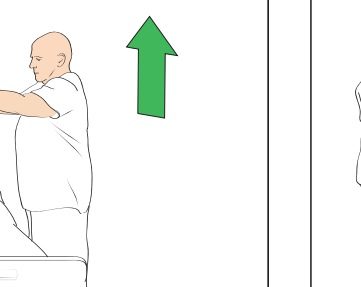

Gerilim kalmayana dek alçaltın ve tüm halkaları sökün.

Lateral transfer - bitişik düz yüzeylerden veya bitişik düz yüzeylere

1

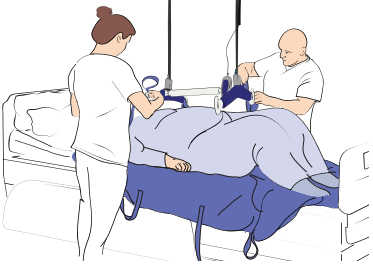


Lifti, halkaları takmak için yeterince yakın bir konuma yerleştirin.

2




Halka hasta taşıma aparatı

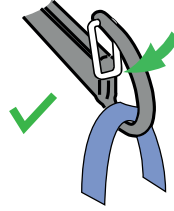


Bağlantı halkasını kancaya yerleştirin.
Emniyet mandalının kapalı olduğundan emin olun.

3

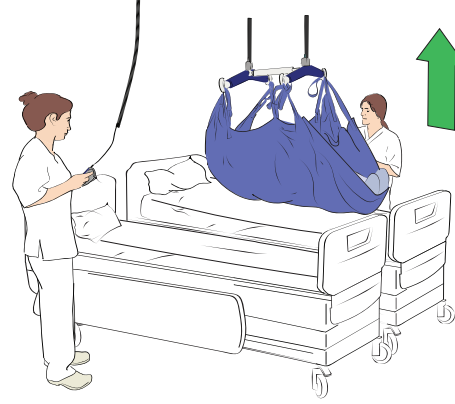


Halkaları taşıma koluna takın.
Hasta tamamen desteklenene dek hastayı kaldırın.

4

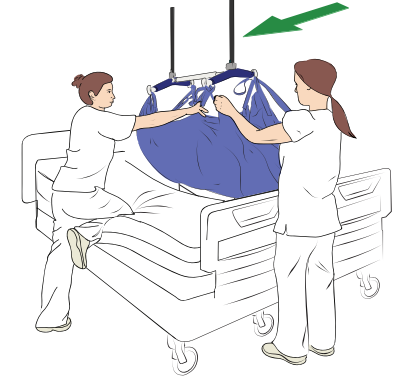

Hastayı yeni yüzeye taşıyın ve hastayı yeni yüzey üzerinde ortalayın.

5

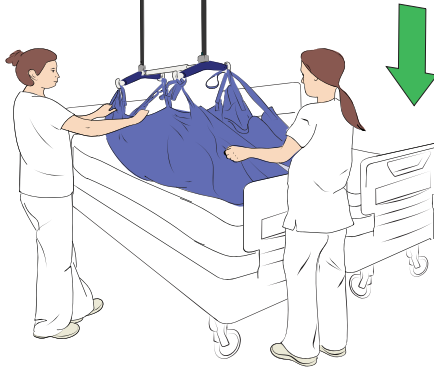

Hastayı yatağın üzerine indirin.
Askı halkalarını ayırmak için taşıma kolunu daha da indirin.

Taşıma kolunu kaldırın ve tavan liftini hastadan uzaklaştırın.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com