


Maxi Sky 2 PLUS



Перемещение из сидячего положения в положение лежа на спине

1

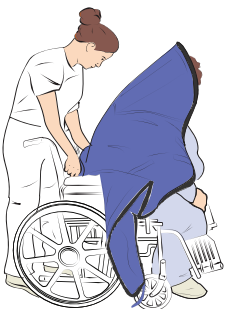

Разместите стропу вокруг тела пациента. При использовании стропы с зоной для поддержки головы растяните эту зону до темени пациента.

2




Пропустите каждый из ножных ремней под бедром так, чтобы они выходили с внутренней стороны бедра.

3



Петлевая стропы

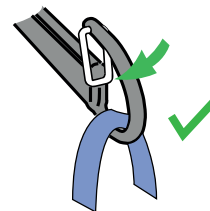


Поместите крепежную петлю на крючок. Убедитесь, что предохранительная защелка закрыта.

4




Расположите крановые балки под углом 45° на достаточно близком расстоянии для присоединения сначала плечевых, а затем и ножных ремней. Используя кнопку лежачего положения, поднимите ножной конец крановой балки для создания натяжения на ножных петлях.

5

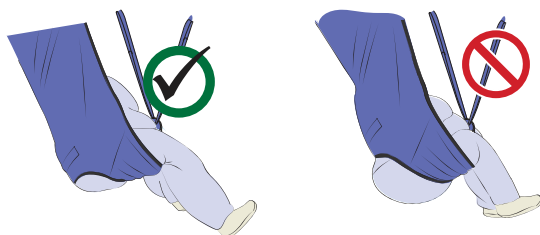


Для обеспечения поддержки пациента и правильной работы всей конструкции стропы должна охватывать ягодицы пациента.

6

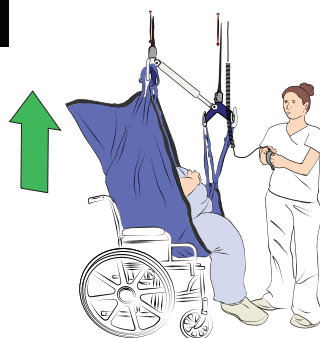


Поднимите пациента.

7

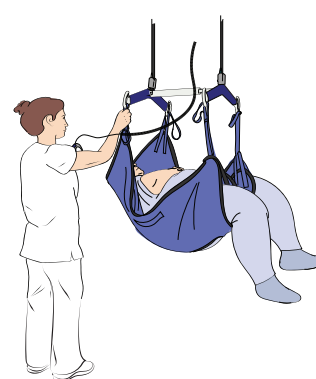

Переместите пациента.


8

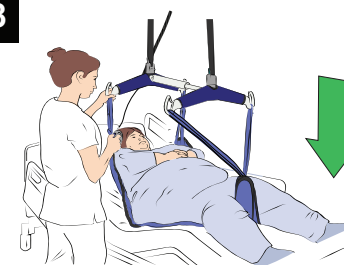

Опустите до полного прекращения натяжения. Отсоедините ножные, а затем плечевые петли.

Перемещение из положения лежа на спине в сидячее положение

1

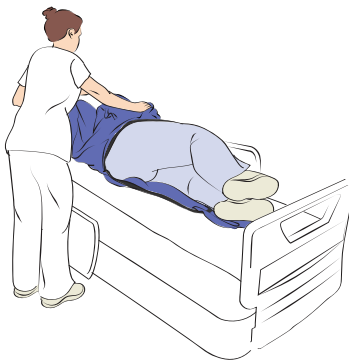

Перекадите пациента на бок. Сложите стропу пополам и положите ее на кровать вдоль спины пациента.

2




Перекадите пациента обратно на стропу и затем перекадите его немного дальше в противоположном направлении так, чтобы можно было распрямить сложенную часть стропы.

3




Петлевая стропа

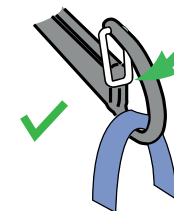


Поместите крепежную петлю на крючок. Убедитесь, что предохранительная защелка закрыта.

4

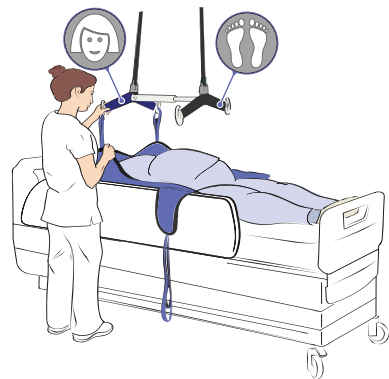


Разместите крановую балку горизонтально и достаточно близко для закрепления петель. Прикрепите плечевые и ножные петли стропы к крановой балке.

5

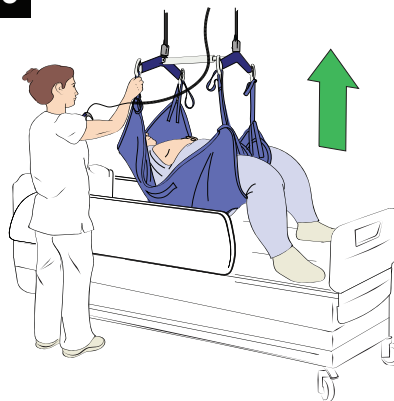


Поднимите пациента.

6

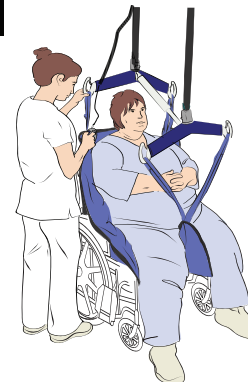




Переместите пациента.

7

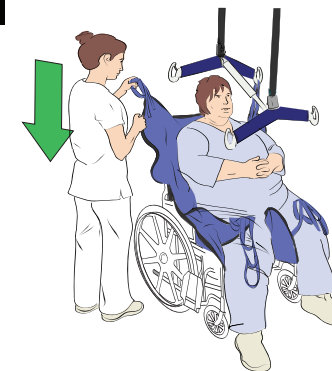

Опустите до полного прекращения натяжения. Отсоедините ножные, а затем плечевые петли.

Перемещение пациента — вверх по кровати или к ее краю

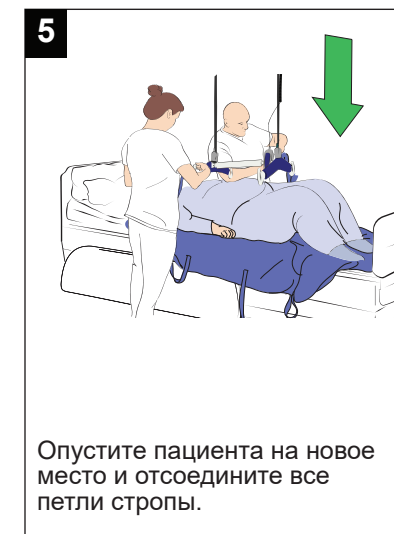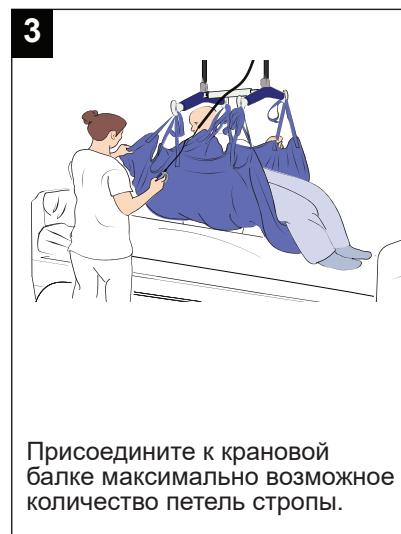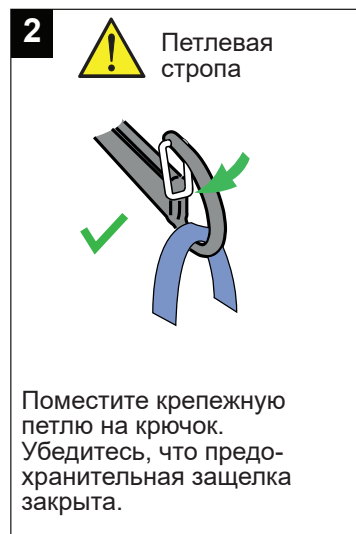


Перемещение пациента — поворот в кровати



Горизонтальное перемещение — на смежные плоские поверхности или с них

1

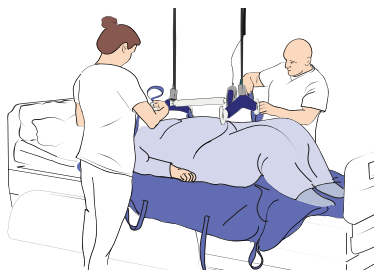


Расположите подъемник достаточно близко для закрепления петель.

2




Петлевая стропа

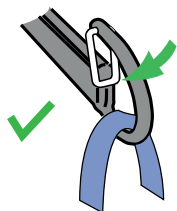


Поместите крепежную петлю на крючок. Убедитесь, что предохранительная защелка закрыта.

3

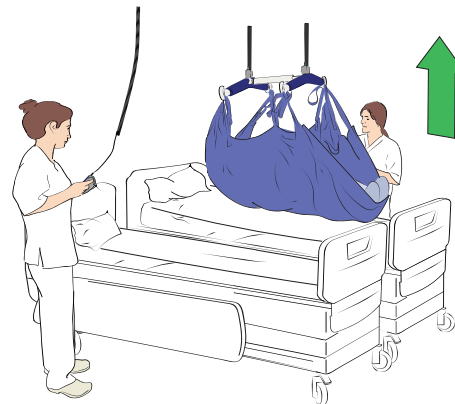


Прикрепите петли к крановой балке. Поднимайте пациента до тех пор, пока все его тело не будет полностью поддерживаться.

4

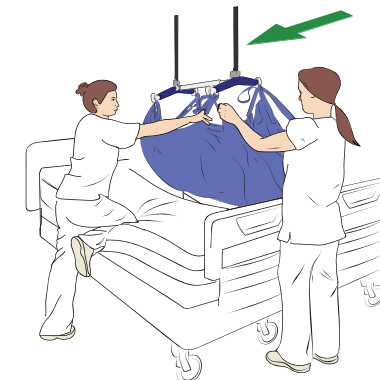

Передвиньте пациента и расположите его по центру новой поверхности.

5

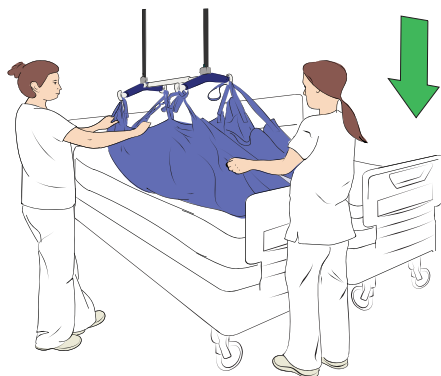

Опустите пациента на кровать. Опустите крановую балку еще ниже и отсоедините петли.

Поднимите крановую балку и отодвиньте потолочный подъемник от пациента.

