



Puristumissuoja

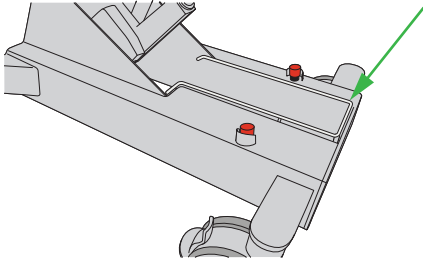

Pysäytä liike alaspäin automaattisesti painamalla puristumissuoja alas.

Hätäpysäytyspainikkeet

1

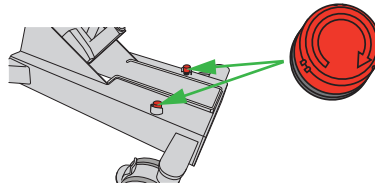

Paina hätäpysäytyspainiketta (-painikkeita), jos haluat sammuttaa virran kaikista sähköisistä osista.

2

Aktivointi:
Paina alas.




Deaktivointi:
Käännä myötäpäivään, kunnes se ponnahtaa takaisin ylös.




Hätätoimintopaneeli

1

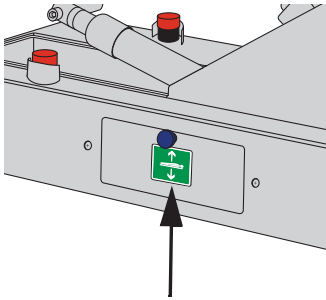


Sijaitsee alarungossa (oikealla puolella).

2

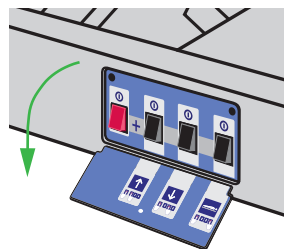

Avaa kansi.

3

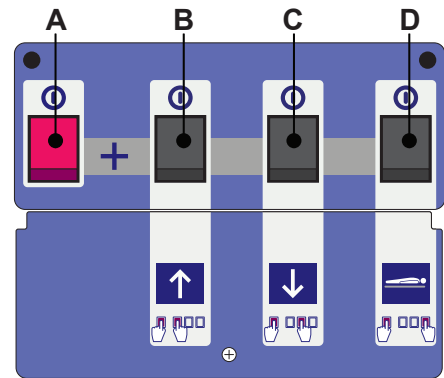


Paina päävirtakytkintä (A) samaan aikaan jonkin muun painikkeen kanssa.

- **Ylös:** Nosta Sara Combilizeria (B).
- **Alas:** Laske Sara Combilizeria (C).
- **Tasoasento:** Muuttaa tuoliasennon tasoasennoksi (D).


Kallistuspöydän vapautustoiminto

1

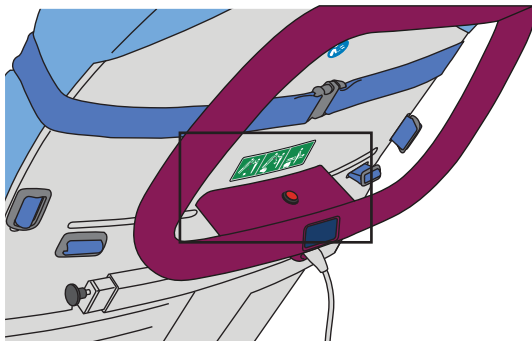

Potilaan laskeminen nopeasti seisoma-asennosta vaaka-asentoon.
Tähän saatetaan tarvita kahta hoitajaa.

2

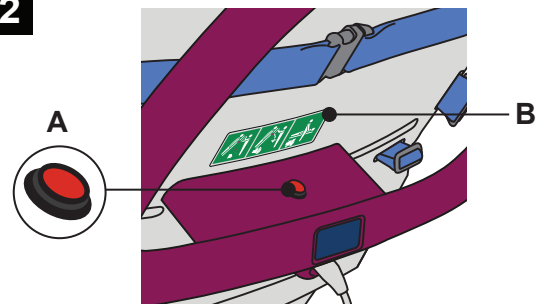


Kallistuspöydän vapautuspainike (A).
Laskutoimenpiteen tarra (B).

Kallistuspöydän vapautustoiminnon käyttö


1



Kytke Sara Combilizerin
jarrut päälle

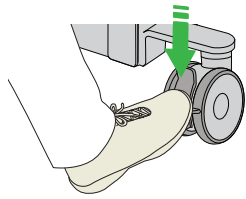


2

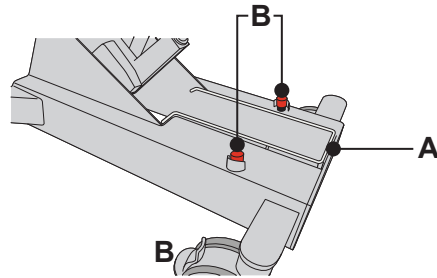


Älä aktivoi puristumissuojaa (A)
tai hätäpysäytuspainikkeita (B).

3

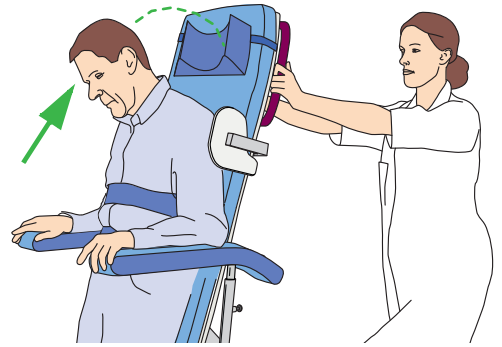


Pidä potilaan pää tyynyllä tai patjalla
koko prosessin ajan.

4

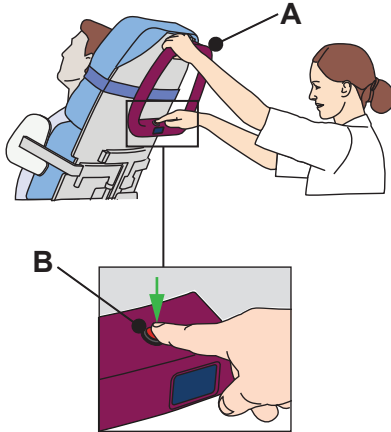


Paina kuljetuskahvaa (A).
Paina kallistuspöydän vapau-
tuspainiketta (B) kunnes
kuulet napsahduksen.
Äänimerkki alkaa kuulua.

5

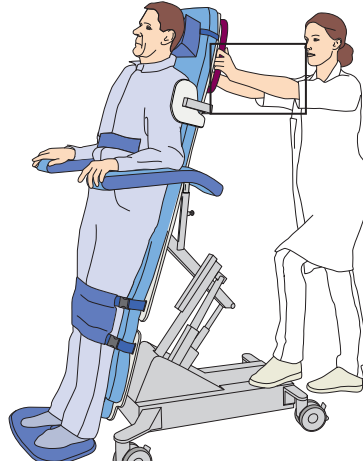

Aseta molemmat kädet lujasti
kuljetuskahvalle. Paranna
tukea pitämällä toinen jalka
rungon palkilla.

6

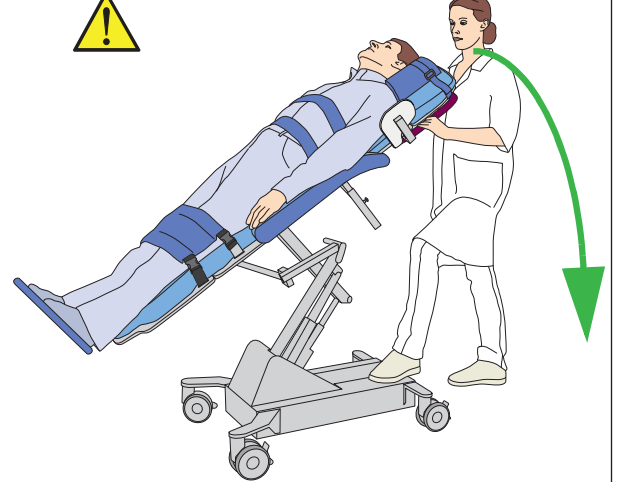


Vedä kallistuspöytä alas täysin vaakatasoon.
Paranna tukea pitämällä toinen jalka rungon
palkilla.

7




Paina paareja alas kunnes äänimerkki loppuu.
Sara Combilizer on lukittu vaakasuoraan
normaaliasennossa.

8

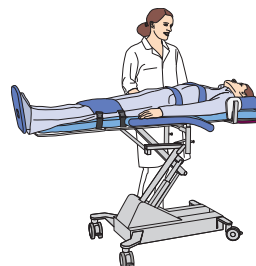

Säädä tarvittaessa tason
korkeutta.

9

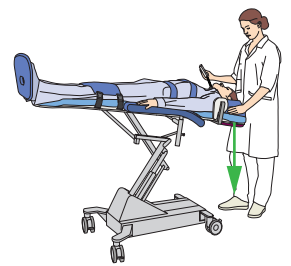

Aseta potilas tarvittaessa
Trendelenburg-asentoon.

