


Sara Combilizer




はさみ込み防止バー

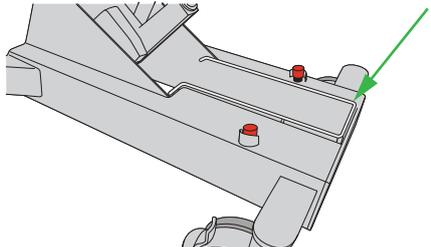

挟み込み防止バーを押し下げると、下降動作がすべて自動停止します。

緊急停止ボタン

1

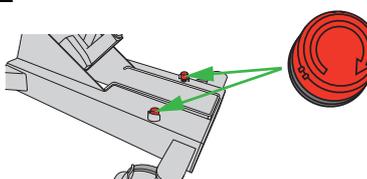

緊急停止ボタンを押して、あらゆる電気回路への電力供給を停止します。

2

作動させる：
押し下げる。




無効にする：
元の状態に戻るまで、時計回りに回します。




操作ボックス

1

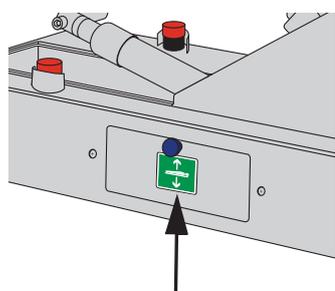


下側のフレーム上(右側)にあります。

2

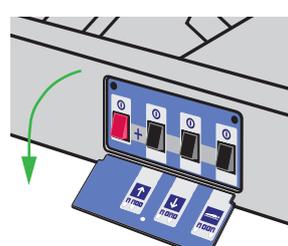

カバーを開きます。

3

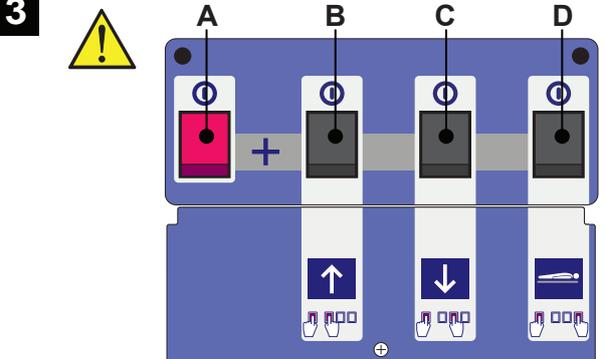


主電源スイッチ(A)を、他のボタンのいずれか1つと同時に押します。

- 上: Sara Combilizerを上昇させます(B)
- 下: Sara Combilizerを下降させます(C)
- ストレッチャー: チェアからストレッチャー姿勢へ変更します(D)。


傾斜テーブル解除機能

1

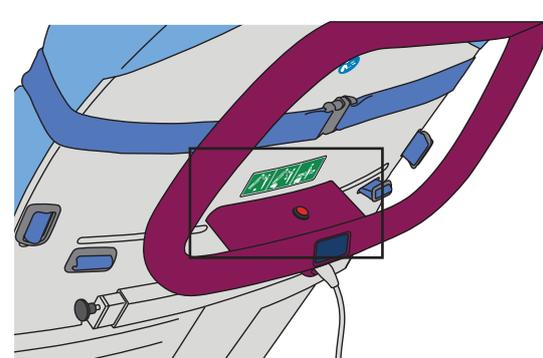

患者様を立位から水平姿勢に素早く下降させます。2人の介助者が必要になる場合があります。

2

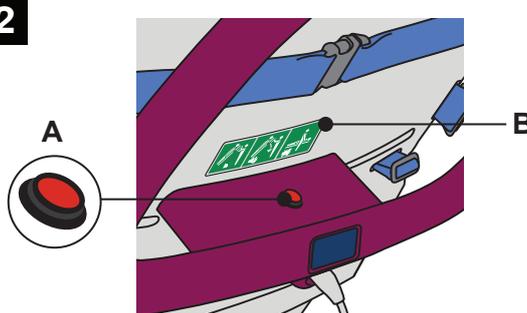


傾斜台解除ボタン (A)
下降手順ラベル (B)

傾斜テーブル解除機能の使用法


1



Sara Combilizerの
ブレーキをかけます。

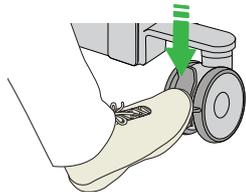


2

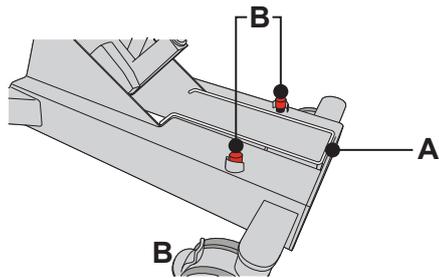


挟み込み防止バー(A)または緊急ボタン
(B)を作動させないでください。

3

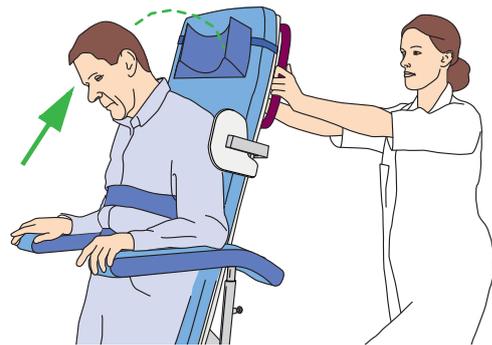


プロセス全体にわたって、患者様の頭を
枕またはマットレスの上に配置します。

4

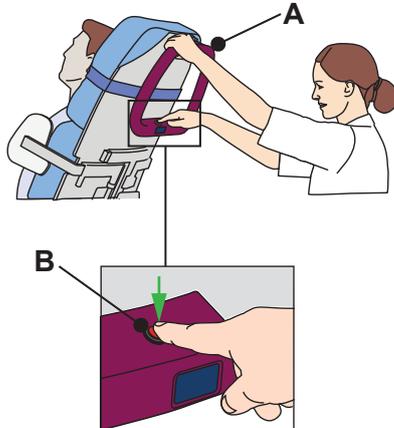


移動ハンドル(A)を押します。
「カチッ」という音がするまで、
傾斜台解除ボタン(B)を押し
ます。ピープ音が始まります。

5

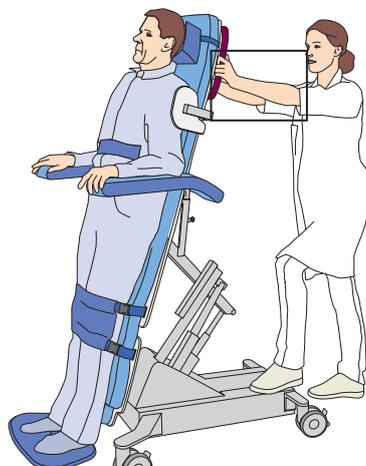

両手を移動ハンドルにしっかりと
置きます。より良いサポート
のために、シャーシビームに片
足を置いてください。

6

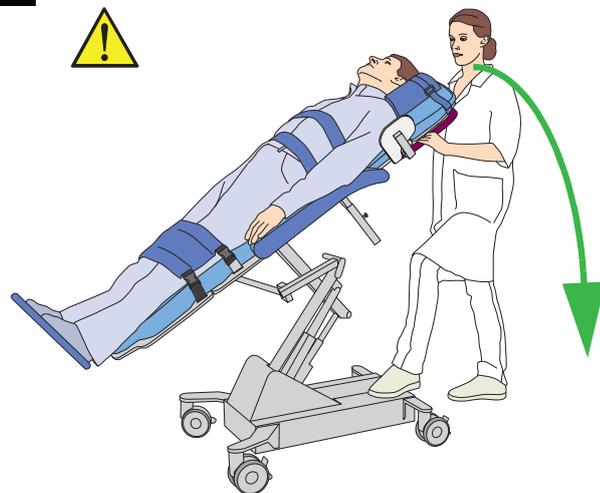

傾斜テーブルを完全に水平な位置まで引き下
げます。サポートのために、シャーシビームに片
足を置いてください。

7




ピープ音が止まるまでストレッチャーを押し下げ
ます。Sara Combilizerは標準モードの水平位置
にロックされます。

8



必要に応じて、ストレッチャー
の高さを調節します。

9

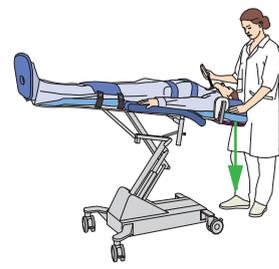

必要に応じて、患者様をトレン
デレンブルグ体位にします。

