



Sara Combilizer






Šipka za zaštitu od prignječenja

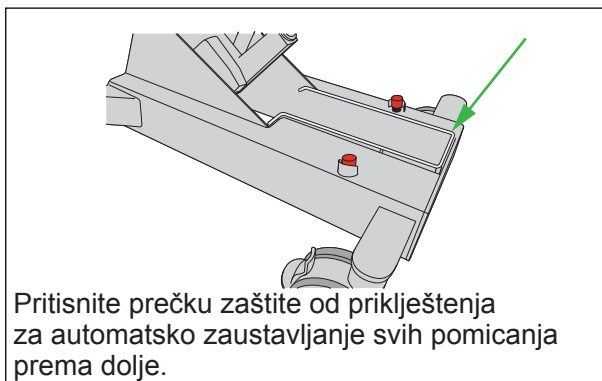


Gumbi za zaustavljanje u hitnom slučaju

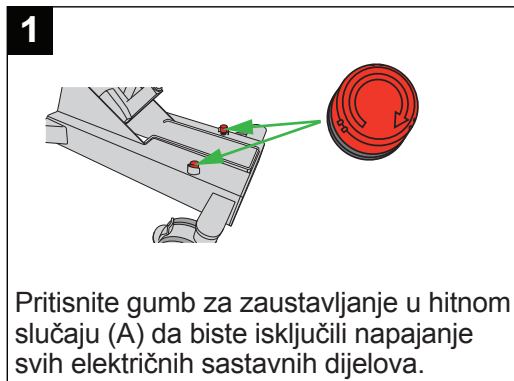

Kućište funkcija u hitnom slučaju

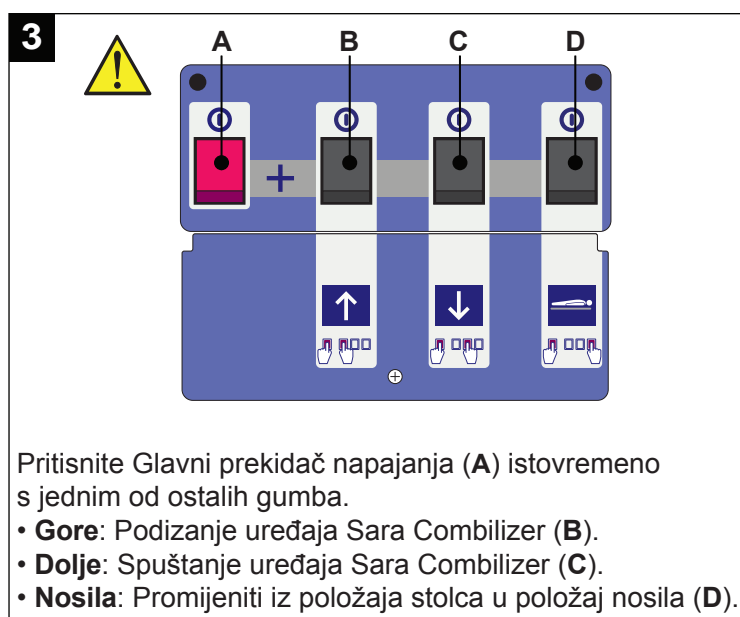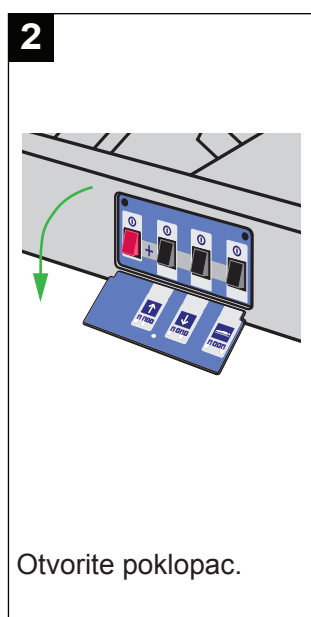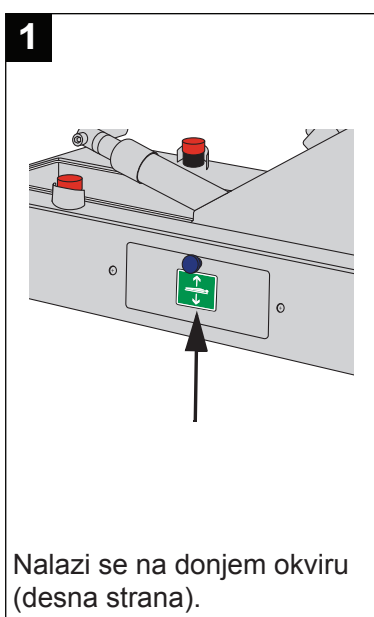

Funkcija za otpuštanje nagibne ploče

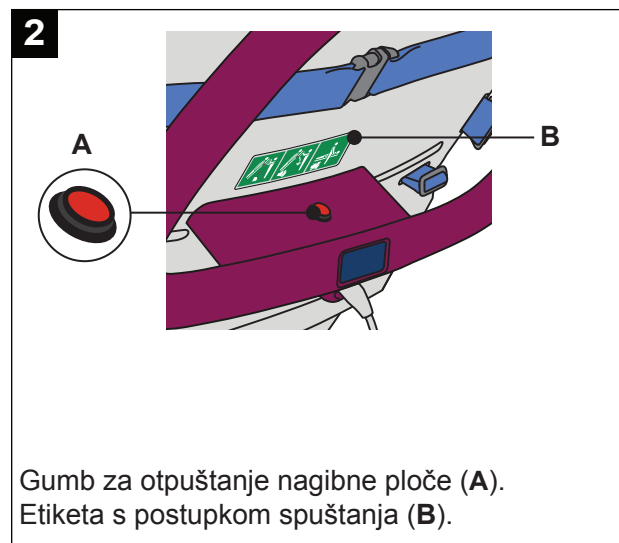


Način upotrebe funkcije za otpuštanje nagibne ploče


1



Zakočite kočnice
na uređaju Sara Combilizer

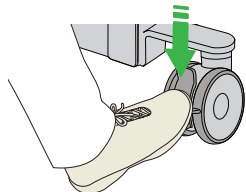


2

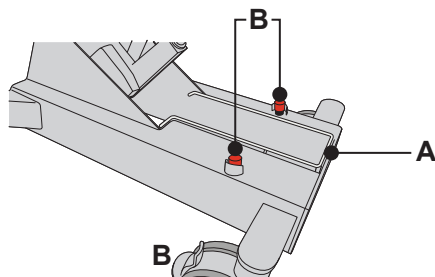


Nemojte aktivirati prečku zaštite
od priklještenja (A) ni gumb za hitne
slučajeve (B).

3

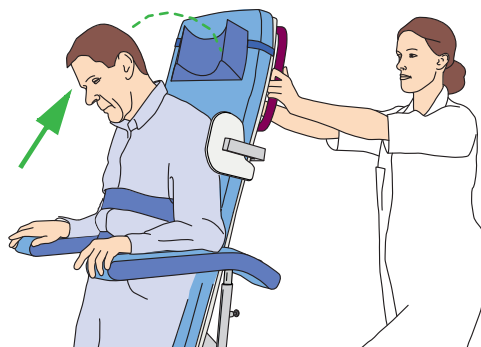


Tijekom cijelog postupak držite pacijen-
tovu glavu na jastuku ili madracu.

4

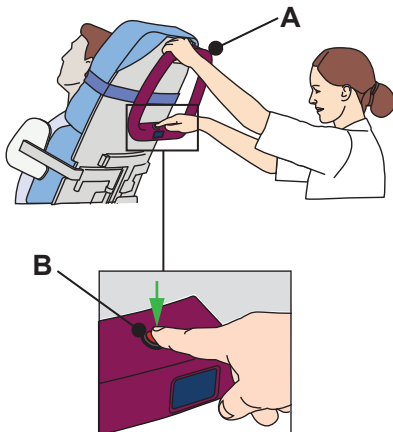


Gurnite transportnu dršku (A).
Pritisnite gumb za otpuštanje
nagibne ploče (B) dok ne čujete
"klik". Oglašava se zvučni signal.

5

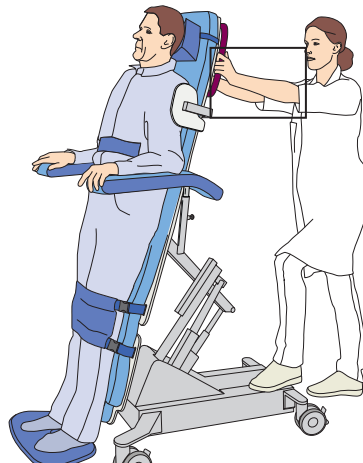


Objе ruke čvrsto postavite
na transportnu dršku. Za bolju
potporu jednu nogu držite
na prečki kućišta.

6

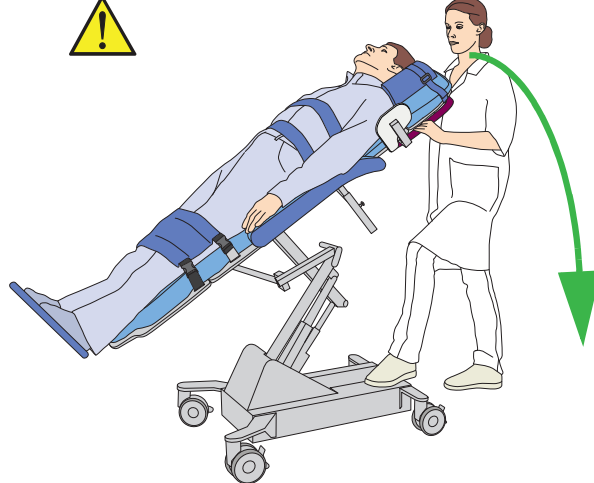


Povucite nagibnu ploču prema dolje do punog
vodoravnog položaja. Za potporu jednu nogu
držite na prečki kućišta.

7

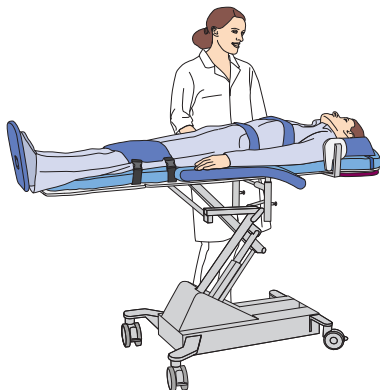


Pritišćite nosila prema dolje dok zvučni signal ne
prestane. Sara Combilizer zaključan je u vodorav-
nom položaju u normalnom načinu rada.

8

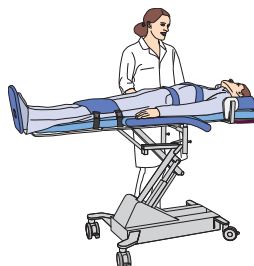

Prema potrebi namjestite
visinu nosila.

9

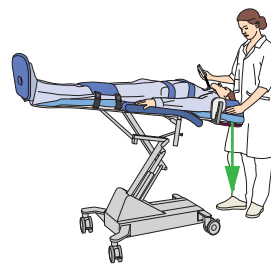

Prema potrebi, pacijenta
postavite u Trendelenburgov
položaj.

