



Sara Combilizer






Klemmschutzstange

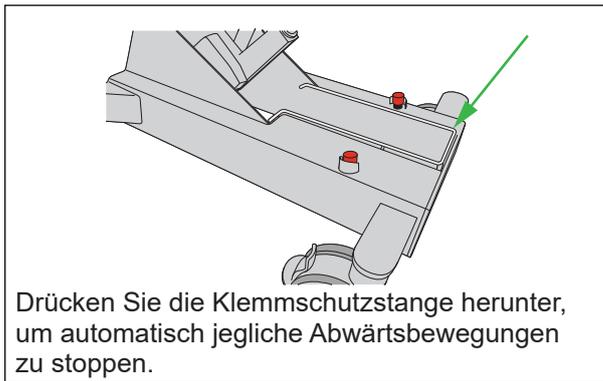


Not-Aus-Schalter

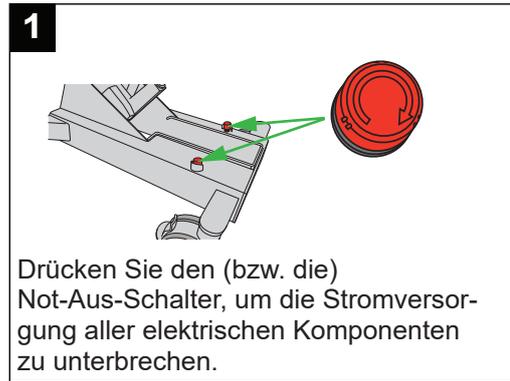

Kasten für Notfallfunktionen

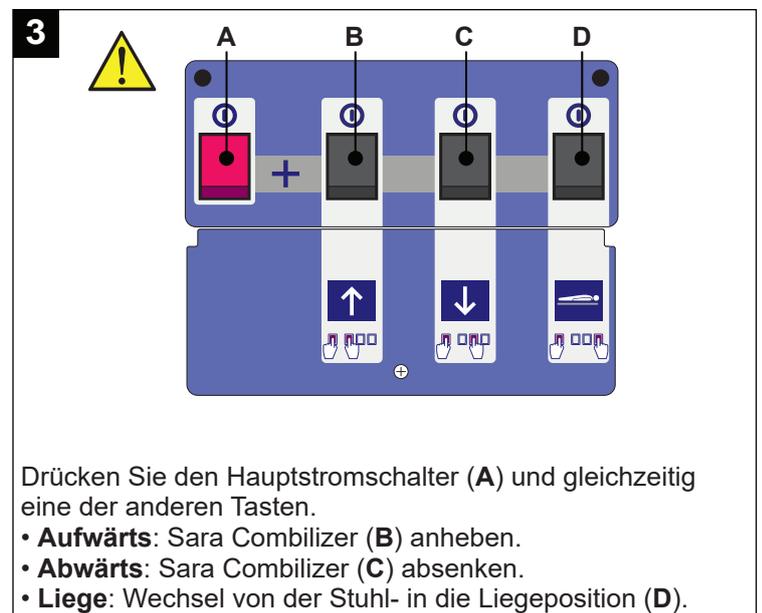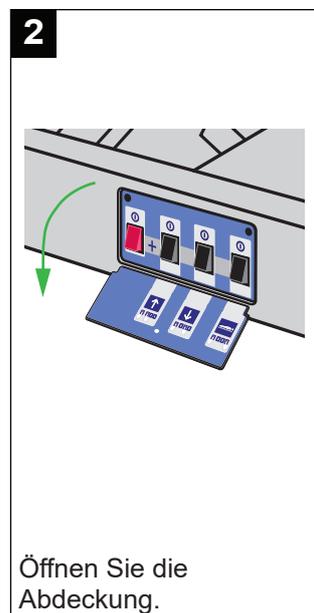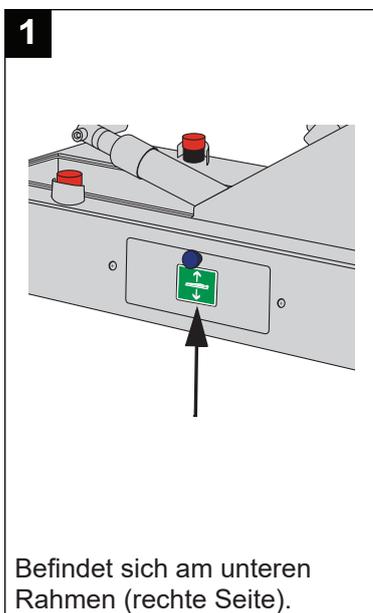

Kipptisch-Auslösefunktion

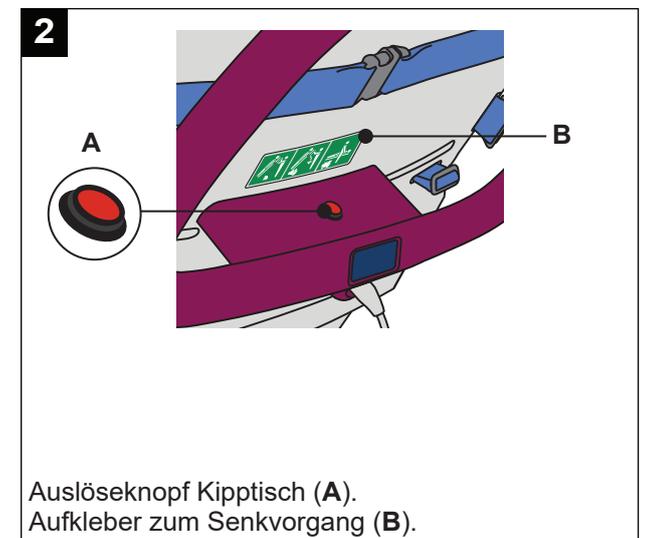


Verwenden der Kipptisch-Auslösefunktion


1



Stellen Sie die Bremsen am Sara Combilizer fest

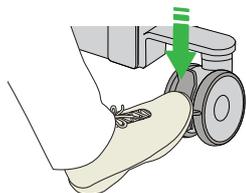

2

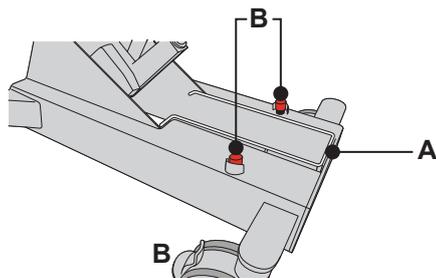


Aktivieren Sie nicht den Klemmschutz (A) oder den Notschalter (B).

3




Sorgen Sie dafür, dass der Kopf des Patienten während des gesamten Vorgangs von einem Kissen oder einer Matratze gestützt bleibt.

4

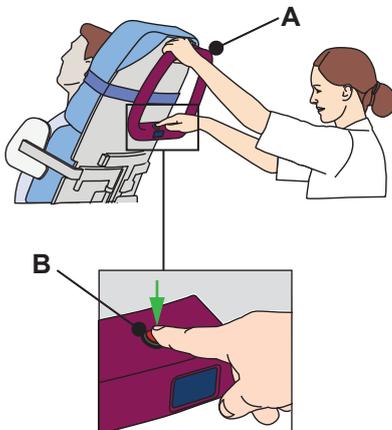


Drücken Sie den Transportgriff (A). Drücken Sie den Kipptisch-Auslöseknopf (B), bis ein Klickgeräusch ertönt. Ein Signalton setzt ein.

5

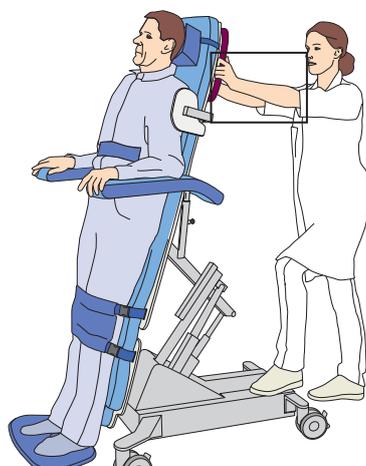

Halten Sie den Transportgriff fest in beiden Händen. Zur besseren Abstützung stellen Sie einen Fuß auf den Querträger des Fahrgestells.

6

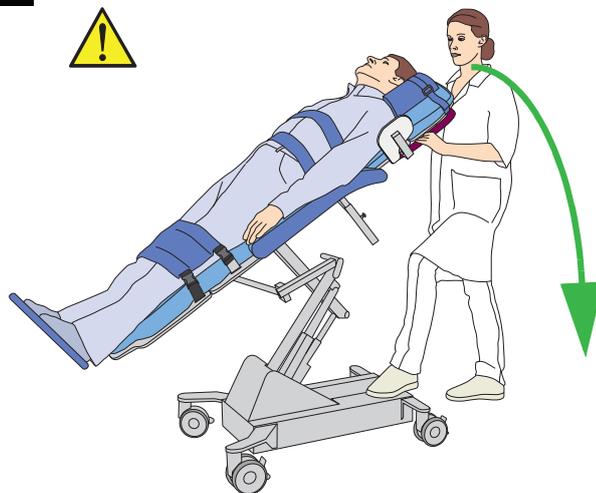

Kipptisch vollständig in die horizontale Position herunterziehen. Stellen Sie zum Abstützen einen Fuß auf den Querträger des Fahrgestells.

7




Drücken Sie die Liege nach unten, bis der Signalton verklingt. Der Sara Combilizer ist in der waagerechten Position verriegelt und befindet sich im Normalmodus.

8



Verstellen Sie bei Bedarf die Höhe der Liege.

9

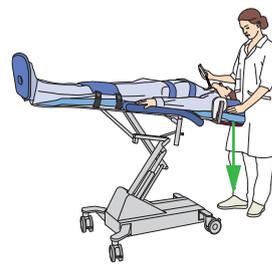

Bringen Sie den Pflegebedürftigen ggf. in die Trendelenburg-Lagerung.

