



Sara Combilizer






Barra de proteção contra entalamento

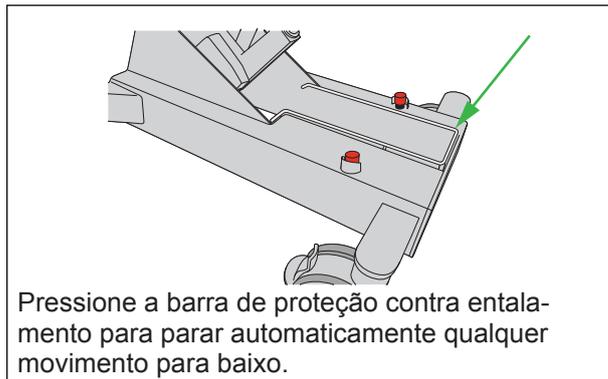



Botões de paragem de emergência

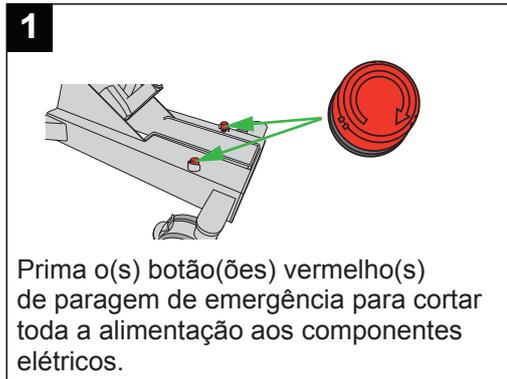

Caixa de funções de emergência

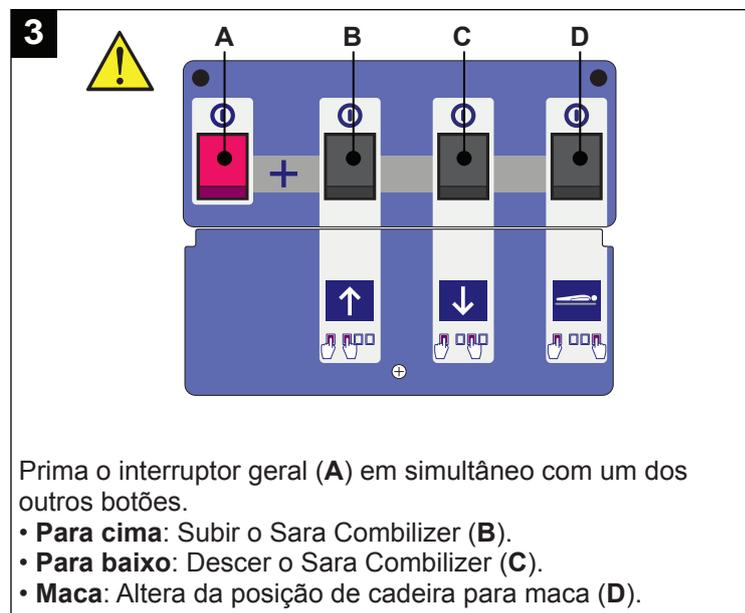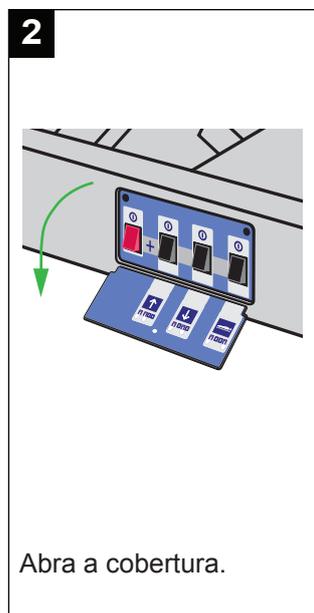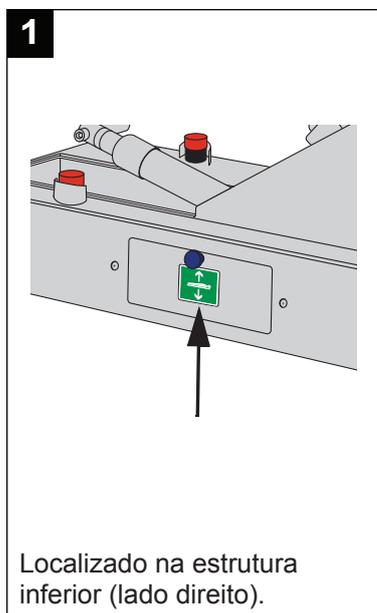

Função de libertação da mesa inclinável

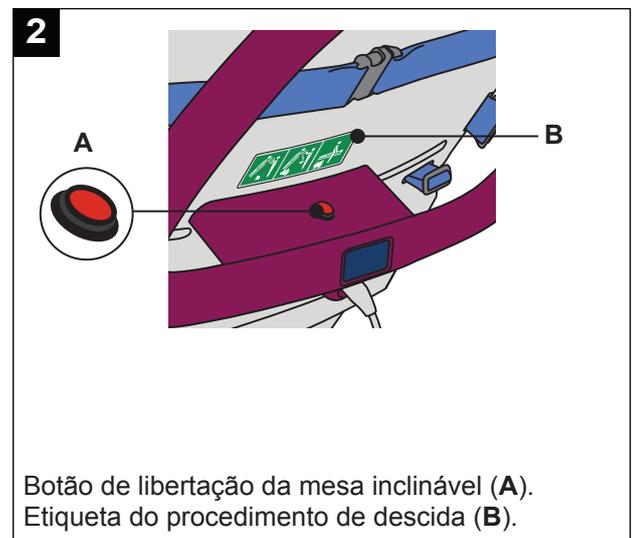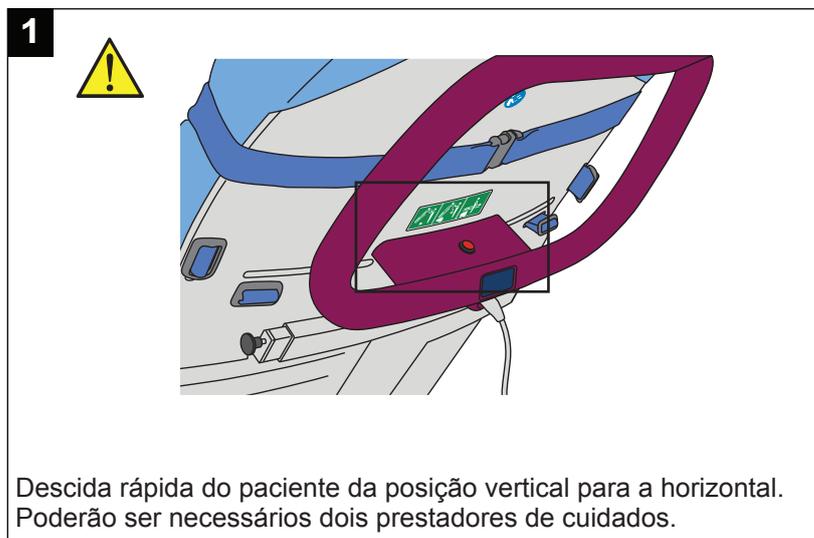


Como utilizar a função de Libertação da mesa inclinável


1



Acionar os travões no Sara Combilizer

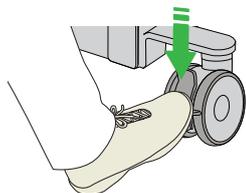

2

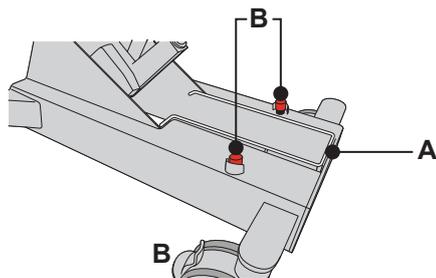


Não ative a barra de proteção contra entalamento (A) ou os botões de emergência (B).

3




Mantenha a cabeça do paciente na almofada ou no colchão durante todo o processo.

4

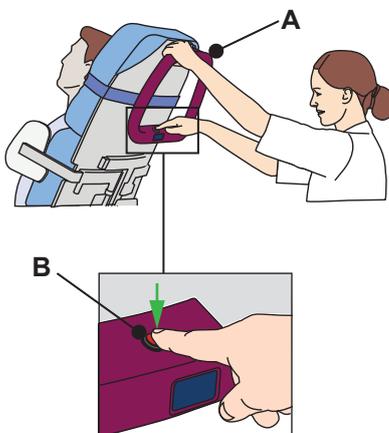


Empurre a pega de transporte (A). Prima o botão de libertação da mesa inclinável (B) até ouvir um "clique". O sinal sonoro inicia.

5

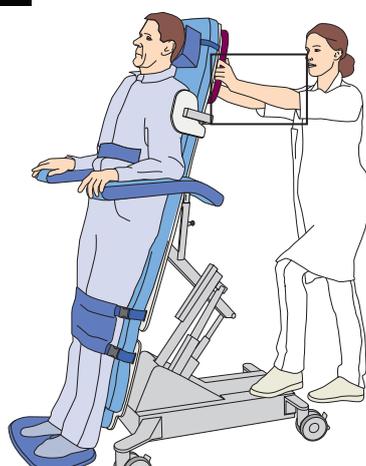

Coloque ambas as mãos firmemente na pega de transporte. Para um melhor apoio, mantenha um pé na viga do chassis.

6

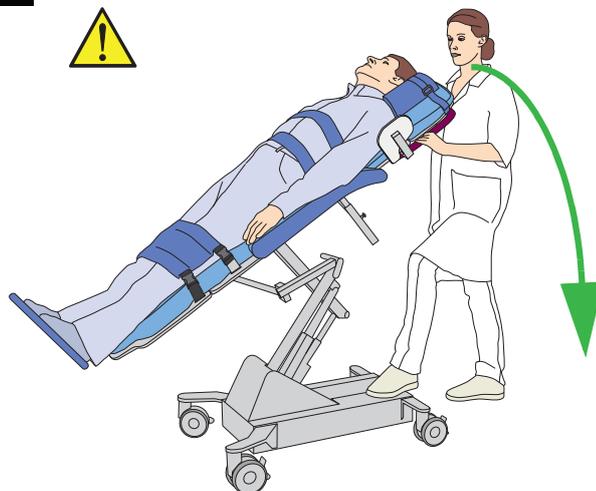

Puxe a mesa inclinável para baixo para a posição horizontal total. Para obter apoio, mantenha um pé na viga do chassis.

7




Pressione a maca para baixo até o sinal sonoro parar. O Sara Combilizer está bloqueado na posição horizontal no Modo normal.

8



Se necessário, ajuste a altura da maca.

9

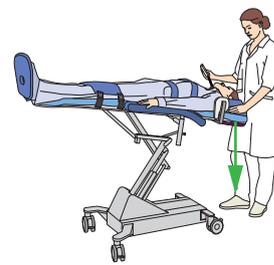

Se necessário, coloque o paciente na posição Trendelenburg.

