



Sara Combilizer






Bară de protecție împotriva prinderii

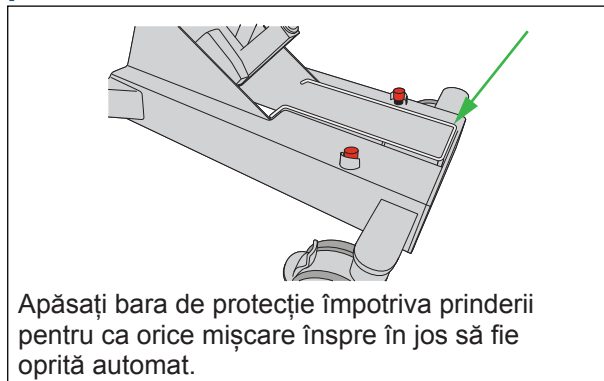



Butoanele de oprire de urgență

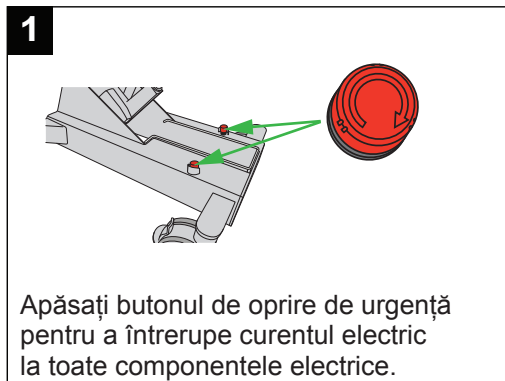

Cutie cu funcții de urgență

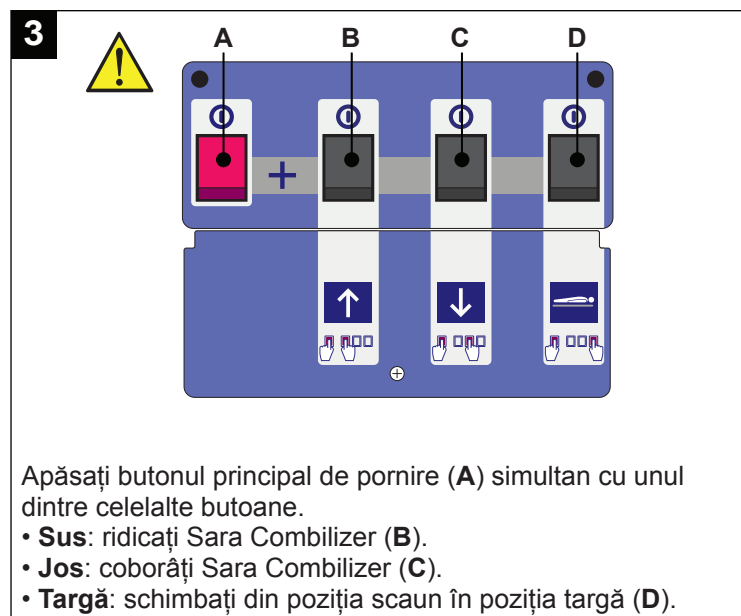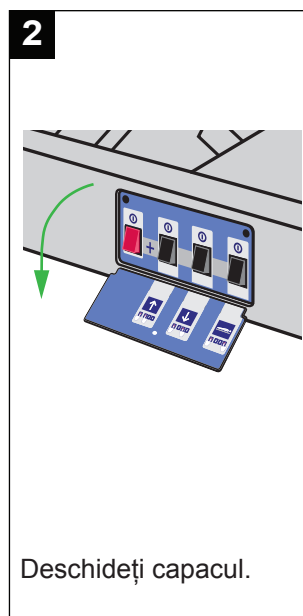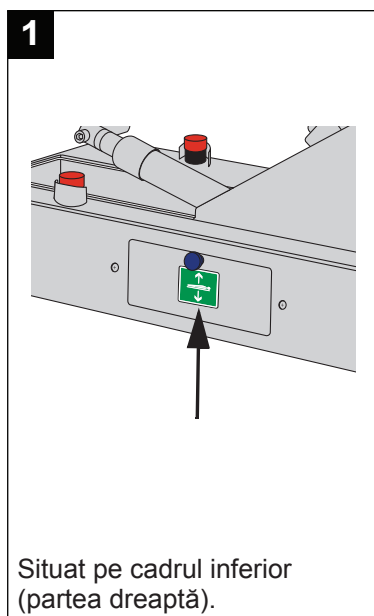

Funcția de deblocare a tăbliei rabatabile

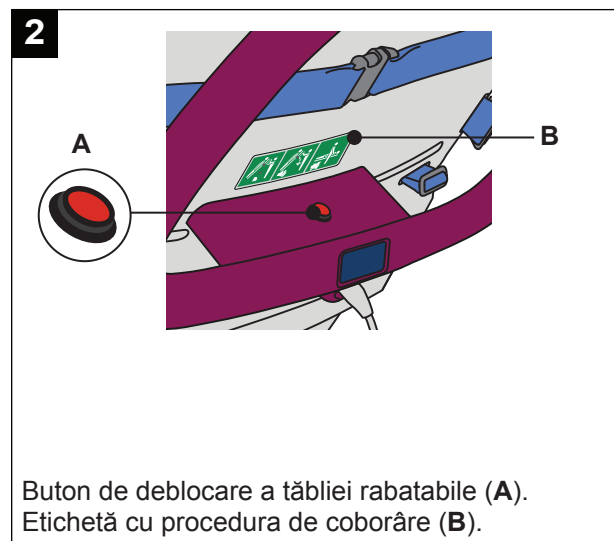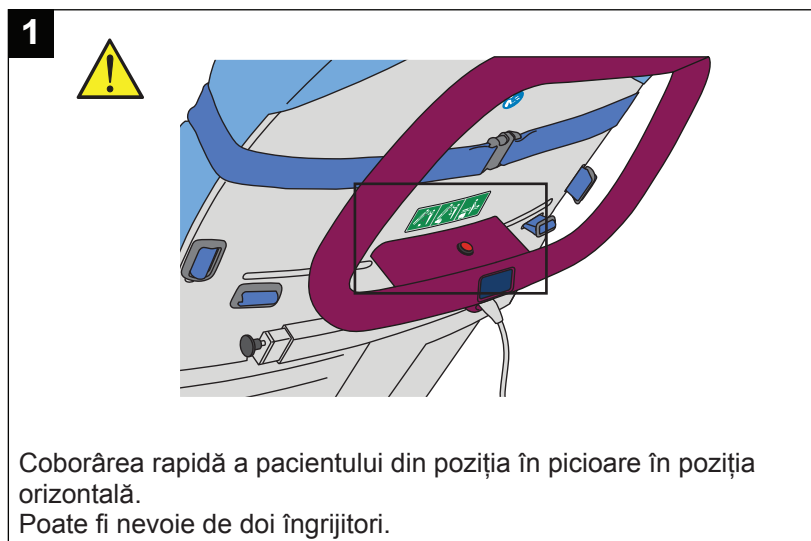


Modul de utilizare a funcției de deblocare a tăbliei rabatabile


1



Acționați frânele pentru
Sara Combilizer

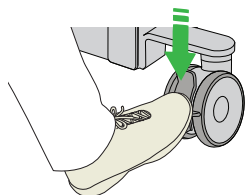

2

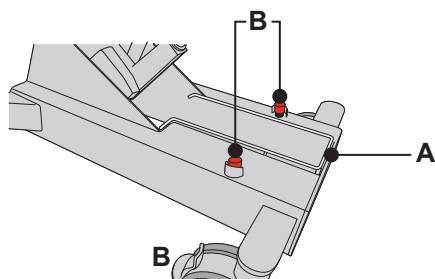


Nu activați bara de protecție împotriva
prinderii (A) sau butoanele de urgență (B).

3




Capul pacientului trebuie să stea
pe o pernă sau pe o saltea pe parcursul
întregii proceduri.

4

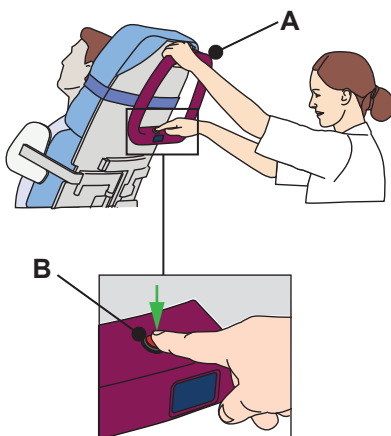


Apăsați mânerul de transport (A).
Apăsați butonul de deblocare
a tăbliei rabatabile (B) până
când se aude un declic.
Se va auzi un semnal sonor.

5

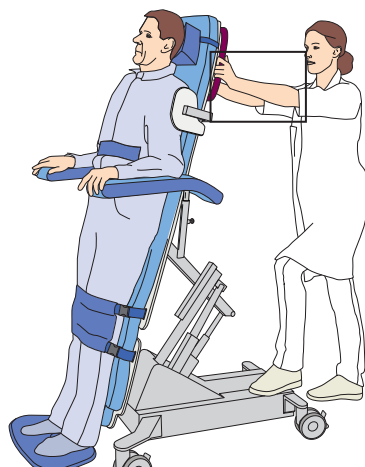

Poziționați ambele mâini în mod
ferm pe mânerul de transport.
Pentru o susținere mai bună,
puneți un picior pe bara șasiului.

6

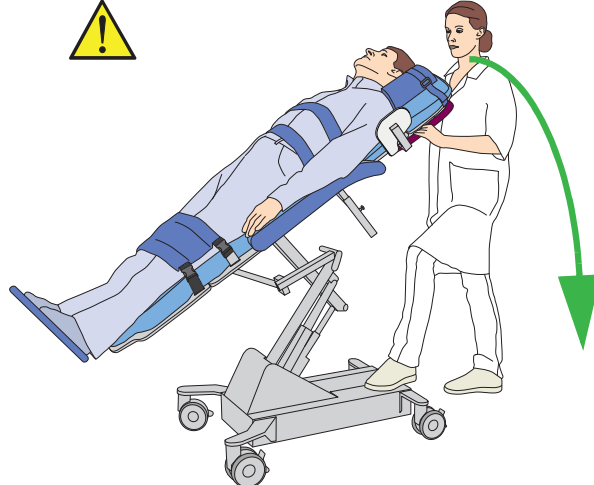

Trageți în jos tăblia rabatabilă până când ajunge
în poziție orizontală. Pentru susținere, țineți
un picior pe bara șasiului.

7



Împingeți targa în jos până când semnalul sonor
se oprește. Sara Combilizer este blocat în poziția
orizontală în modul Normal.

8



Dacă este necesar, ajustați
înălțimea tărgii.

9



Dacă este necesar, așezați
pacientul în poziția
Trendelenburg.

