



# Sara Combilizer






## ราวป้องกันการหนีบ

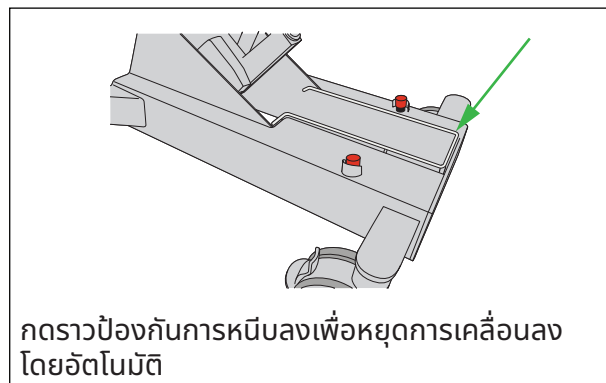



## ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

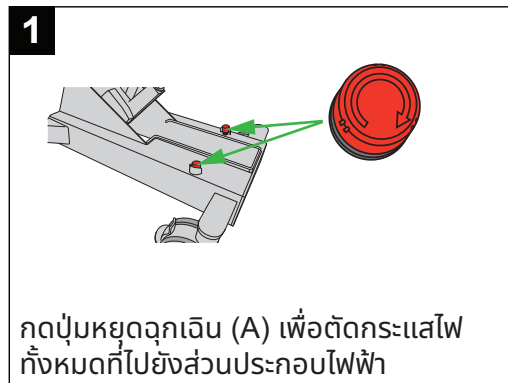

## กล่องการทำงานฉุกเฉิน

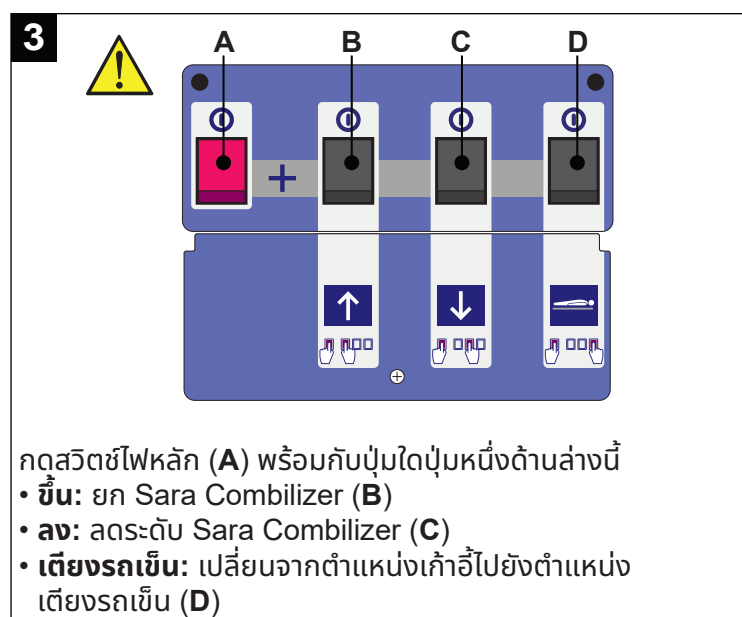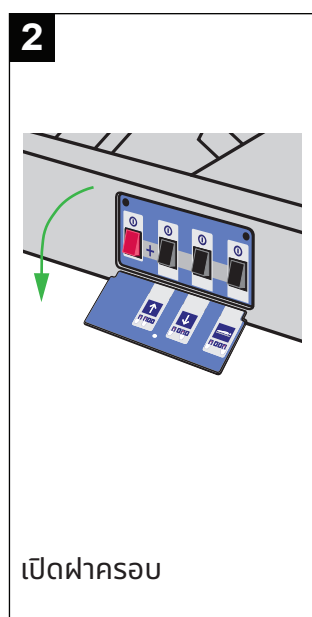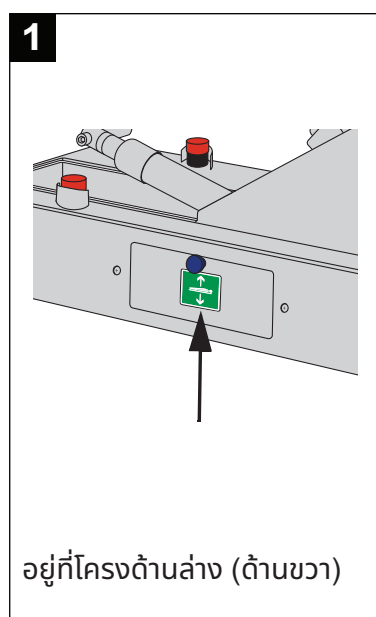

## ฟังก์ชันปล่อยโต๊ะหมุนตั้งตรง

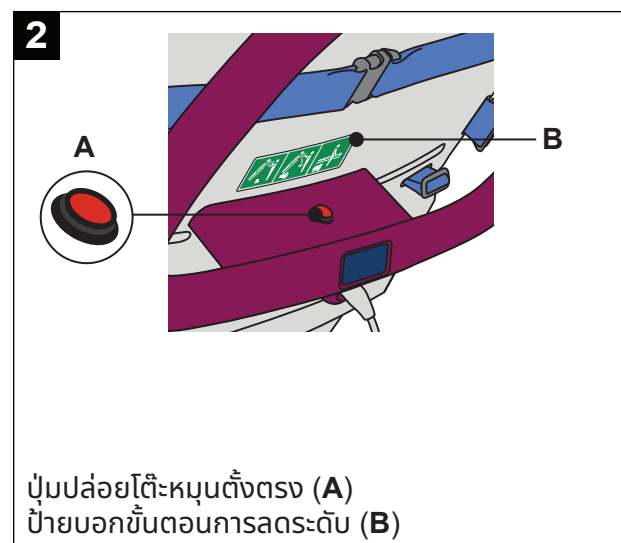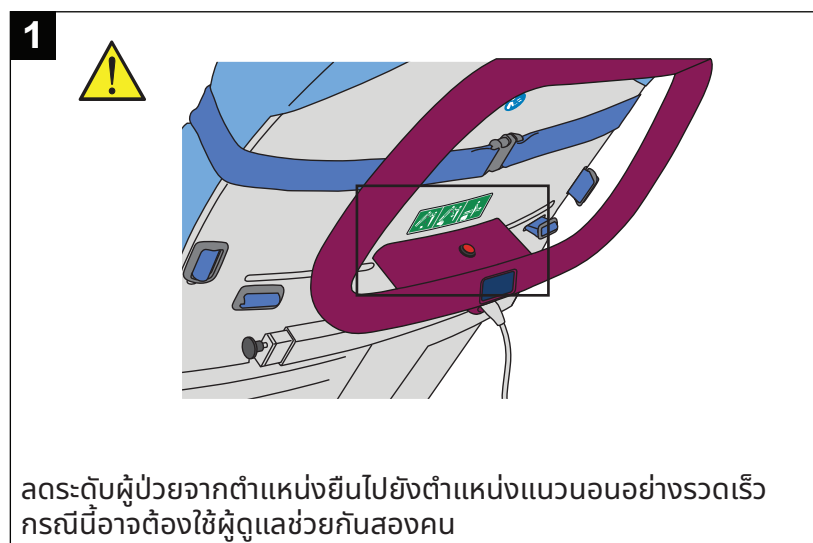


# วิธีใช้ฟังก์ชันปล่อยโต๊ะหมุนตั้งตรง


1



กดเบรคบน  
Sara Combilizer

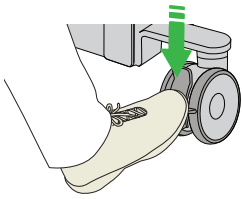


2

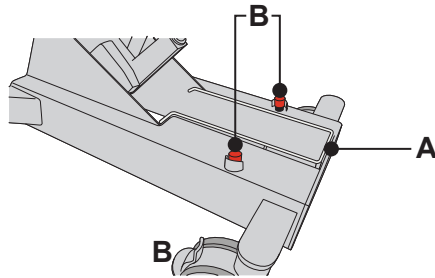


อย่าเปิดใช้งานราวป้องกันการหนีบ (A) หรือ  
ปุ่มฉุกเฉิน (B)

3

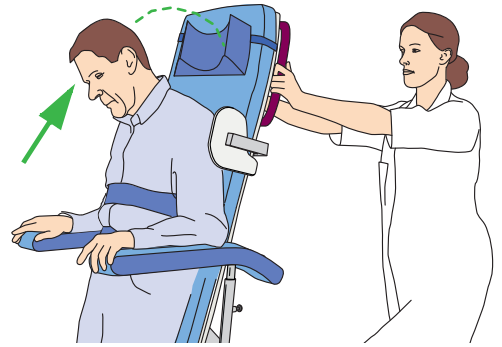


ให้ศีรษะของผู้ป่วยวางอยู่บนหมอนรองศีรษะ  
หรือเบาะระหว่างกระบวนการทั้งหมด

4

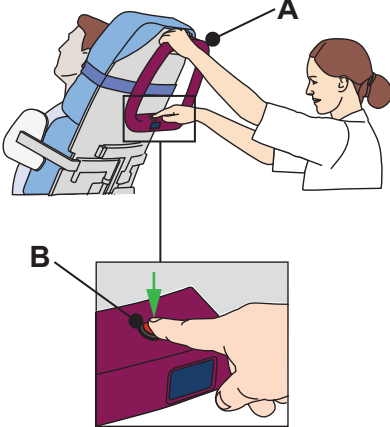


ดันที่จับสำหรับการเคลื่อนย้าย (A)  
กดปุ่มปล่อยโต๊ะหมุนตั้งตรง (B)  
จนกว่าจะได้ยินเสียง "คลิก"  
เสียงบี๊ปจะดังขึ้น

5

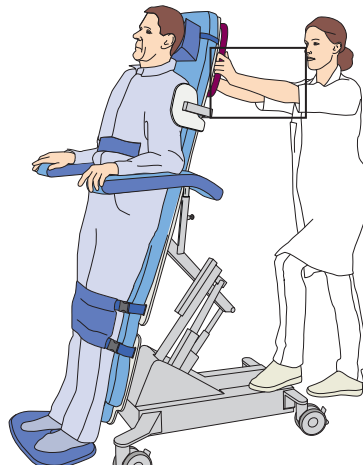

วางมือทั้งสองข้างอย่างมั่นคง  
บนที่จับสำหรับการเคลื่อนย้าย  
เพื่อให้รองรับได้ดีขึ้น วางเท้า  
ข้างหนึ่งบนคานรับน้ำหนักโครง

6

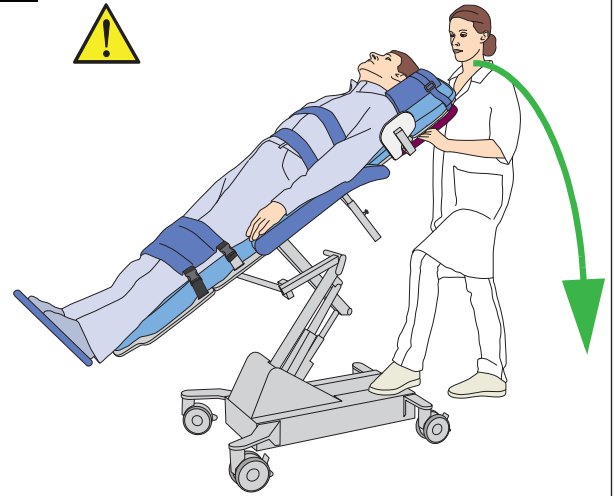


ดึงโต๊ะหมุนตั้งตรงลงจนถึงตำแหน่งแนวนอน วางเท้า  
ข้างหนึ่งบนคานรับน้ำหนักโครงเพื่อช่วยในการรองรับ

7




กดเตียงรถเข็นลงจนเสียงบี๊ปหยุด ซึ่งหมายความว่า  
Sara Combilizer ล็อคในตำแหน่งแนวนอน  
ในโหมดปกติแล้ว

8

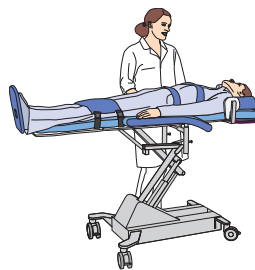

หากจำเป็น ปรับความสูง  
ของเตียงรถเข็น

9

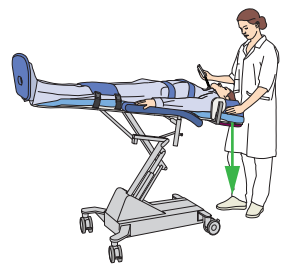

หากจำเป็น ให้ผู้ป่วยนอนในท่า  
Trendelenburg



ArjoHuntleigh AB  
Hans Michelsengatan 10  
211 20 Malmö, Sweden  
www.arjo.com