



Utløser for HLR-ryggstøtte

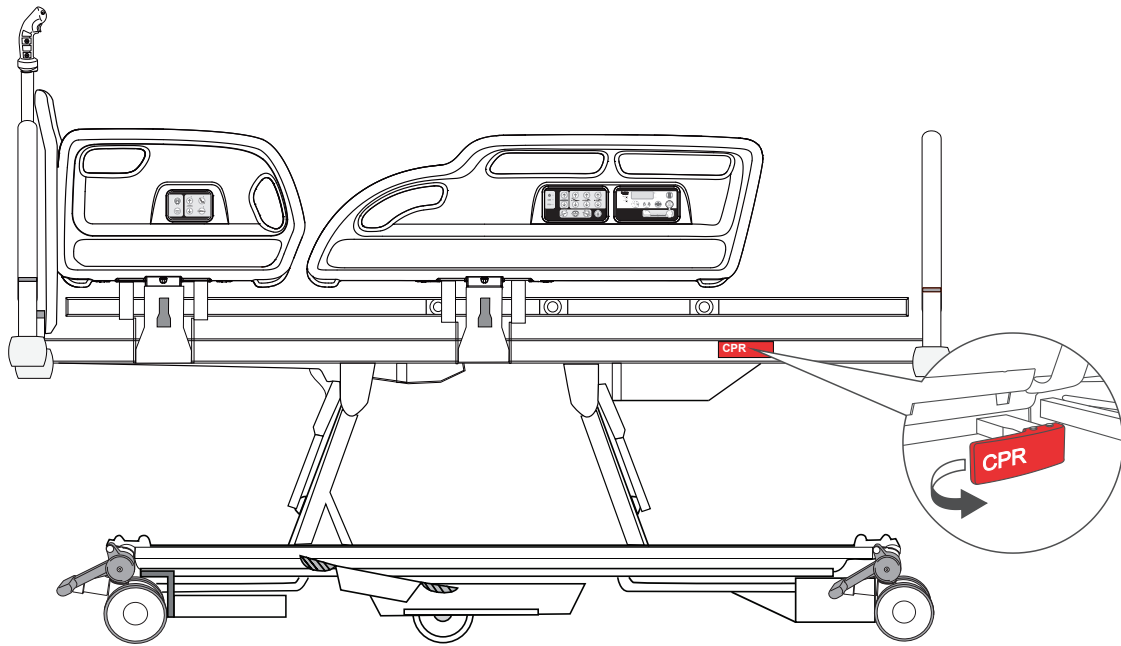


Trekk i det røde HLR-håndtaket på siden av sengen for å senke ryggstøtten raskt.

Bremser og styring

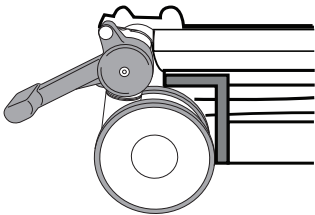


Brems

Bremsene er aktivert på alle fire hjul.

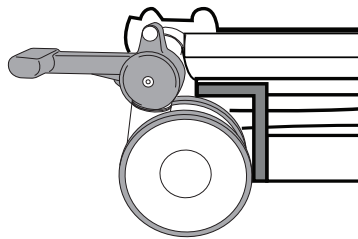

Fri

Alle fire hjul kan fritt roteres og dreies.

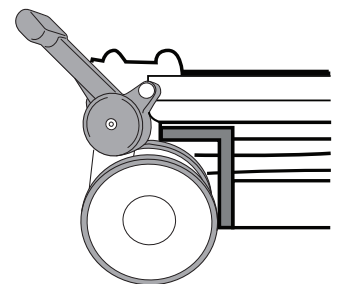

Styring


Alle de fire hjulene kan rotere, men styrehjulet kan ikke dreies.

Bremsene skal være aktivert til enhver tid når sengen skal stå stille.

Sidegrinder



Kontroller at låsemekanismen er helt innkoblet når sengehestene er hevet.

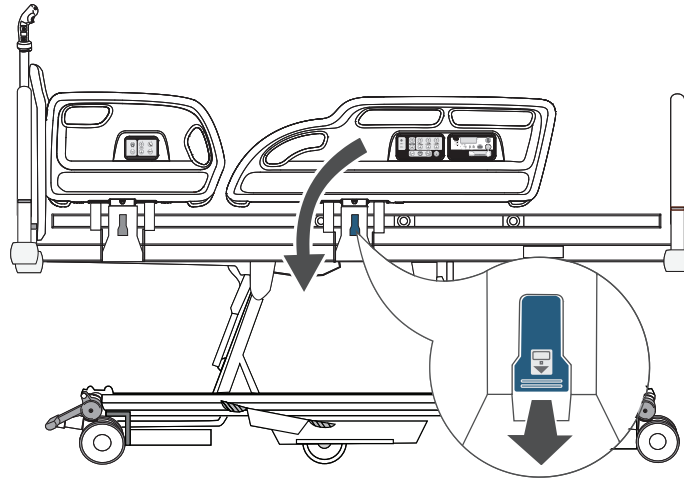


Trekk i den blå utløserarmen for å senke sengehesten.

Sengehesten heves ved å holde i sengehesten og trekke den oppover og bort fra sengen til den låses i hevet posisjon.


Justering av sengelengde (tre innstilte posisjoner)

1

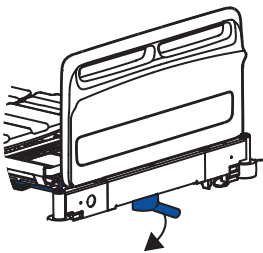


Trekk i det blå låsehåndtaket for forlengeren.

2

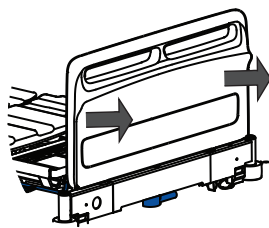


Trekk ut sengerammen til ønsket posisjon og slipp håndtaket.

3

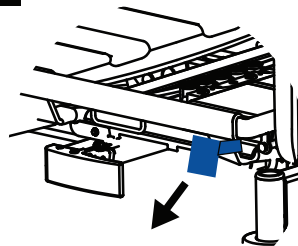

Trekk i det blå forlengerhåndtaket.


4

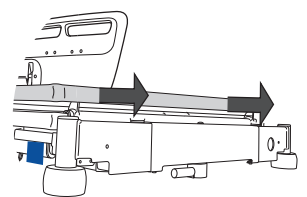

Trekk sengebunnen ut til ønsket posisjon.


Regulering av sengebredde

1

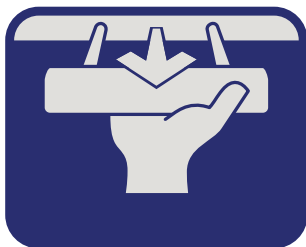

Finn låsehakene for forlengeren, bak utfellingssymbolet (fire på hver side).

2

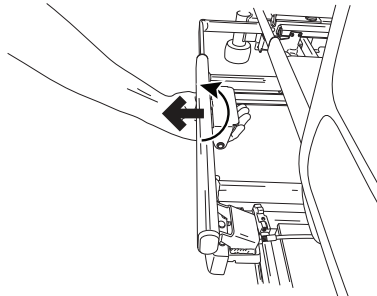

Klem sammen låsehakene for å løsne, og trekk delen helt ut.

3

Husk å gjenta for alle låsehakene for forlengeren.

