



CPR sırt desteği bırakma kolu

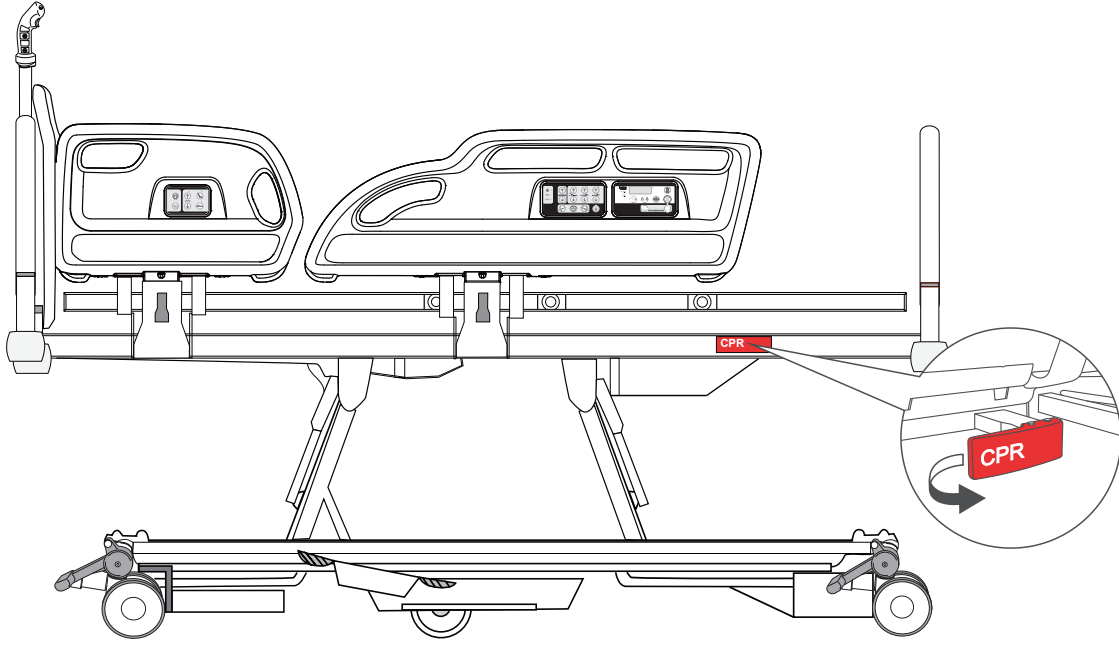


Yatağın iki yanındaki kırmızı CPR kollarını çekerek sırt desteğini hızlıca indirin.

Frenler ve yönlendirme

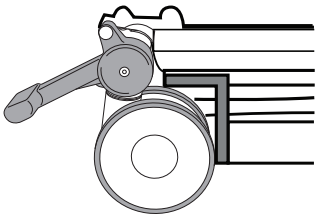


Fren

Dört tekerleğin tamamının frenleri uygulanmış.

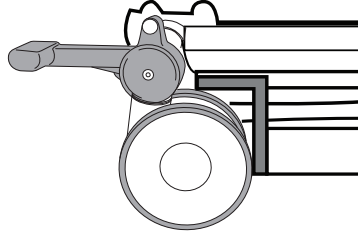

Serbest

Dört tekerleğin tamamı da serbest şekilde dönüyor.

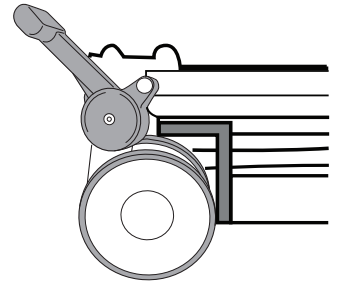

Yönlendirme


Dört tekerleğin tamamı dönebilirken yönlendirme tekerleği dönmüyor.

Yatak sabitken frenler daima uygulanmış olmalıdır.

Kenar korkulukları



Kenar korkulukları yükseltildiğinde kilitleme mekanizmasının emniyetli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.

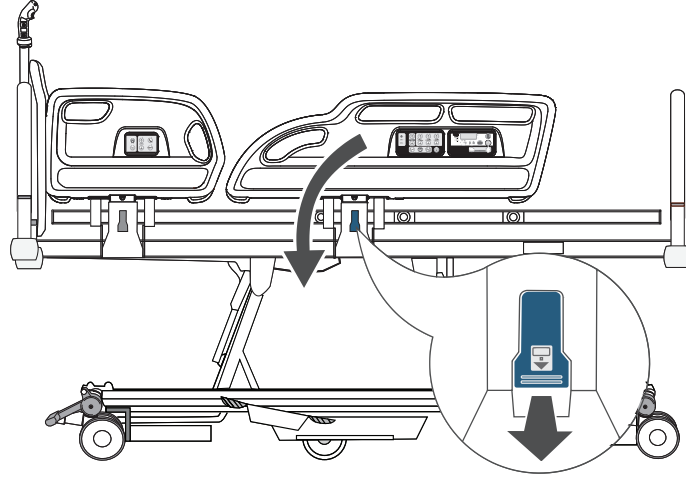


Mavi serbest bırakma kolunu çekerek kenar korkuluğunu indirin.

Kenar korkuluğunu kaldırmak için korkuluğun kolunu tutun ve kenar korkuluğunu kaldırılmış konumda kilitlenene kadar yukarı ve yatağın dışına doğru çekin.


Yatak boyunu ayarlama (üç ayar konumu)

1

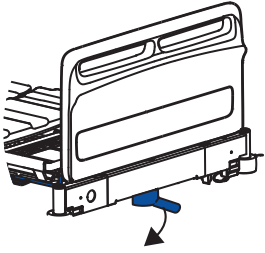


Mavi uzatma kilitleme kolunu çekin.

2

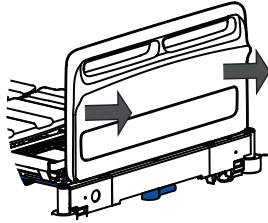


Yatak profilini, istenen pozisyona göre çekin ve kolu bırakın.

3

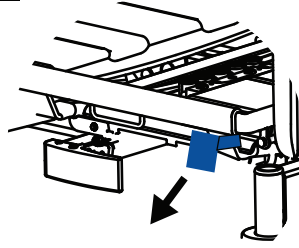

Mavi uzatma kolunu çekin.

4

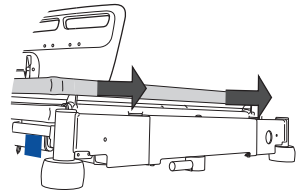

Platformu gereken pozisyona çekin.


Yatak genişliği ayarı

1



Uzatma sembolünün arkasında bulunan uzatma mandallarının yerini belirleyin (her tarafa dört adet).

2

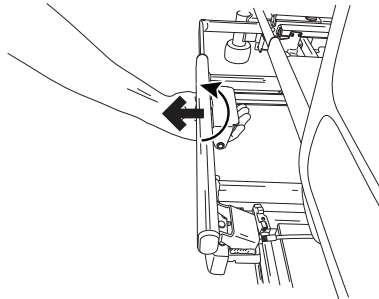

Açmak için uzatma mandalını sıkın ve tamamen uzayana kadar çekin.

3

Bu adımı, uzatma mandallarının tümü için tekrarlayın.

