



## Uvoľnenie páky chrbtovej opierky pre CPR

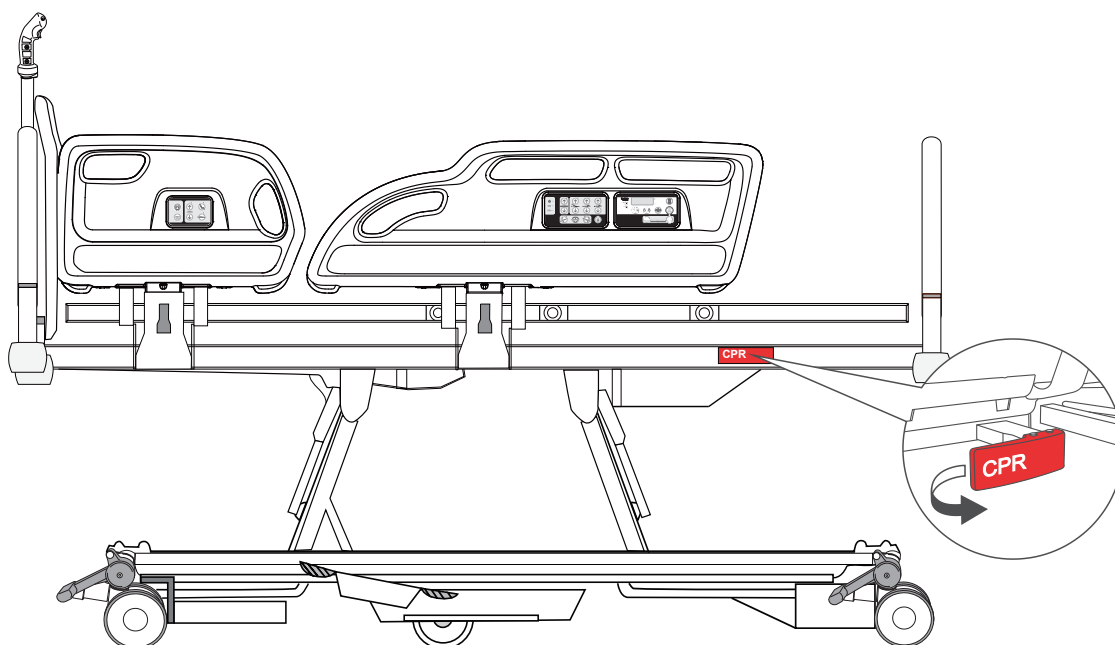


Na rýchle spustenie chrbtovej opierky potiahnite červenú CPR rukoväť, ktorá sa nachádza na oboch stranách lôžka.

## Brzdy a riadenie

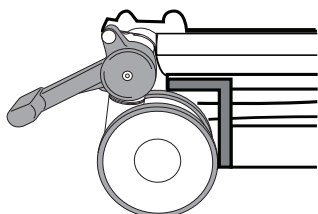


### Brzda

Všetky štyri kolieska sú zabrzdené.

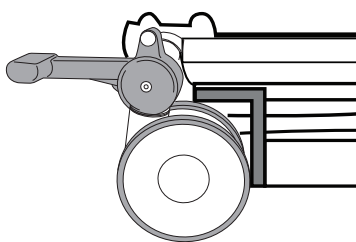

### Voľné

Všetky štyri kolieska môžu voľne rotovať a otáčať sa.

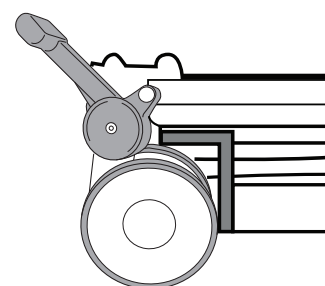

### Riadenie


Všetky štyri kolieska môžu rotovať, riadiace koliesko sa nemôže otáčať.

Brzdy musia byť použité vždy, keď je lôžko stacionárne.

## Postrannice



Keď sa postrannice zdvihnú, uistite sa, že poistný mechanizmus je bezpečne zaistený.

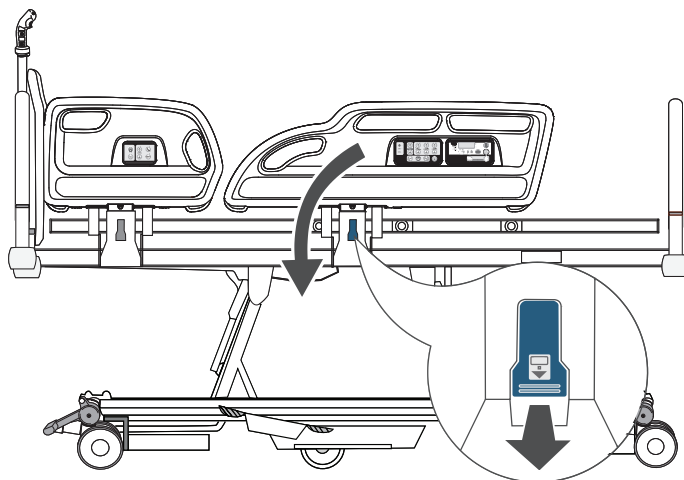


Na spustenie postrannice potiahnite modrú uvoľňovaciu páku.

Na zdvihnutie postrannice uchopte rukoväť postrannice a potiahnite ju nahor smerom od lôžka, kým sa nezaistí vo zdvihnutej polohe.


## Nastavenie dĺžky lôžka (tri dostupné polohy)

1

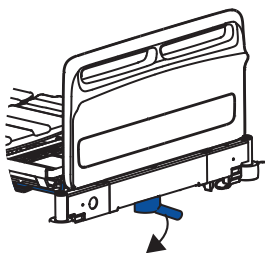


Potiahnite modrú zaistovaciu rukoväť predĺženia.

2

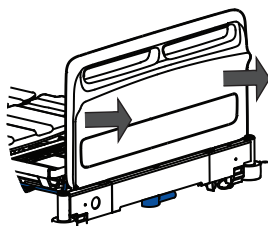


Vytiahnite rám lôžka do požadovanej polohy a pustite rukoväť.

3

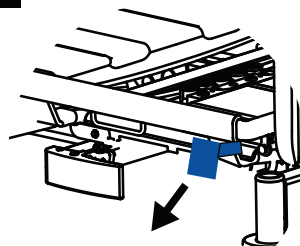

Potiahnite modrú rukoväť predĺženia.


4

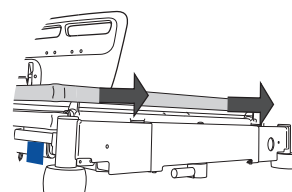

Ložnú plochu vytiahnite do požadovanej polohy.


## Nastavenie šírky lôžka

1

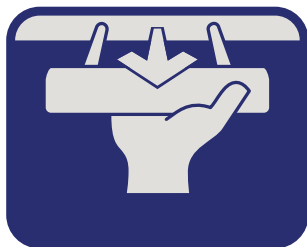

Nájdite západky predĺženia umiestnené za symbolom predĺženia (štyri na každej strane).

2

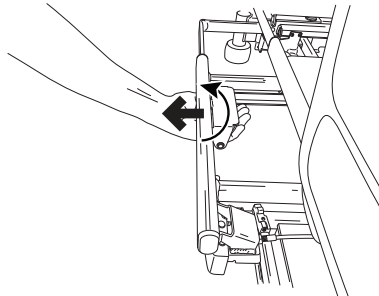

Stlačením západky predĺženia odistíte a ťahajte sekciu, kým sa úplne nevysunie.

3

Uistite sa, že postup zopakujete pre všetky západky predĺženia.

