



## Opuszczanie segmentu oparcia pleców do funkcji CPR

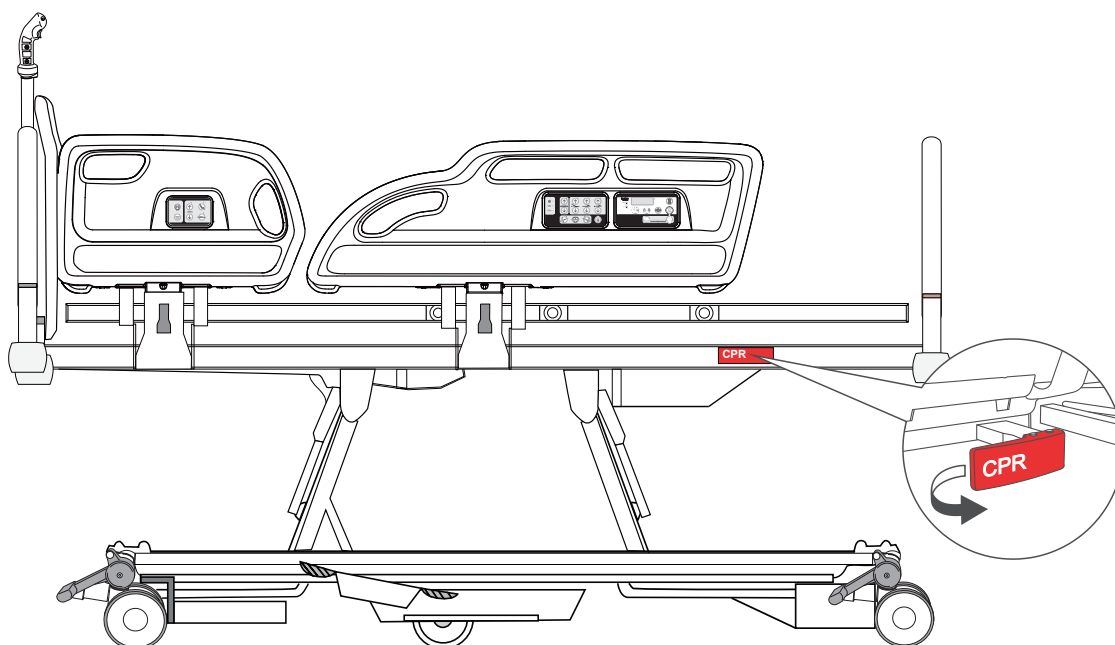


Pociągnąć czerwoną dźwignię CPR umieszczoną po obu stronach łóżka, aby szybko obniżyć oparcie pleców.

## Hamulce i sterowanie

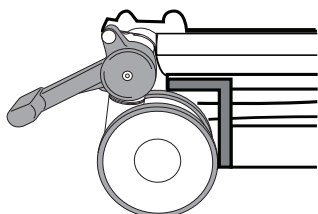


### Hamulec

Hamulce założone na wszystkich czterech kółkach.

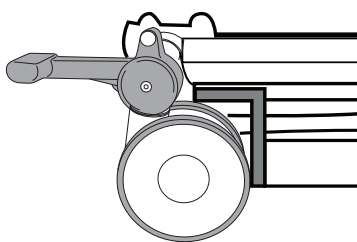

### Ruch swobodny

Wszystkie cztery kółka obracają się swobodnie.

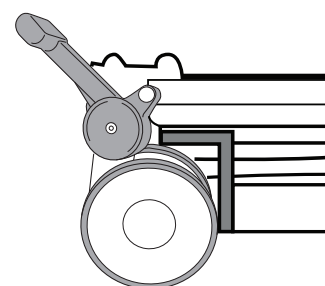

### Sterowanie


Wszystkie cztery kółka obracają się, ale kółko sterujące jest zablokowane.

Hamulce powinny być założone zawsze, kiedy łóżko stoi w miejscu.

## Barierki boczne



Upewnić się, że przy podniesionych barierkach bocznych włączony jest również mechanizm blokujący.

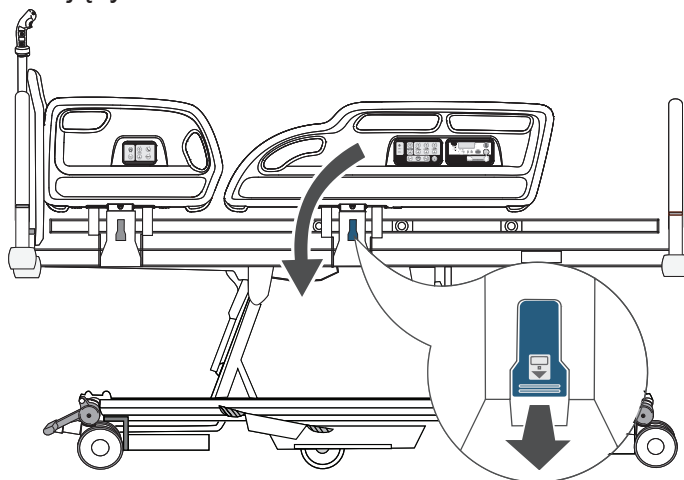


Pociągnąć niebieską dźwignię, aby opuścić boczną barierkę.

Aby podnieść boczną barierkę, chwycić ją i pociągnąć do góry, na zewnątrz od łóżka, aż się zablokuje w pozycji podniesionej.


## Regulacja długości łóżka (trzy nastawy)

1

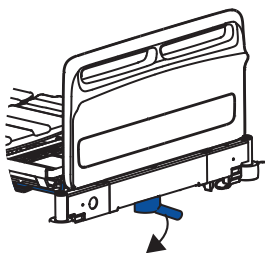


Pociągnąć za niebieską dźwignię blokującą przedłużenie.

2

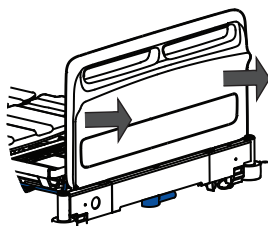


Wyciągnąć ramę łóżka do żądanej pozycji i zwolnić dźwignię.

3

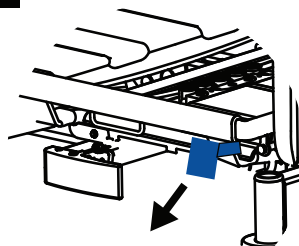

Pociągnąć za niebieską dźwignię przedłużenia.


4

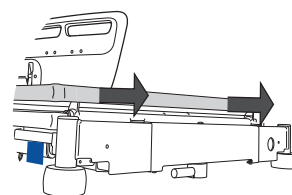

Wyciągnąć leże do żądanej pozycji.


## Regulacja szerokości łóżka

1

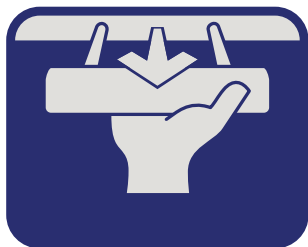

Znaleźć zatrzaski do rozszerzania znajdujące się za symbolem rozszerzania (cztery po każdej stronie).

2

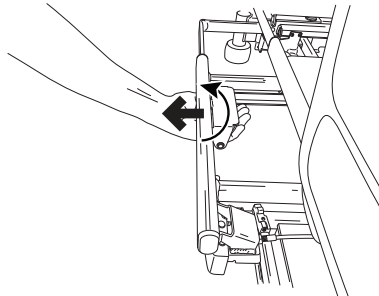

Ścisnąć zatrzaski, żeby odblokować i pociągnąć segment rozszerzania do oporu.

3

Powtórzyć dla wszystkich zatrzasków.

