

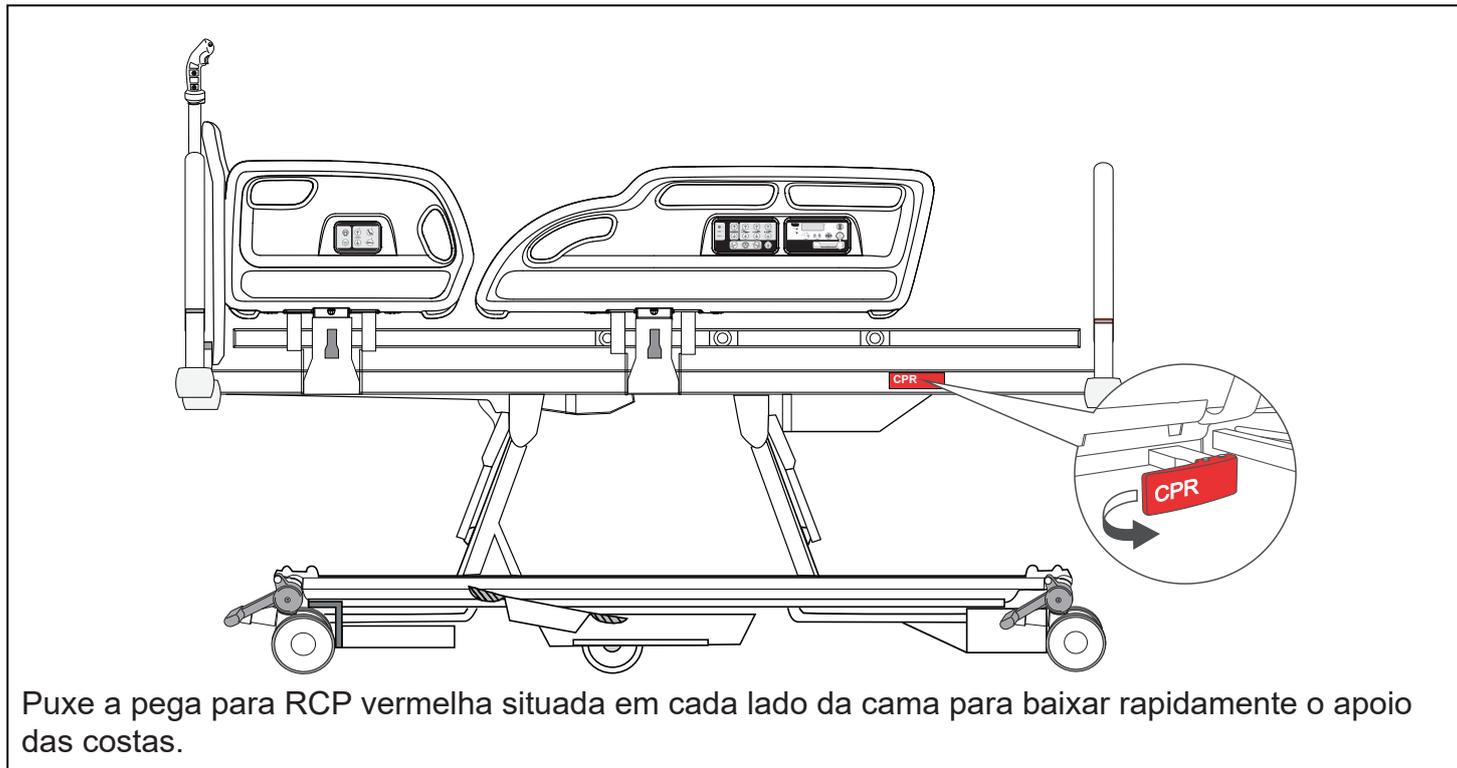


Desengate do apoio das costas para RCP

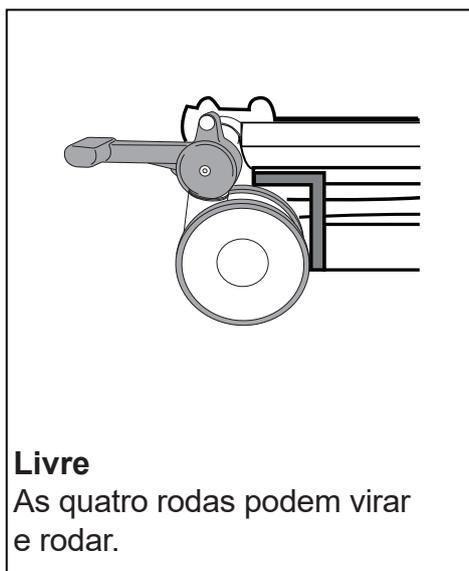

Travões e direção

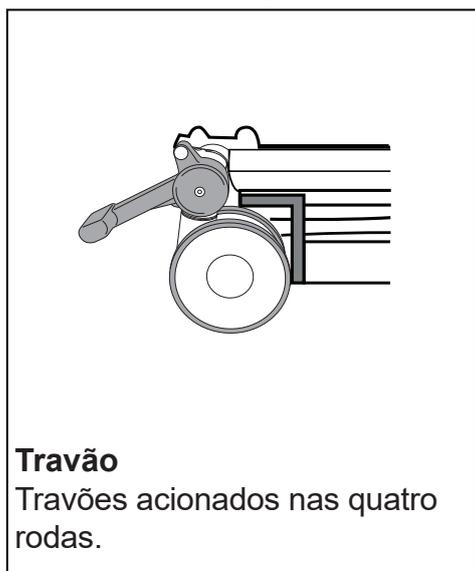


Os travões devem ser sempre acionados quando a cama estiver estacionária.

Grades de segurança



Certifique-se de que o mecanismo de travamento está devidamente trancado quando as grades de segurança estão subidas.

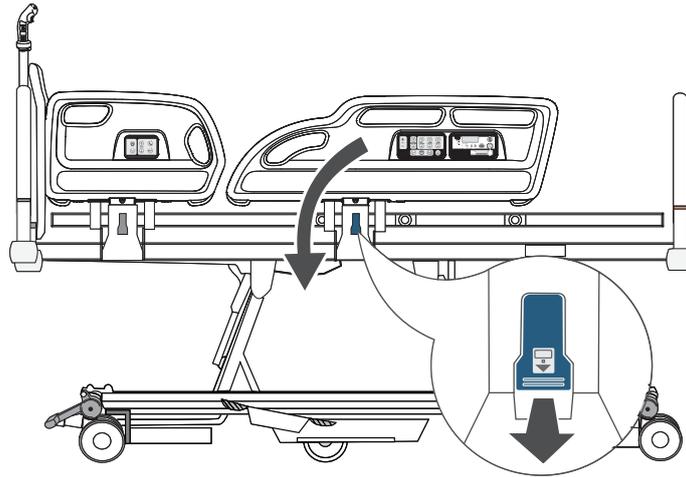


Puxe a alavanca de libertação azul para baixar a grade de segurança.

Para levantar a grade de segurança, puxe-a para cima segurando o manípulo e afastando-a da cama, até trancar na posição subida.


Ajuste do comprimento da cama (três posições definidas)

1

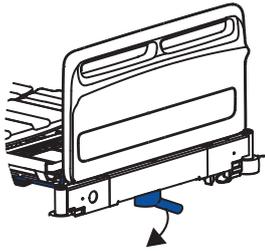


Puxe o manípulo azul de travão da extensão.

2

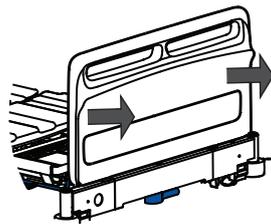


Puxe a estrutura de cama para a posição desejada e solte o manípulo.

3

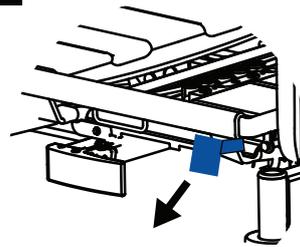

Puxe o manípulo de extensão azul.

4

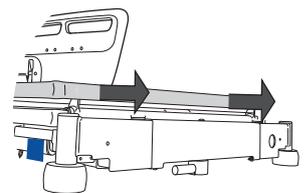

Puxe a plataforma para fora para a posição pretendida.


Ajuste da largura da cama

1



Localize os trincos de extensão, situados por trás do símbolo de extensão (quatro por lado).

2

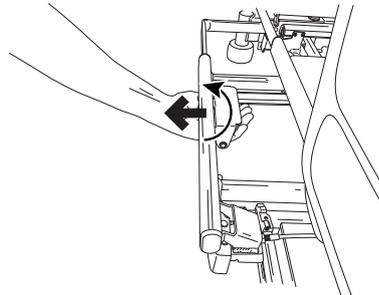

Aperte o trinco de extensão para destrancar e puxe a secção até estender completamente.

3

Certifique-se de que repete isto para todos os trincos de extensão.