



Λαβή απελευθέρωσης πλάτης για Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (CPR)

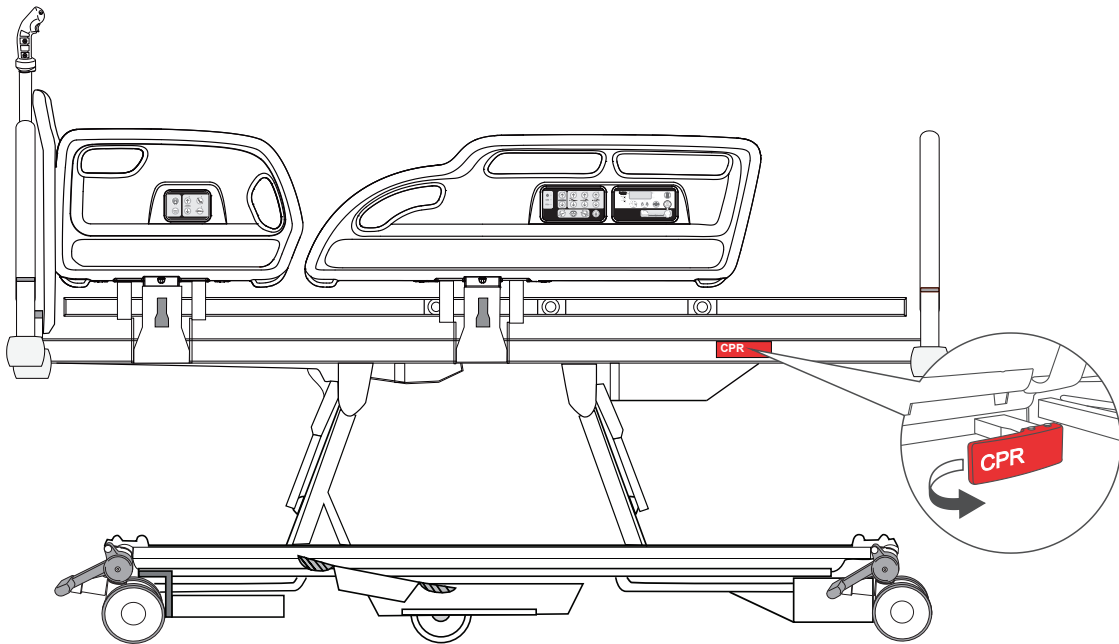


Τραβήξτε τις κόκκινες λαβές καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της κλίνης για να χαμηλώσετε γρήγορα την πλάτη.

Φρένα και αλλαγή κατεύθυνσης

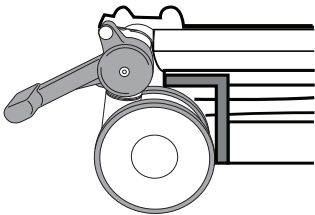


Φρένα

Τα φρένα είναι ενεργοποιημένα και στους τέσσερις τροχούς.

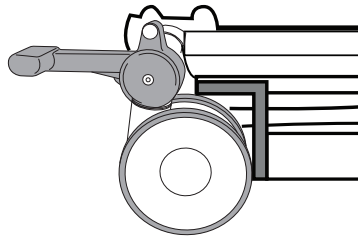

Ελεύθερο

Και οι τέσσερις τροχοί μπορούν να περιστραφούν και να γυρίσουν ελεύθερα.

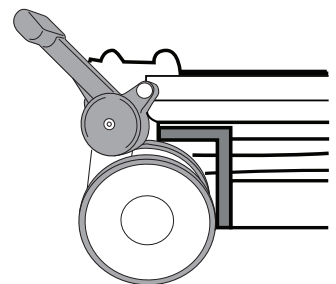

Αλλαγή κατεύθυνσης


Και οι τέσσερις τροχοί μπορούν να περιστραφούν, αλλά οι τροχοί αλλαγής κατεύθυνσης δεν μπορούν να γυρίσουν.

Τα φρένα πρέπει να είναι πάντα ενεργοποιημένα όταν η κλίνη είναι ακίνητη.

Πλευρικά κιγκλιδώματα



Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός κλειδώματος έχει ενεργοποιηθεί με ασφάλεια, όταν ανυψωθούν τα πλευρικά κάγκελα.

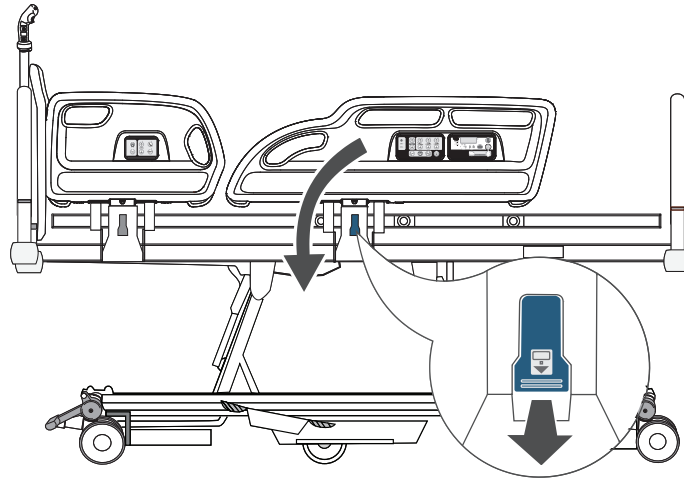


Τραβήξτε τον μπλε μοχλό απελευθέρωσης για να χαμηλώσετε το πλευρικό κιγκλιδώμα.

Για να ανασηκώσετε το πλευρικό κιγκλιδώμα, κρατήστε τη λαβή του πλευρικού κιγκλιδώματος και τραβήξτε το προς τα πάνω και μακριά από την κλίνη μέχρι να κλειδώσει στην ανυψωμένη θέση.


Ρύθμιση μήκους κλίνης (τρεις συγκεκριμένες θέσεις)

1

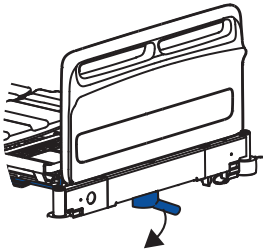


Τραβήξτε την μπλε λαβή κλειδώματος της επέκτασης.

2

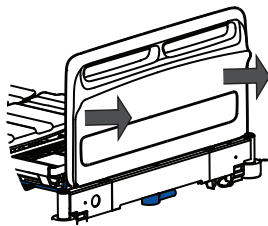


Τραβήξτε το πλαίσιο της κλίνης στην απαιτούμενη θέση και αφήστε τη λαβή.

3

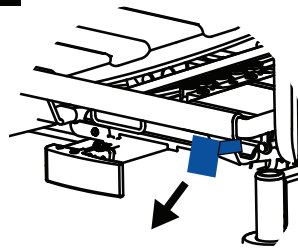

Τραβήξτε την μπλε λαβή επέκτασης.


4

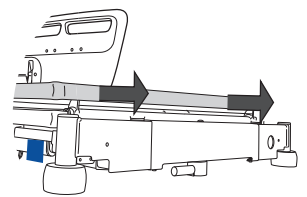

Τραβήξτε τη βάση προς τα έξω, στην απαιτούμενη θέση.


Ρύθμιση πλάτους κλίνης

1

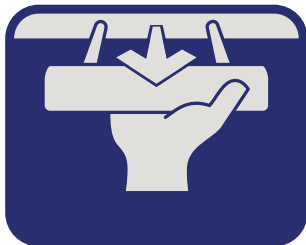

Εντοπίστε τις ασφάλειες επέκτασης που βρίσκονται πίσω από το σύμβολο επέκτασης (τέσσερις σε κάθε πλευρά).

2

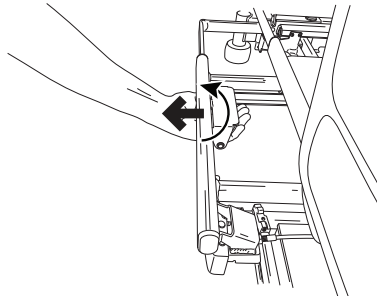

Πιέστε την ασφάλεια επέκτασης για να απασφαλίσετε και τραβήξτε το τμήμα μέχρι να επεκταθεί πλήρως.

3

Επαναλάβετε οπωσδήποτε αυτό το βήμα για όλες τις ασφάλειες επέκτασης.