


# Maxi Air



## Bedienung und Bedienelemente

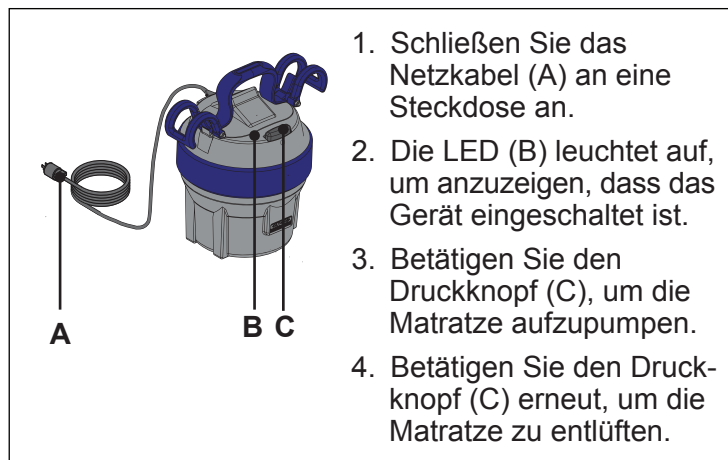


## Stromabschalteneinrichtung


Wenn die Luftzufuhr des *Maxi Air* nicht auf das Betätigen des Druckknopfes reagiert, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um das Aufpumpen zu unterbrechen.

Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen an qualifiziertes Personal.



## Anordnung der Luftzufuhr

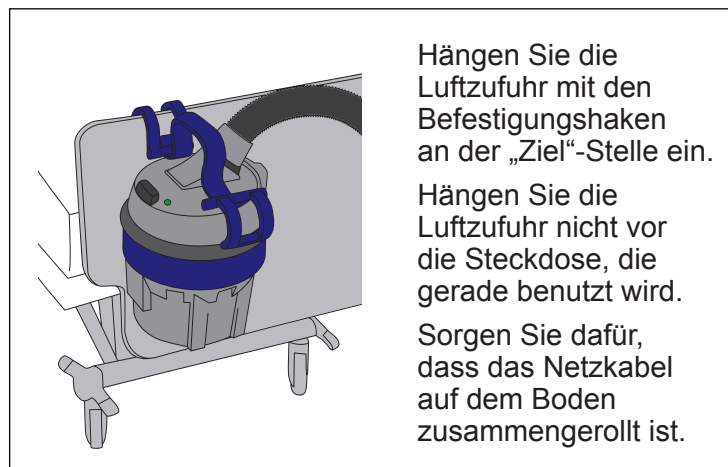

## Anordnung der Luftzufuhr mit Schlauchverlängerung (optional)

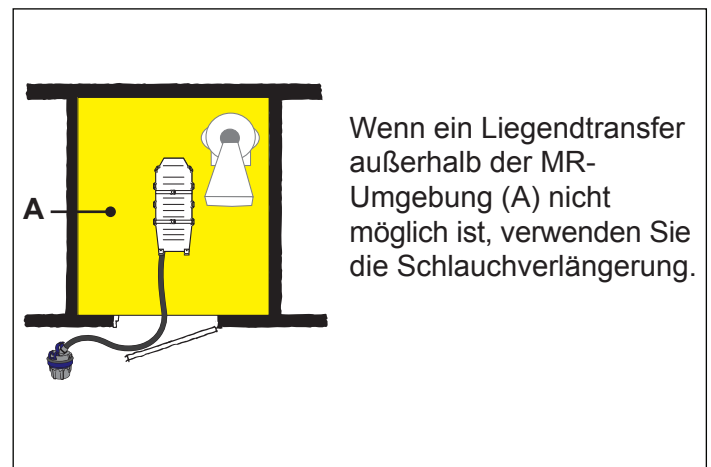

## Anschließen der Luftzufuhr an die Matratze

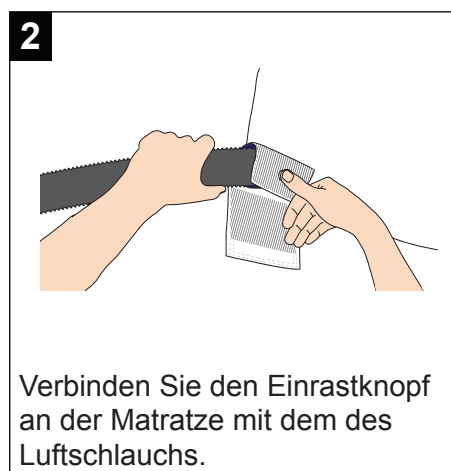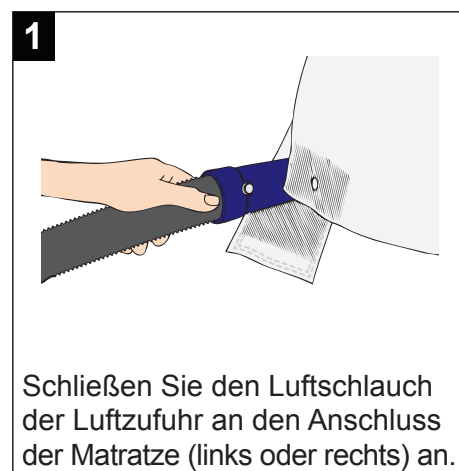

# Reinigung und Desinfektion

## Entfernen sichtbarer Rückstände

1. Trennen Sie die Luftzufuhr von der Steckdose und den Luftschlauch von der Matratze.
2. Entfernen Sie den Luftschlauch von der Luftzufuhr.
3. Verschließen Sie den Ausblasstutzen der Luftzufuhr mit einem Tuch oder einem Einweghandtuch, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit, Wasser oder Reinigungsflüssigkeit in die Luftzufuhr gelangt.
4. Entfernen Sie sichtbare Rückstände von Luftzufuhr und Schlauch mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste oder durch Abbrausen mit Wasser und anschließendes Trockenreiben mit einem sauberen Tuch. Führen Sie die Reinigung von oben nach unten durch.

## Reinigung

5. Sprühen Sie die Reinigungsflüssigkeit auf die Luftzufuhr. Beseitigen Sie vorhandene Rückstände mit einer Bürste oder einem Tuch.
6. Verwenden Sie ein frisches feuchtes Tuch, um alle Rückstände der Reinigungsflüssigkeit zu entfernen. Alternativ können Sie die Luftzufuhr mit Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch abwischen. Das Tuch sollte dabei gelegentlich unter fließendem Wasser ausgespült werden.
7. Rollen Sie den Luftschlauch zusammen und tauchen Sie ihn in die Reinigungsflüssigkeit. Reinigen Sie den Schlauch mit einer Bürste. Spülen Sie anschließend den Luftschlauch mit Wasser ab (ca. 25 °C), um die Reinigungsflüssigkeit zu entfernen.

## Reinigen/Desinfizieren

8. Sprühen Sie die Reinigungsflüssigkeit auf die Luftzufuhr. Lassen Sie das Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen auf der Desinfektionsmittelflasche einwirken.
9. Rollen Sie den Luftschlauch zusammen und tauchen Sie ihn in die Reinigungsflüssigkeit. Lassen Sie das Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen auf der Desinfektionsmittelflasche einwirken.
10. Verwenden Sie ein frisches feuchtes Tuch, um alle Rückstände der Reinigungsflüssigkeit von der Luftzufuhr zu entfernen. Alternativ können Sie die Luftzufuhr mit Wasser abspülen und mit einem sauberen Tuch abwischen. Das Tuch sollte dabei gelegentlich unter fließendem Wasser ausgespült werden.
11. Spülen Sie den Luftschlauch mit Wasser ab (ca. 25 °C), um die Reinigungsflüssigkeit zu entfernen.
12. Lassen Sie die Luftzufuhr trocknen und hängen Sie den Luftschlauch zum Trocknen auf.