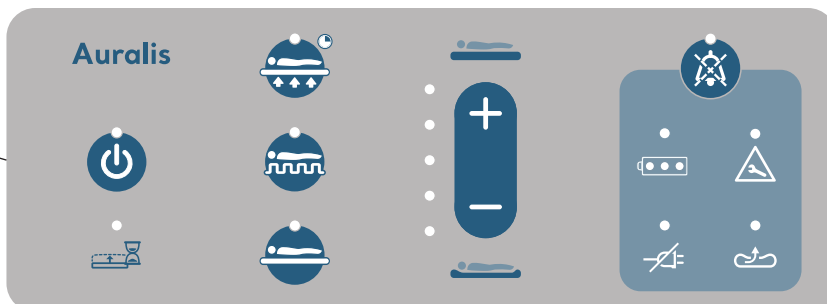
Indikatorji alarmov  
na sprednji plošči**Gumb za delovanje/stanje pripravljenosti**

**Način delovanja** – enkrat pritisnite gumb. Indikator, ki je prej utripal, začne zdaj svetiti.

**Način pripravljenosti** – pritisnite gumb za dve sekundi. Indikator, ki je svetil, začne utripati.

**Indikator Počakajte**

Prikaže se, ko se vzmetnica ali sedežna blazina polni. Preostalo je še 15 minut, da bo vzmetnica ali sedežna blazina povsem napolnjena.

**Gumb načina samodejne trdote**

Za način AutoFirm pritisnite in zadržite 2 sekundi. Vzmetnica se napolni na začasno trdo podlago. Način AutoFirm traja 15 minut, vendar ga lahko v korakih po 5 minut podaljšate na največ 30 minut. Ko je način aktiven, sveti indikator.

Ni za sedežno blazino.

**Gumb izmeničnega načina**

Pritisnite za izmenični način (privzeto). Izmenični način napolni ali izprazni različne celice, da ustvari spremenljivo površino. Ko je način aktiven, sveti indikator.

**Gumb načina reaktivnega CLP (stalnega nizkega tlaka)**

Pritisnite za način reaktivnega CLP. Ta ohranja stalno raven nižjega tlaka v vseh celicah. Ko je način aktiven, sveti indikator.

Ni za sedežno blazino.

**Gumbi za nadzor udobja**

Pritisnite za prilagajanje tlaka v podporni površini, da nastavite raven udobja. Indikatorji prikazujejo nastavev udobja.

**Gumb za utišanje alarma**

Pritisnite za utišanje zvočnega alarma za 15 minut; indikator je vklopljen.

Alarm je preklican, ko je stanje alarma odpravljeno.

**Indikator prazne baterije**

Rumen indikator in zvočni alarm – preostalo je še za 1 uro baterije. Alarm lahko utišate.

Ko je preostalo še samo za 15 minut baterije, črpalka preklopi na način reaktivnega CLP. Zvočnega alarma ni več mogoče utišati.

**Indikatorji polnjenja baterije**

Modri indikatorji prikazujejo raven napolnjenosti baterije. Utripajoč indikator – baterija se polni.

**Indikator za servis**

- Indikator za servis je rumen, indikatorji alarmov na sprednji plošči so zeleni – črpalka je pripravljena za servis. Samo informacija, ni alarm.
- Indikator za servis je rumen, indikatorji alarmov na sprednji plošči so rumeni, zvočni alarm – v črpalki je prišlo do notranje okvare ali napake. Alarm lahko utišate.

**Indikator izpada električnega napajanja**

Zazan je bil izpad električnega napajanja. Samo informacije; črpalka še naprej deluje normalno tako, da uporablja baterijo. Zvočnega alarma ni.

**Indikator nizkega tlaka**

- Prikaže se indikator, zasliši se en opozorilni ton – črpalka je zaznala nizek tlak v vzmetnici ali sedežni blazini.
- Prikaže se indikator, zasliši se zvočni alarm – vzmetnica ali sedežna blazina je bila med uporabo odklopljena. Alarm lahko utišate.
- Prikaže se indikator, zasliši se en opozorilni ton – črpalka je zaznala, da vzmetnica ob zagonu ni priklopljena.