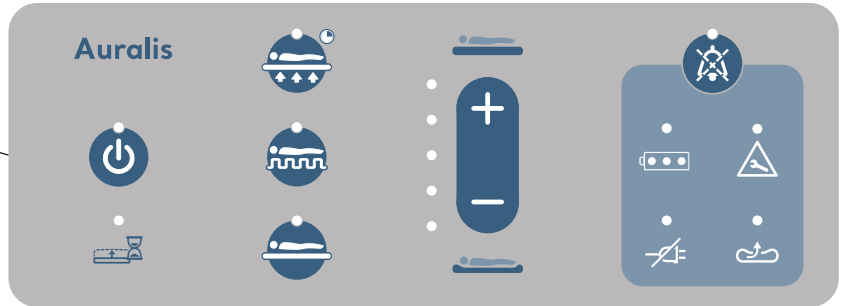


ไฟแสดงสถานะสัญญาณเตือนแฟงด้านหน้า

**ปุ่มเปิดใช้งาน/สแตนด์บาย**

โหมดเปิดใช้งาน - กดปุ่มหนึ่งครั้ง ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนจากกะพริบเป็นสว่างต่อเนื่อง

โหมดสแตนด์บาย - กดปุ่มค้างไว้สองวินาที ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนจากสว่างต่อเนื่องเป็นกะพริบ

**ไฟแสดงสถานะการรอสว่างขึ้น**

สว่างขึ้นเมื่อเบาะหรือเบาะรองนั่งกำลังถูกเติมลม ยังคงติดสว่างอีก 15 นาทีจนกว่าเบาะหรือเบาะรองนั่งได้รับการเติมลมเต็มที่

**ปุ่มโหมดคงที่อัตโนมัติ**

กดค้างไว้ 2 วินาทีสำหรับโหมดคงที่อัตโนมัติ เบาะจะพองตัวถึงระดับผิวเบาะแน่นชั่วคราว โหมดคงที่อัตโนมัติใช้เวลา 15 นาที แต่อาจเพิ่มขึ้นครั้งละ 5 นาที จนถึงระยะเวลาสูงสุด 30 นาที ไฟสถานะติดเมื่อระบบทำงาน ไม่มีโหมดนี้ในเบาะรองนั่ง

**ปุ่มโหมดเคลื่อนที่**

กดเพื่อเข้าสู่โหมดเคลื่อนที่ (ค่าเริ่มต้น) โดยโหมดเคลื่อนที่จะสูบลมเข้าหรือปล่อยลมออกที่ลอนแตกต่างกันเพื่อสร้างพื้นผิวสลับการพองตัวและยุบตัว ไฟสถานะติดเมื่อระบบทำงาน

**ปุ่มโหมดรีเซ็ต CLP (แรงดันลดลงต่อเนื่อง)**

กดเพื่อเข้าสู่โหมดรีเซ็ต CLP คงระดับแรงดันลดลงต่อเนื่องกับทุกลอน ไฟสถานะติดเมื่อระบบทำงาน ไม่มีโหมดนี้ในเบาะรองนั่ง

**ปุ่มควบคุมกระแสลม**

กดเพื่อปรับแรงดันในพื้นที่รองรับเพื่อกำหนดระดับกระแสลม ไฟแสดงสถานะแสดงการตั้งค่ากระแสลม

**ปุ่มปิดเสียงเตือน**

กดเพื่อปิดเสียงเตือนนาน 15 นาที และไฟแสดงสถานะจะติด เสียงเตือนจะถูกยกเลิกเมื่อมีการแก้ไขสถานะสัญญาณเตือน

**ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ**

ไฟแสดงสถานะสีเหลืองและเสียงเตือน - อายุใช้งานแบตเตอรี่เหลือ 1 ชั่วโมง คุณสามารถปิดเสียงสัญญาณเตือนได้

เมื่ออายุใช้งานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 15 นาที ปุ่มจะเข้าสู่โหมดรีเซ็ต CLP โดยจะไม่สามารถปิดเสียงเตือนได้อีก

**ไฟแสดงระดับประจุแบตเตอรี่**

ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินแสดงระดับประจุแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะกะพริบ - กำลังชาร์จแบตเตอรี่

**ไฟแสดงสถานะการซ่อมแซม**

- ไฟแสดงสถานะการซ่อมแซมสีเหลือง ไฟแสดงสถานะสัญญาณเตือนแฟงด้านหน้าสีเขียว - ปุ่มพร้อมบริการ ไฟนี้เป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่สัญญาณเตือน
- ไฟแสดงสถานะการซ่อมแซมสีเหลือง ไฟแสดงสถานะสัญญาณเตือนแฟงด้านหน้าสีเหลือง - ปุ่มมีข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดภายใน คุณสามารถปิดเสียงสัญญาณเตือนได้

**ไฟแสดงสถานะกระแสไฟขัดข้อง**

ระบบตรวจพบความขัดข้องของกระแสไฟหลัก ไฟนี้แสดงข้อมูลเท่านั้น ปุ่มจะทำงานตามปกติต่อไป โดยใช้แบตเตอรี่ โดยจะไม่มีเสียงเตือน

**ไฟแสดงสถานะแรงดันต่ำ**

- ไฟแสดงสถานะจะติดขึ้น มีเสียงเตือนครั้งเดียว - ปุ่มตรวจพบแรงดันต่ำภายในเบาะหรือเบาะรองนั่ง
- ไฟแสดงสถานะจะติดขึ้น มีเสียงเตือน - เบาะหรือเบาะรองนั่งถูกตัดการเชื่อมต่อระหว่างการใช้งาน คุณสามารถปิดเสียงสัญญาณเตือนได้
- ไฟแสดงสถานะจะติดขึ้น มีเสียงเตือนครั้งเดียว - ปุ่มตรวจพบว่าเบาะไม่เชื่อมต่อเมื่อเริ่มต้นทำงาน