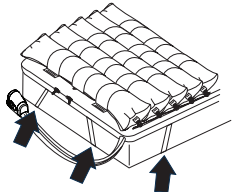
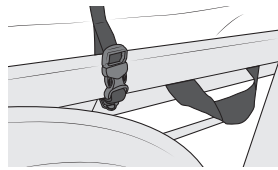

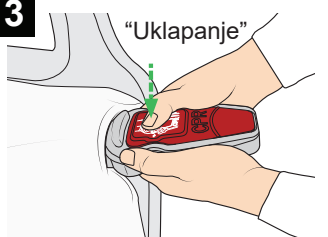
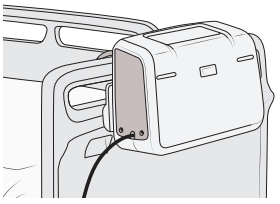

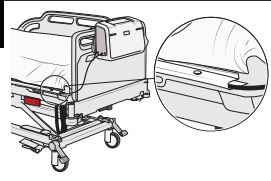

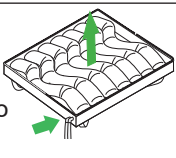
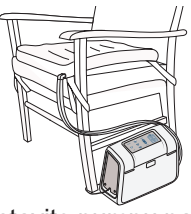


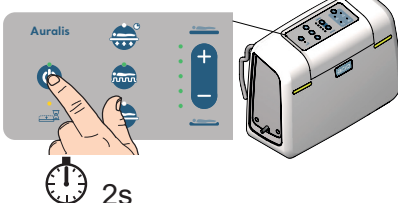

Sastavljanje navlake za madrac ili zamjene za madrac i pumpe

<p>1</p>  <p>Navlaka za madrac: Postavite na bazu madraca. Pričvrstite s 4 pojasa za fiksiranje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • komplet cijeva u području stopala • CPR u području glave • ćelije okrenute prema gore  <p>Zamjena za madrac: Postavite na bazu kreveta. Pričvrstite 8 pojaseva za pričvršćivanje na pokretne dijelove okvira kreveta.</p>	<p>2</p>  <p>Zatvorite zaštitnu navlaku preko madraca. Logotip Arjo u području stopala.</p>	
<p>3</p>  <p>CPR jedinica se uklapa u zatvoren položaj.</p>	<p>4</p>  <p>Objesite pumpu u podnožju kreveta.</p>	<p>5</p>  <p>Priključite komplet cijevi.</p>	<p>6</p>  <p>Postavite kabl u vodilicu kabla. Zatvorite klapnu oko kabla zatvaračima. Priključite strujni kabl na izvor napajanja.</p>

Sastavljanje jastuka za sjedenje i pumpe

<p>1</p>  <p>Jastuk za sjedenje: Postavite na površinu stolice. Za pričvršćivanje koristite pojase za fiksiranje.</p>	 <p>Naslon stolice Prednji dio stolice</p> <ul style="list-style-type: none"> • ćelije okrenute prema gore • komplet cijeva u prednjem desnom uglu • ćelije vodoravno duž stolice, V oblik prema naprijed 	<p>2</p>  <p>Postavite pumpu na pod, kabl ispod stolice, komplet cijeva postavljen duž stolice. Priključite komplet cijevi. Priključite strujni kabl na izvor napajanja.</p>
---	---	--

Pokretanje Auralis sistema

<p>1</p>  <p>Kad je pumpa priključena na napajanje, izvršava samoprovjeru: zvučni signal - 10 sekundi - 2 zvučna signala - spremna za upotrebu.</p> <p>Pritisnite dugme za pokretanje/mirovanje. Prikazuju se sljedeći indikatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokretanje/mirovanje • Indikator čekanja • Dugme za izmjenjivi način rada • Indikator za kontrolu komfora • Indikator napunjenosti baterije • Zeleni indikatori s prednje strane pumpe 	<p>2</p>  <p>15 min</p> <p>Nakon što se indikator čekanja isključi, postavite posteljinu na madrac. Pazite da CPR jedinica za brzo ispuhavanje bude jasno vidljiva.</p> <p>Stavite pacijenta na madrac ili jastuk za sjedenje.</p> <p>Izmjenjivi način rada je podešen prema zadanim postavkama.</p>
--	--

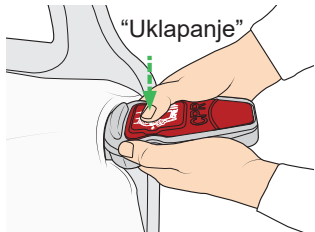
CPR jedinica za brzo ispuhavanje

1

Aktiviranje: Pritisnite istovremeno oba dugmeta za otpuštanje CPR jedinice.



Pazite da prednji dio bude otvoren.
Zrak se evakuira za 15 sekundi.

2

Resetiranje: Pritisnite otvoreni dio dok se ne uklopi u zatvoreni položaj.

Način rada AutoFirm

1

Aktiviranje: Pritisnite i držite dugme. Indikatori komfora trepere i madrac ne napuhuje na AutoFirm.

2

Postignut je pritisak – indikatori za AutoFirm i kontrolu komfora svijetle kontinuirano.


3

Deaktiviranje: Pritisnite i držite dugme ili izaberite drugi način rada.




Produženje: Pritisnite dugme za produženje od 5 minuta. Maks. 30 min. Ako se ne produži, pumpa se vraća u prethodni način rada.

Izmjenjivi način rada, zadana postavka

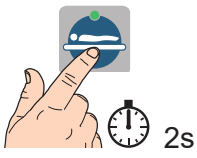
1

Aktiviranje: Pritisnite dugme, prikazat će se indikator izmjenjivog načina rada. Susjedne ćelije se napuhuju i ispuhuju u 10-minutnom ciklusu.


2

Deaktiviranje: Izaberite način rada Reactive CLP ili AutoFirm. Ako nije potrebna daljnja terapija, uklonite pacijenta s površine i isključite pumpu.

Način rada Reactive CLP

1

Aktiviranje: Pritisnite i držite dugme. Prikazuje se indikator za Reactive CLP način rada.

2

Deaktiviranje: Izaberite izmjenjivi način rada ili AutoFirm. Ako nije potrebna daljnja terapija, uklonite pacijenta s površine i isključite pumpu.

Transportni način rada (samo madraci)

1

Aktiviranje: Istovremeno pritisnite bočnu dugmad i uklonite komplet cijevi. Madrac pruža podršku pacijentu do 12 sati.

2

Deaktiviranje: Ponovo priključite komplet cijevi. Pumpa se vraća u prethodni način rada

