



Sastavljanje nadmadraca ili zamjenskog madraca i pumpe

1

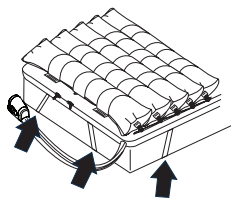

- komplet cijevi na podnožju
- KPR na uzglavlju
- ćelije okrenute prema gore

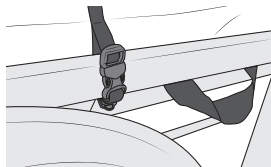

Zamjenski madrac:

Postavite na podnicu kreveta.

Pričvrstite 8 remena za pričvršćivanje pokretnih dijelova okvira kreveta.

Nadmadrac:

Postavite na osnovni madrac.

Učvrstite četirima pričvršnim remenima.

2


arjo

Auralis




Patentnim zatvaračem pričvrstite zaštitnu navlaku na madrac. Logotip Arjo vidljiv je na podnožju.

3

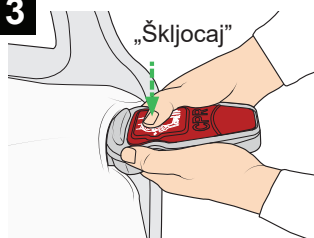


KPR jedinica pričvršćena je u zatvorenom položaju.

4

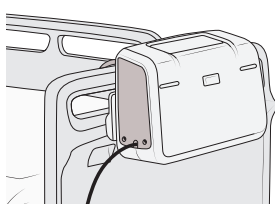


Objesite pumpu na podnožje kreveta.

5

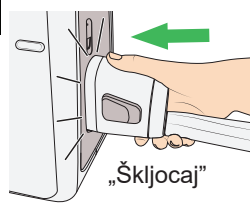

Priključite komplet cijevi.

6

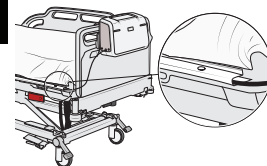


Kabel stavite u vodilicu. Preklop zatvorite oko kabela s pomoću učvršnica.

Kabel za napajanje priključite u izvor napajanja.

Sastavljanje jastuka sjedala i pumpe


1

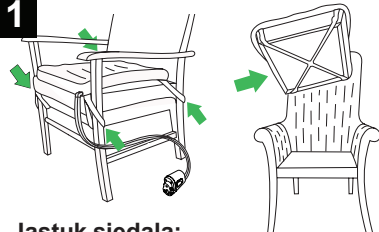

Jastuk sjedala:


Postavite na površinu stolice.

Za pričvršćivanje upotrijebite pričvršne remene.

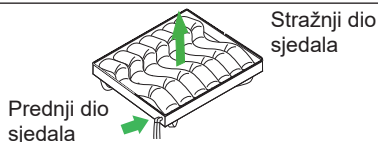

- ćelije okrenute prema gore
- komplet cijevi u prednjem desnom kutu
- ćelije vodoravno preko stolice, oblik slova V prema naprijed

2

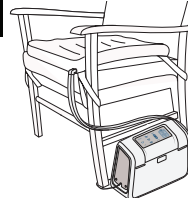


Postavite pumpu na pod, kabel pod stolicu, komplet cijevi duž stolice.

Priključite komplet cijevi.

Kabel za napajanje priključite u izvor napajanja.

Pokretanje sustava Auralis

1

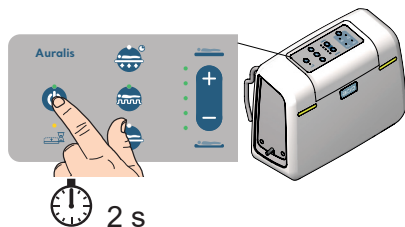

Kada je pumpa spojena na izvor napajanja, pokreće samoprovjeru: zvučni signal – 10 sekundi – 2 zvučna signala – spremno za upotrebu.

Pritisnite i držite gumb Pokretanje / stanje mirovanja

Prikazuju se sljedeći indikatori:

- Pokretanje/stanje mirovanja
- Indikator čekanja
- Gumb izmjeničnog načina rada
- Indikator kontrole udobnosti
- Indikator napunjenosti baterije
- Zeleni indikatori na prednjoj strani pumpe

2



15 min.


Nakon što se isključi indikator čekanja, postavite platu na madrac. Provjerite je li KPR jedinica za brzo ispuhivanje jasno vidljiva.

Postavite pacijenta na madrac ili jastuk sjedala.


Izmjenični način rada postavljen je prema zadanom.

KPR jedinica za brzo ispuhivanje

1

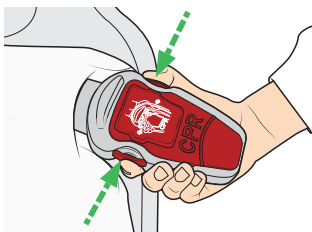

Uključivanje: istovremeno pritisnite dva gumba za otpuštanje KPR-a.

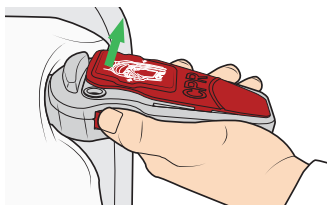

Provjerite je li prednji dio otvoren.

Zrak izlazi za 15 sekundi.

2



Ponovno postavljanje: pritisnite otvoreni dio dok ne sjedne u zatvoreni položaj.

Način rada AutoFirm

1



Uključivanje: pritisnite i držite gumb. Indikatori za udobnost trepere i madrac se napuhuje na AutoFirm.

2



Tlak je dosegnut – indikatori načina rada AutoFirm i kontrole udobnosti svijetle neprekidno.

3



Isključivanje: pritisnite i držite gumb ili odaberite drugi način rada.



Produživanje: Pritisnite gumb da biste produžili za 5 minuta. Maks. 30 min. Ako se ne produži, pumpa se vraća u prethodni način rada.

Izmjenični način rada, zadana postavka

1



Uključivanje: Pritisnite gumb; prikazuje se indikator izmjeničnog načina rada. Susjedne ćelije napuhuju se i ispuhuju u ciklusima od 10 minuta.

2



Isključivanje: Odaberite način rada reaktivni CLP ili AutoFirm. Ako nije potrebna dodatna terapija, skinite pacijenta s površine i isključite pumpu.

Način rada reaktivni CLP

1



Uključivanje: Pritisnite i držite gumb. Prikazuje se indikator načina rada reaktivni CLP.


2



Isključivanje: Odaberite izmjenični način rada ili AutoFirm. Ako nije potrebna dodatna terapija, skinite pacijenta s površine i isključite pumpu.


Transportni način rada (samo madrac)

1

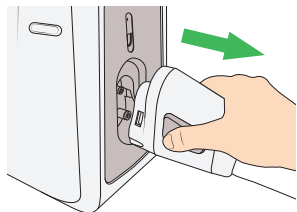

Uključivanje: istovremeno pritisnite bočne gumba i skinite komplet cijevi. Madrac podupire pacijenta najviše 12 sati.

2

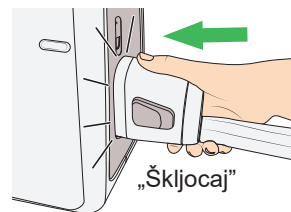

Isključivanje: Ponovno priključite komplet cijevi. Pumpa se vraća u prethodni način rada