


Monter overmadrassen eller madrasserstatningen og pumpen

1

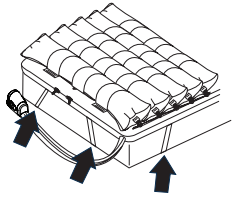


Overmadrass:

Legg oppå basemadrassen.

Fest med fire festeremmer.

- slangesett i fotenden
- HLR i hodeenden
- cellene vender opp

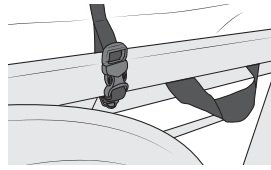

Madrasserstatning:

Legg på sengebunnen.

Fest de åtte festeremmene til bevegelige deler på sengerammen.

2


arjo

Auralis




Lukk beskyttelsestrekket over madrassen med glidelåsen. Arjo-logoen er synlig i fotenden.

3

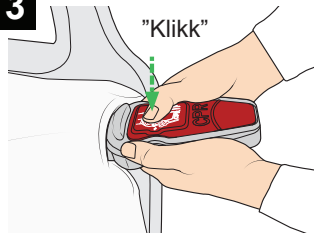


HLR-enheten klikkes i lukket stilling.

4

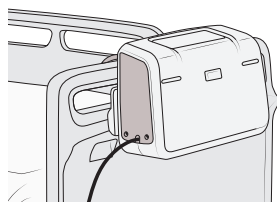


Heng pumpen i fotenden av sengen.

5

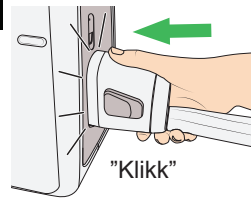

Koble til slangesettet.

6

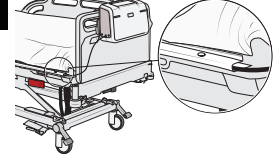


Plasser kabelen i kabelstyringen. Lukk klaffen rundt kabelen med trykkpinnene.

Koble strømkabelen til en strømkilde.

Monter seteputen og pumpen


1

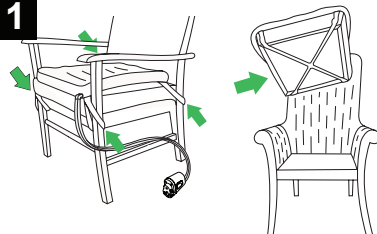

Setepute:


Legg den på stolens overflate.

Bruk festeremmene til å feste den.

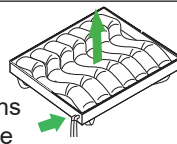Stolens
forsideStolens
bakside

- cellene vender opp
- slangesett foran i høyre hjørne
- celle horisontalt over stolen, V-form vendt fremover

2

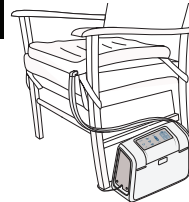

Sett pumpen på gulvet, legg kabelen under stolen og slangesettet langs stolen.


Koble til slangesettet.

Koble strømkabelen til en strømkilde.



Start Auralis-systemet

1

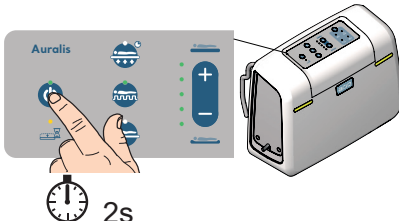

Når pumpen er koblet til en strømkilde, kjører den en egensjekk: Pipesignal – 10 sekunder – 2 pipesignal – klar til bruk.

Hold inne Kjør/standby-knappen.

Følgende indikatorer vises:

- Kjør/standby
- Venteindikator
- Knapp for alternerende modus
- Komfortkontrollindikator
- Batteriindikator
- Grønne indikatorer foran på pumpen

2



15 min


Legg lakenet på madrassen når Vent-indikatoren slås av. Pass på at HLR-hurtigtømmeenheten er godt synlig.

Legg pasienten på madrassen eller seteputen.


Alternerende modus er angitt som standard.

HLR-hurtigtømmemeenhet

1

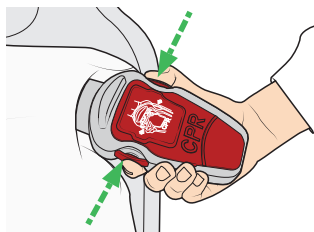

Aktivere: Trykk på begge HLR-utløserknappene samtidig.

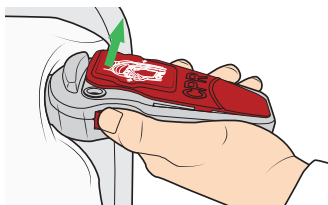

Pass på at den fremre delen er åpen.
Luften fjernes på 15 sekunder.

2



Tilbakestille:
Trykk ned den åpne delen til den klikker på plass i lukket posisjon.


AutoFirm-modus

1



Aktivere: Trykk og hold inne knappen. Komfortindikatorene blinker og madrassen blåses opp til AutoFirm.

2

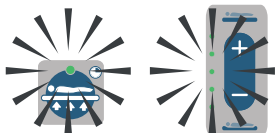

Trykk oppnådd – AutoFirm og Kontroll-komfortindikatorene skifter til konstant lysende.

3



Deaktivere: Hold inne knappen eller velg en annen modus.



Forleng:
Trykk på knappen for å forleng i fem minutter. Maks. 30 min. Hvis den ikke forlenges, går pumpen tilbake til forrige modus.

Alternerende modus, standardinnstilling

1



Aktivere:
Trykk på knappen og indikatoren for alternerende modus vises.
Tilstøtende celler blåses opp og tømmes i en syklus på 10 minutter.

2



Deaktivere:
Velg Reaktiv KLT- eller AutoFirm-modus.
Hvis det ikke trengs mer behandling, fjerner du pasienten fra overflaten og slår av pumpen.

Reaktiv KLT-modus

1



Aktivere:
Trykk og hold inne knappen.
Indikatoren for Reaktiv KLT-modus vises.


2



Deaktivere:
Velg Alternerende modus eller AutoFirm-modus.
Hvis det ikke trengs mer behandling, fjerner du pasienten fra overflaten og slår av pumpen.

Transportmodus (kun madrasser)

1

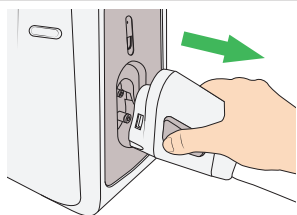

Aktivere:
Trykk på sideknappene samtidig, og fjern slangesettet. Madrassen støtter pasienten i opptil 12 timer.

2



Deaktivere:
Koble til slangesettet igjen. Pumpen går tilbake til forrige modus.

