


ประกอบเบาะซ้อนหรือเบาะสำหรับเปลี่ยนและปัม

1

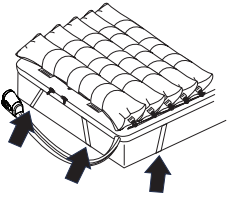


- ชุดท่ออยู่ที่ส่วนปลายเตียง
- CPR อยู่ที่ส่วนหัวเตียง
- ลอนรองรับหงายขึ้น

เบาะซ้อน:
วางที่ด้านบนของเบาะด้านล่าง
ยึดด้วยสายรัดยึดอยู่กับที่ 4 เส้น


เบาะสำหรับเปลี่ยน:
วางลงบนฐานเตียง
ติดสายรัด 8 เส้นเพื่อยึดเข้ากับชิ้นส่วน
เคลื่อนที่ได้ของโครงเตียง

2



รัดซีปล็อกหุ้มเบาะ
โดยให้มองเห็นโลโก้ Arjo
ที่ส่วนปลายเตียง


3

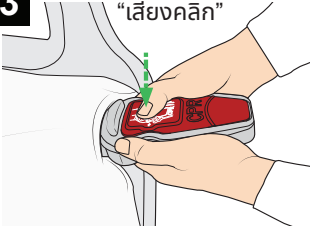

“เสียงคลิก”


ชุด CPR คลิกเข้าที่
ในตำแหน่งปิดสนิท

4

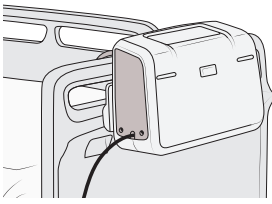

แขวนปั๊มที่ส่วนปลายเตียง


5



“เสียงคลิก”

เชื่อมต่อชุดท่อ


6

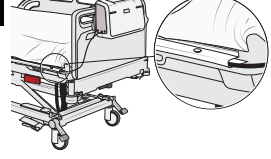

วางสายไฟลงในตัวจัดระเบียบ
สายไฟ ปิดแผ่นบานพับรอบ
สายไฟด้วยปุ่มกด
เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแหล่ง
พลังงาน

ประกอบเบาะรองนั่งและปัม


1

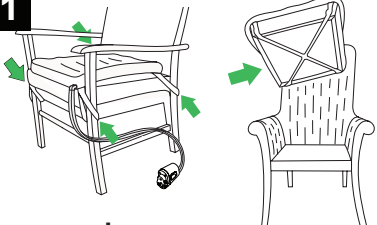

เบาะรองนั่ง:
วางบนเก้าอี้
ใช้สายรัดเพื่อยึด

- ลอนรองรับหงายขึ้น
- ชุดท่ออยู่ที่มุมขวาด้านหน้า
- ลอนรองรับเป็นแนวนอนขวาง
เก้าอี้ รูปตัว V ชี้ไปด้านหน้า


2

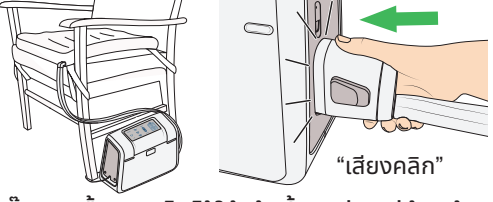

วางปั๊มบนพื้น สายไฟไว้ใต้เก้าอี้ ชุดท่ออยู่ด้านข้าง
ของเก้าอี้
เชื่อมต่อชุดท่อ
เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแหล่งพลังงาน

เริ่มระบบ Auralis

1

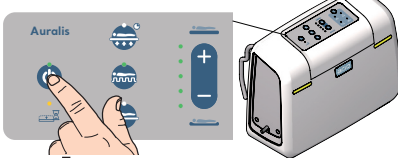


กดปุ่มเปิดใช้งาน/สแตนด์บายค้างไว้
ไฟแสดงสถานะต่อไปนี้จะติด:

- เปิดใช้งาน/สแตนด์บาย
- ไฟแสดงสถานะการarro
- ปุ่มโหมดเคลื่อนที่
- ไฟแสดงสถานะการควบคุมกระแส
- ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
- ไฟแสดงสถานะสีเขียวที่ด้านหน้าของปั๊ม

2 วินาที

เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน ปั๊มจะ
เปิดใช้งานการตรวจสอบการทำงานเอง:
เสียงบี๊ป - 10 วินาที - เสียงบี๊ป 2 ครั้ง -
พร้อมใช้งาน

2




15 นาที

เมื่อไฟแสดงสถานะการarroดับลง
ใส่ผ้าปูเตียงที่เบาะ ตรวจสอบว่าสามารถ
มองเห็นชุดปล่อยลมตัว CPR ได้
อย่างชัดเจน
ให้ผู้ป่วยนอนบนเบาะหรือนั่งบนเบาะรองนั่ง
โหมดเคลื่อนที่ที่ถูกตั้งค่าไว้โดยค่าเริ่มต้น

ชุดปล่อยลมถ่วง CPR

1

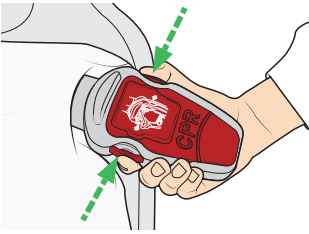

เปิดใช้งาน: กดปุ่มปล่อย CPR ทั้งสองปุ่มพร้อมกัน



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนด้านหน้าเปิดอยู่
อากาศจะถ่ายเทออกใน 15 วินาที

2



รีเซ็ต: กดที่ชิ้นส่วนเปิดออกจนกระทั่งคลิกเข้าที่ในตำแหน่งปิดสนิท

โหมดคงที่อัตโนมัติ


1



2 วินาที

เปิดใช้งาน: กดปุ่มค้างไว้ ไฟแสดงสถานะกระแสน้ำจะกะพริบและเบาๆ พองตัวถึงระดับคงที่อัตโนมัติ

2

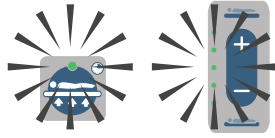

ถึงค่าแรงดันแล้ว - ไฟแสดงสถานะคงที่อัตโนมัติและการควบคุมกระแสน้ำเปลี่ยนเป็นสว่างต่อเนื่อง

3



2 วินาที

ปิดใช้งาน: กดค้างไว้หรือเลือกโหมดอื่น



ขยาย:
กดปุ่มเพื่อขยายเวลา 5 นาที สูงสุด 30 นาที หากไม่ขยายเวลาอีก ปุ่มจะกลับสู่โหมดก่อนหน้านี้

โหมดเคลื่อนที่, การตั้งค่าเริ่มต้น

1



เปิดใช้งาน:
กดปุ่ม ไฟแสดงสถานะโหมดเคลื่อนที่ที่จะแสดงขึ้น ลอนรองรับติดกันจะสุบลมเข้าและถ่ายลมออกรอบละ 10 นาที


2



ปิดใช้งาน:
เลือกโหมดรีแอกทีฟ CLP หรือโหมดคงที่อัตโนมัติ หากไม่ต้องการรักษาเพิ่มเติมอีก ให้นำผู้ป่วยออกจากเบาะและปิดปั๊ม

โหมดรีแอกทีฟ CLP

1

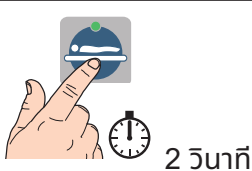

2 วินาที

เปิดใช้งาน:
กดปุ่มค้างไว้ ไฟแสดงสถานะโหมดรีแอกทีฟ CLP จะแสดงขึ้น


2



ปิดใช้งาน:
เลือกโหมดเคลื่อนที่หรือโหมดคงที่อัตโนมัติ หากไม่ต้องการรักษาเพิ่มเติมอีก ให้นำผู้ป่วยออกจากเบาะและปิดปั๊ม

โหมดการเคลื่อนย้าย (เบาะเท่านั้น)

1

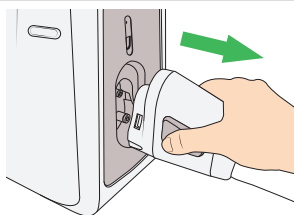

เปิดใช้งาน:
กดปุ่มด้านข้างพร้อมกันและดึงชุดท่อออก เบาะรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด 12 ชั่วโมง

2



“เสียงคลิก”

ปิดใช้งาน:
เชื่อมต่อชุดท่ออีกครั้ง ปุ่มจะกลับสู่โหมดก่อนหน้านี้