

Phụ kiện cần thiết:

- Bình xịt với dung dịch khử trùng (dung dịch cồn 70% hoặc dung dịch clo với nồng độ tối đa 10.000 ppm)
- Chất tẩy rửa trung tính (dung dịch vệ sinh)
- Bình xịt có chứa nước
- Khăn vải

Vệ sinh và khử trùng giữa các bệnh nhân và điều đặn trong khi sử dụng.



#### CẢNH BÁO

Để tránh bị điện giật, luôn ngắt kết nối bơm khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh và khử trùng.

Luôn đọc hướng dẫn sử dụng và bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất về chất khử trùng.

Để tránh kích ứng mắt hoặc da, không được khử trùng khi có bệnh nhân.

### Chuẩn bị

1. Ngắt kết nối bơm khỏi đệm giường / ghế.
2. Tắt bơm và ngắt kết nối khỏi nguồn điện.

### Vệ sinh bơm

3. Sử dụng một miếng vải sạch và dung dịch làm sạch, lau sạch để loại bỏ bất kỳ cặn bẩn hoặc bụi bẩn có thể nhìn thấy trên:
  - vỏ chính
  - màng
  - nhãn
  - giá treo
4. Bất kỳ khu vực nào còn sót lại bụi bẩn phải được làm sạch lại bằng dung dịch vệ sinh.
5. Dùng nước và khăn vải mới lau sạch toàn bộ dấu vết của dung dịch vệ sinh, sau đó dùng khăn vải lau khô.

### Khử trùng bơm

6. Xịt dung dịch khử trùng lên khăn vải khô và lau dung dịch lên tất cả các khu vực của bơm.
7. Để thời gian cho chất khử trùng phát huy tác dụng.
8. Dùng nước và khăn vải mới lau sạch toàn bộ dấu vết của dung dịch khử trùng.
9. Lau sạch lại bằng khăn vải khô.

## Vệ sinh đệm giường hoặc đệm ghế

10. Xịt dung dịch vệ sinh lên toàn bộ khu vực bên ngoài vỏ trên của đệm giường hoặc đệm ghế và lau sạch bụi bẩn với khăn vải sạch.
11. Bất kỳ khu vực nào còn sót lại bụi bẩn phải được làm sạch lại bằng dung dịch vệ sinh trước khi tiếp tục sử dụng.
12. Dùng nước và khăn vải mới lau sạch toàn bộ dấu vết của dung dịch vệ sinh, sau đó dùng khăn vải lau khô.
13. Nếu cần thiết, vệ sinh phía bên trong đệm giường hoặc đệm ghế. Tháo khóa gỡ vỏ trên để tiếp cận các bộ phận bên trong.
14. Xịt dung dịch vệ sinh lên khăn vải khô để lau xuống:
  - các thanh đệm khí
  - vỏ dưới
  - dây đai
15. Dùng nước và khăn vải mới lau sạch toàn bộ dấu vết của dung dịch vệ sinh, sau đó dùng khăn vải lau khô.

## Khử trùng đệm giường hoặc đệm ghế

16. Xịt dung dịch khử trùng lên khăn vải khô và lau dung dịch lên tất cả các khu vực bên ngoài vỏ trên của đệm giường hoặc đệm ghế.
17. Để thời gian cho chất khử trùng phát huy tác dụng.
18. Dùng nước và khăn vải mới lau sạch toàn bộ dấu vết của dung dịch khử trùng.
19. Lau sạch lại bằng khăn vải khô.
20. Để vỏ trên của đệm giường hoặc đệm ghế khô gió.
21. Nếu cần thiết, khử trùng phía bên trong đệm giường hoặc đệm ghế. Tháo khóa gỡ vỏ trên để tiếp cận các bộ phận bên trong.
22. Xịt dung dịch khử trùng lên khăn vải khô và lau tất cả các bộ phận bên trong.
23. Để thời gian cho chất khử trùng phát huy tác dụng.
24. Dùng nước và khăn vải mới lau sạch toàn bộ dấu vết của dung dịch khử trùng.
25. Lau sạch lại bằng khăn vải khô.
26. Để các bộ phận bên trong khô gió trước khi gắn lại vỏ trên của đệm giường.
27. Nếu cần thiết, có thể vệ sinh dây đai và đế của đệm giường hoặc đệm ghế bằng cách sử dụng phương pháp tương tự. Tháo dây đai để dễ tiếp cận.

