

Accesorios necesarios:

- Pulverizador con la solución desinfectante (disolución de alcohol al 70 % o de cloro hasta 10 000 ppm)
- Detergente neutro (solución de limpieza)
- Pulverizador con agua
- Paños

Limpie y desinfecte cuando cambie de paciente y a intervalos regulares durante su utilización.



#### ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, desconecte siempre el compresor de la fuente de alimentación antes de la limpieza y la inspección.

Lea siempre las instrucciones de uso y la ficha de datos de seguridad del desinfectante.

Para evitar que se irriten los ojos y la piel, no realice nunca la desinfección delante de un paciente.

## Preparación

1. Desconecte el compresor del colchón o del cojín de asiento.
2. Apague el compresor y desconéctelo de la toma de corriente.

## Limpieza del compresor

3. Pase un paño limpio con un producto de limpieza para retirar la suciedad acumulada:
  - Carcasa principal
  - Membrana
  - Etiquetas
  - Soportes de suspensión
4. Vuelva a limpiar con el producto de limpieza las zonas en las que hayan podido quedar restos de suciedad.
5. Retire los restos del producto de limpieza con agua y un paño nuevo. A continuación, pase un paño seco.

## Desinfección del compresor

6. Pulverice la solución desinfectante en un paño seco y extiéndala por todas las superficies del compresor.
7. Deje que el desinfectante actúe.
8. Retire los restos de la solución desinfectante con agua y un paño nuevo.
9. Pase un paño seco.

## Limpieza del colchón o del cojín de asiento

10. Pulverice el producto de limpieza en todas las superficies de la funda superior del colchón o del cojín de asiento y pase un paño limpio para eliminar la suciedad.
11. Antes de continuar, vuelva a limpiar con el producto de limpieza las zonas en las que hayan podido quedar restos de suciedad.
12. Utilice agua y un paño nuevo para limpiar cualquier rastro del producto de limpieza. A continuación, utilice un paño seco para eliminar el exceso de humedad.
13. Si es necesario, limpie el interior del colchón o del cojín de asiento. Abra la funda superior para acceder a los elementos internos.
14. Para limpiarlos, pulverice el producto de limpieza en un paño seco:
  - Celdas
  - Funda inferior
  - Correas
15. Retire los restos del producto de limpieza con agua y un paño nuevo. A continuación, pase un paño seco.

## Desinfección del colchón o del cojín de asiento

16. Pulverice la solución desinfectante en un paño seco y extiéndala por las superficies exteriores de la funda superior del colchón o del cojín de asiento.
17. Deje que el desinfectante actúe.
18. Retire los restos de la solución desinfectante con agua y un paño nuevo.
19. Pase un paño seco.
20. Deje que la funda superior del colchón o del cojín de asiento se seque al aire.
21. Si es necesario, desinfecte el interior del colchón o del cojín de asiento. Abra la funda superior para acceder a los elementos internos.
22. Pulverice la solución desinfectante en un paño seco y extiéndala por todos los componentes internos.
23. Deje que el desinfectante actúe.
24. Retire los restos de la solución desinfectante con agua y un paño nuevo.
25. Pase un paño seco.
26. Deje que los componentes sequen al aire antes de volver a colocar la funda superior del colchón.
27. Si es necesario, también se pueden limpiar las correas y la base del colchón o del cojín de asiento siguiendo el mismo método. Desabroche las correas para facilitar el acceso.