

Εξαρτήματα που απαιτούνται:

- Φιάλη ψεκασμού με απολυμαντικό διάλυμα (διάλυμα 70% αλκοόλης ή διάλυμα χλωρίου έως 10.000 ppm)
- Ουδέτερο απορρυπαντικό (διάλυμα καθαρισμού)
- Φιάλη ψεκασμού με νερό
- Υφάσματα

Καθαρίστε και απολυμάνετε μετά από κάθε ασθενή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια χρήσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέετε πάντα την αντλία από την πηγή τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό και τον έλεγχο.

Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες χρήσης και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας του απολυμαντικού.

Για την αποφυγή ερεθισμού των ματιών και του δέρματος, μην απολυμαίνετε ποτέ παρουσία του ασθενούς.

Προετοιμασία

1. Αποσυνδέστε την αντλία από το στρώμα ή το μαξιλάρι καθίσματος.
2. Απενεργοποιήστε την αντλία και αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας.

Καθαρισμός της αντλίας

3. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό ύφασμα και ένα διάλυμα καθαρισμού και καθαρίστε τυχόν υπολείμματα ή ορατή βρωμιά στα εξής σημεία:
 - κύριο περίβλημα
 - μεμβράνη
 - σημάνσεις
 - βραχίονες ανάρτησης
4. Τυχόν σημεία που εξακολουθούν να φέρουν βρωμιά θα πρέπει να καθαριστούν ξανά με διάλυμα καθαρισμού.
5. Χρησιμοποιώντας νερό και ένα νέο ύφασμα, σκουπίστε όλα τα ίχνη του διαλύματος καθαρισμού και έπειτα χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ύφασμα.

Απολύμανση της αντλίας

6. Ψεκάστε απολυμαντικό διάλυμα σε ένα στεγνό ύφασμα και απλώστε το διάλυμα σε όλες τις περιοχές.
7. Περιμένετε λίγο για να δράσει το απολυμαντικό.
8. Χρησιμοποιώντας νερό και ένα νέο ύφασμα, σκουπίστε όλα τα ίχνη του απολυμαντικού διαλύματος.
9. Σκουπίστε με ένα στεγνό ύφασμα.

Καθαρισμός του στρώματος ή του μαξιλαριού καθίσματος

10. Ψεκάστε όλες τις εξωτερικές περιοχές των πάνω καλυμμάτων του στρώματος ή του μαξιλαριού καθίσματος με ένα διάλυμα καθαρισμού και σκουπίστε τυχόν βρωμιά με ένα καθαρό ύφασμα.
11. Τυχόν σημεία που εξακολουθούν να φέρουν βρωμιά θα πρέπει να καθαριστούν ξανά με διάλυμα καθαρισμού πριν από το επόμενο βήμα.
12. Χρησιμοποιώντας νερό και ένα νέο ύφασμα, σκουπίστε όλα τα ίχνη του διαλύματος καθαρισμού και έπειτα χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ύφασμα για να απομακρύνετε την περίσσεια υγρασίας.
13. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το εσωτερικό του στρώματος ή του μαξιλαριού καθίσματος. Ξεκουμπώστε το φερμουάρ του πάνω καλύμματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα.
14. Ψεκάστε διάλυμα καθαρισμού σε ένα στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τα εξής σημεία:
 - αεροθάλαμοι
 - κάτω κάλυμμα
 - ιμάντες
15. Χρησιμοποιώντας νερό και ένα νέο ύφασμα, σκουπίστε όλα τα ίχνη του διαλύματος καθαρισμού και έπειτα χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ύφασμα.

Απολύμανση του στρώματος ή του μαξιλαριού καθαρισμός

16. Ψεκάστε απολυμαντικό διάλυμα σε ένα στεγνό ύφασμα και απλώστε το διάλυμα σε όλες τις εξωτερικές περιοχές των επάνω καλυμμάτων του στρώματος ή του μαξιλαριού καθίσματος.
17. Περιμένετε λίγο για να δράσει το απολυμαντικό.
18. Χρησιμοποιώντας νερό και ένα νέο ύφασμα, σκουπίστε όλα τα ίχνη του απολυμαντικού διαλύματος.
19. Σκουπίστε με ένα στεγνό ύφασμα.
20. Αφήστε το επάνω κάλυμμα του στρώματος ή του μαξιλαριού καθίσματος να στεγνώσει στον αέρα.
21. Εάν χρειάζεται, απολυμάνετε το εσωτερικό του στρώματος ή του μαξιλαριού καθίσματος. Ξεκουμπώστε το φερμουάρ του πάνω καλύμματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα.
22. Ψεκάστε απολυμαντικό διάλυμα σε ένα στεγνό ύφασμα και απλώστε το διάλυμα σε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα.
23. Περιμένετε λίγο για να δράσει το απολυμαντικό.
24. Χρησιμοποιώντας νερό και ένα νέο ύφασμα, σκουπίστε όλα τα ίχνη του απολυμαντικού διαλύματος.
25. Σκουπίστε με ένα στεγνό ύφασμα.
26. Αφήστε τα εσωτερικά εξαρτήματα να στεγνώσουν στον αέρα πριν τοποθετήσετε ξανά το πάνω κάλυμμα του στρώματος.
27. Εάν απαιτείται, οι ιμάντες και η βάση του στρώματος ή του μαξιλαριού καθίσματος μπορούν να καθαριστούν με την ίδια μέθοδο. Για εύκολη πρόσβαση, αποσυνδέστε τους ιμάντες.