

Accessoires nécessaires :

- Vaporiser une bouteille de solution désinfectante (soit une solution d'alcool à 70 %, soit une solution de chlore allant jusqu'à 10 000 ppm).
- Détergent neutre (solution nettoyante)
- Flacon de pulvérisateur contenant de l'eau
- Lingette

Nettoyer et désinfecter entre chaque patient et à intervalles réguliers en cours d'utilisation.



AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution, toujours déconnecter la pompe de la source d'alimentation avant de procéder au nettoyage et à l'inspection.

Lire attentivement le mode d'emploi et la fiche de données de sécurité du désinfectant.

Pour éviter des irritations cutanées ou oculaires, ne jamais désinfecter en présence d'un patient.

Préparation

1. Débrancher la pompe du matelas ou du coussin de siège.
2. Éteindre la pompe et la débrancher de la source d'alimentation.

Nettoyage de la pompe

3. Utiliser un chiffon propre et une solution nettoyante et essuyer pour enlever tout dépôt ou toute saleté visible sur :
 - l'enceinte principale,
 - la membrane,
 - les étiquettes,
 - les crochets de suspension.
4. Toute zone présentant de la saleté résiduelle doit à nouveau être nettoyée avec une solution nettoyante.
5. Utiliser de l'eau et un tissu bien propre pour essuyer toute trace de solution nettoyante, puis un tissu sec.

Désinfection de la pompe

6. Vaporiser la solution désinfectante sur un tissu sec et étendre la solution sur toutes les zones.
7. Attendre le temps de la désinfection.
8. Utiliser de l'eau et un tissu bien propre pour essuyer toute trace de solution désinfectante.
9. Essuyer avec un chiffon sec.

Nettoyage du matelas ou du coussin de siège

10. Vaporiser la solution nettoyante sur toutes les surfaces externes du matelas ou de la housse supérieure du coussin de siège à l'aide de la solution nettoyante et essuyer les résidus de saleté avec un tissu propre.
11. Toute zone présentant de la saleté résiduelle doit à nouveau être nettoyée avec une solution nettoyante avant de continuer.
12. Utiliser de l'eau et un tissu bien propre pour essuyer toute trace de solution nettoyante, puis un tissu sec pour nettoyer l'excès d'humidité.
13. Si nécessaire, nettoyer l'intérieur du matelas ou du coussin de siège. Dézipper la housse supérieure pour accéder aux composants internes.
14. Vaporiser la solution nettoyante sur un chiffon sec pour essuyer :
 - les cellules,
 - la housse inférieure,
 - les sangles.
15. Utiliser de l'eau et un tissu bien propre pour essuyer toute trace de solution nettoyante, puis un tissu sec.

Désinfection du matelas ou du coussin de siège

16. Vaporiser la solution désinfectante sur un tissu sec et étendre la solution sur toutes les surfaces externes du matelas ou de la housse du coussin de siège.
17. Attendre le temps de la désinfection.
18. Utiliser de l'eau et un tissu bien propre pour essuyer toute trace de solution désinfectante.
19. Essuyer avec un chiffon sec.
20. Laisser sécher le matelas ou la housse du coussin de siège à l'air libre.
21. Si nécessaire, désinfecter l'intérieur du matelas ou du coussin de siège. Dézipper la housse supérieure pour accéder aux composants internes.
22. Vaporiser la solution désinfectante sur un tissu sec et l'étendre sur toutes les zones internes.
23. Attendre le temps de la désinfection.
24. Utiliser de l'eau et un tissu bien propre pour essuyer toute trace de solution désinfectante.
25. Essuyer avec un chiffon sec.
26. Faites sécher les parties internes à l'air libre avant de rattacher la housse au matelas.
27. Si nécessaire, les sangles et la base du matelas ou du coussin de siège peuvent être nettoyées suivant la même méthode. Détacher les sangles pour faciliter l'accès.