

Accessori necessari:

- Contenitore spray con soluzione disinfettante (soluzione alcolica al 70% o soluzione a base di cloro fino a 10.000 ppm)
- Detergente neutro (soluzione detergente)
- Contenitore spray con acqua
- Panni

Pulire e disinfettare tra un paziente e l'altro e a intervalli regolari durante l'uso.



AVVERTENZA

Per evitare scosse elettriche, scollegare sempre la pompa dalla fonte di alimentazione prima di eseguire la pulizia e l'ispezione.

Consultare sempre le Istruzioni per l'uso e la scheda dati di sicurezza del disinfettante.

Per evitare irritazioni a occhi o pelle, non disinfettare in presenza di un paziente.

Preparazione

1. Scollegare la pompa dal materasso o dal cuscino da seduta.
2. Spegnerla la pompa e scollegarla dalla fonte di alimentazione.

Pulizia della pompa

3. Utilizzare un panno pulito e una soluzione detergente e strofinare per rimuovere eventuali depositi o sporcizia visibile dai seguenti componenti:
 - involucro principale
 - membrana
 - etichette
 - staffe di aggancio
4. Le aree in cui è rimasto dello sporco residuo devono essere pulite nuovamente con la soluzione detergente.
5. Utilizzare acqua e un panno nuovo per rimuovere tutte le tracce di soluzione detergente e un panno asciutto.

Disinfezione della pompa

6. Spruzzare la soluzione disinfettante su un panno asciutto e stendere la soluzione su tutte le aree.
7. Attendere il tempo necessario per la disinfezione.
8. Utilizzare acqua e un panno nuovo per rimuovere tutte le tracce di soluzione disinfettante.
9. Pulire con un panno asciutto.

Pulizia del materasso o del cuscino da seduta

10. Spruzzare tutte le aree esterne delle cover superiori del materasso o del cuscino da seduta con la soluzione detergente e rimuovere lo sporco con un panno pulito.
11. Le aree in cui è rimasto dello sporco residuo devono essere pulite nuovamente con la soluzione detergente prima di continuare.
12. Utilizzare acqua e un panno nuovo per rimuovere tutte le tracce di soluzione detergente e un panno asciutto per rimuovere l'umidità in eccesso.
13. Se necessario, pulire l'interno del materasso o del cuscino da seduta. Aprire la cerniera della cover superiore per accedere ai componenti interni.
14. Spruzzare la soluzione detergente su un panno asciutto per pulire:
 - celle
 - cover superiore
 - cinghie
15. Utilizzare acqua e un panno nuovo per rimuovere tutte le tracce di soluzione detergente e un panno asciutto.

Disinfezione del materasso o del cuscino da seduta

16. Spruzzare la soluzione disinfettante su un panno asciutto e stendere la soluzione su tutte le aree esterne delle cover superiori del materasso o del cuscino da seduta.
17. Attendere il tempo necessario per la disinfezione.
18. Utilizzare acqua e un panno nuovo per rimuovere tutte le tracce di soluzione disinfettante.
19. Pulire con un panno asciutto.
20. Lasciare asciugare la cover superiore del materasso o del cuscino da seduta all'aria.
21. Se necessario, disinfettare l'interno del materasso o del cuscino da seduta. Aprire la cerniera della cover superiore per accedere ai componenti interni.
22. Spruzzare la soluzione disinfettante su un panno asciutto e stenderla su tutti i componenti interni.
23. Attendere il tempo necessario per la disinfezione.
24. Utilizzare acqua e un panno nuovo per rimuovere tutte le tracce di soluzione disinfettante.
25. Pulire con un panno asciutto.
26. Lasciare asciugare all'aria i componenti interni prima di reinserire la cover superiore del materasso.
27. Se necessario, anche le cinghie e la base del materasso o del cuscino da seduta possono essere pulite con lo stesso metodo. Sganciare le cinghie per facilitare l'accesso.