

Nepieciešamie piederumi:

- Pudele ar izsmidzināšanas sprauslu un dezinfekcijas līdzekli (70 % spirta bāzes šķīdums vai līdz 10 000 ppm hlora šķīdums)
- Neitrāls mazgāšanas līdzeklis (tīrīšanas šķīdums)
- Ūdens izsmidzināšanas pudele
- Lupatiņas

Tīriet un dezinficējiet starp pacientiem un regulāri izmantošanas laikā.



BRĪDINĀJUMS!

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, pirms tīrīšanas un pārbaudes sūkni vienmēr atvienojiet no strāvas avota.

Vienmēr izlasiet dezinfekcijas līdzekļa lietošanas pamācību un drošības datu lapu.

Lai izvairītos no acu un ādas kairinājuma, nekad neizmantojiet dezinfekcijas līdzekļus pacienta klātbūtnē.

Sagatavošanās

1. Sūkni atvienojiet no matrača vai sēdekļa spilvena.
2. Izslēdziet sūkni un atvienojiet no strāvas avota.

Sūkņa tīrīšana

3. Izmantojiet tīru drānu un tīrīšanas šķīdumu un noslaukiet, lai notīrītu visus nogulsnes vai redzamos netīrumus uz:
 - galvenā korpusa
 - membrānas
 - etiķetēm
 - piekares kronšteinu
4. Visas vietas, kur palikuši netīrumi, vēlreiz jānotīra ar tīrīšanas šķīdumu.
5. Izmantojiet ūdeni un jaunu drānu, lai notīrītu visas tīrīšanas līdzekļa pēdas, pēc tam sausu drānu.

Sūkņa dezinficēšana

6. Dezinfekcijas līdzekļa šķīdumu izsmidziniet uz sausas lupatiņas un notīriet visas zonas.
7. Dezinficēšanas līdzekļiem kādu laiku jāiedarbojas.
8. Izmantojiet ūdeni un jaunu drānu, lai notīrītu visas dezinfekcijas līdzekļa pēdas.
9. Noslaukiet ar sausu drānu.

Matrača vai sēdekļa spilvena tīrīšana

10. Izsmidziniet tīrīšanas šķīdumu pa visu matrača vai sēdekļa spilvena apvalku ārējo virsmu un ar tīru drānu notīriet visus netīrumus.
11. Pirms turpināt, visas vietas, kur palikuši netīrumi, vēlreiz jānotīra ar tīrīšanas šķīdumu.
12. Lai notīrītu visas tīrīšanas šķīduma pēdas, izmantojiet ūdeni un jaunu lupatiņu, pēc tam ar sausu lupatiņu notīriet lieko mitrumu.
13. Ja nepieciešams, notīriet matrača vai sēdekļa spilvena iekšpusi. Lai piekļūtu iekšējiem komponentiem, atveriet virsapvalku.
14. Tīrīšanas šķīdumu izsmidziniet uz sausas drānas, lai notīrītu:
 - kameras
 - pamata apvalku
 - siksnas
15. Izmantojiet ūdeni un jaunu drānu, lai notīrītu visas tīrīšanas līdzekļa pēdas, pēc tam sausu drānu.

Matrača vai sēdekļa spilvena dezinficēšana

16. Dezinfekcijas līdzekļa šķīdumu izsmidziniet uz sausas drānas un no ārpuses noslaukiet matrača vai sēdekļa spilvena virsapvalkus.
17. Dezinficēšanas līdzekļiem kādu laiku jāiedarbojas.
18. Izmantojiet ūdeni un jaunu drānu, lai notīrītu visas dezinfekcijas līdzekļa pēdas.
19. Noslaukiet ar sausu drānu.
20. Ļaujiet matrača vai sēdekļa spilvena virsējam apvalkam nožūt.
21. Ja nepieciešams, dezinficējiet matrača vai sēdekļa spilvena iekšpusi. Lai piekļūtu iekšējiem komponentiem, atveriet virsapvalku.
22. Dezinfekcijas līdzekļa šķīdumu izsmidziniet uz sausas drānas un notīriet visas iekšējās daļas.
23. Dezinficēšanas līdzekļiem kādu laiku jāiedarbojas.
24. Izmantojiet ūdeni un jaunu drānu, lai notīrītu visas dezinfekcijas līdzekļa pēdas.
25. Noslaukiet ar sausu drānu.
26. Pirms matrača augšējā apvalka uzlikšanas atpakaļ gultā ļaujiet iekšējām daļām nožūt.
27. Ja nepieciešams, ar tādu pašu metodi var notīrīt arī matrača vai sēdekļa spilvena siksnas un pamatni. Lai atvieglotu piekļuvi, atklikšķiniet siksnas.

