

Tillbehör som behövs:

- Sprejflaska med desinficeringslösning (antingen 70 % alkohollösning eller klorlösning på upp till 10 000 ppm)
- Neutral detergent (rengöringslösning)
- Sprejflaska med vatten
- Trasor

Rengör och desinficera mellan patienter och enligt regelbundna intervall under användning.



VARNING

För att undvika elektriska stötar ska pumpen alltid kopplas bort från strömkällan innan rengöring och inspektion.

Läs alltid igenom bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet för desinficeringsmedlet.

Desinficera aldrig utrustning i närheten av en patient, för att förhindra att dennes hud och ögon irriteras.

Förberedelser

1. Koppla loss pumpen från madrassen/sittdynan.
2. Stäng av pumpen och koppla bort den från strömkällan.

Rengör pumpen

3. Torka med en ren duk och rengöringslösning för att avlägsna eventuella avlagringar eller synlig smuts på:
 - hölje
 - membran
 - etiketter
 - upphängningskrokar
4. Alla ytor med kvarvarande smuts ska rengöras på nytt med rengöringslösning.
5. Använd vatten och en ny duk för att torka bort alla rester av rengöringslösning och torka därefter med en torr duk.

Desinficera pumpen

6. Spreja desinficeringslösning på en torr duk och sprid ut lösningen på alla delar.
7. Låt desinficeringen verka.
8. Använd vatten och en ny duk för att torka bort alla rester av desinficeringslösning.
9. Torka sedan med en torr duk.

Rengör madrassen eller sittdynan

10. Spreja alla utvändiga ytor på madrassens eller sittdynans överdrag med rengöringslösningen och torka bort eventuell smuts med en ren duk.
11. Alla ytor med kvarvarande smuts ska rengöras på nytt med rengöringslösning innan du går vidare.
12. Använd vatten och en ny duk för att torka bort alla rester av rengöringslösning. Använd sedan en torr duk för att avlägsna fukt.
13. Rengör vid behov madrassens eller sittdynans insida. Öppna dragkedjan för att ta bort överdraget så att du kommer åt de invändiga delarna.
14. Spreja rengöringslösning på en torr duk och torka av:
 - celler
 - överdrag på undersida
 - remmar
15. Använd vatten och en ny duk för att torka bort alla rester av rengöringslösning och torka därefter med en torr duk.

Desinficera madrassen eller sittdynan

16. Spreja desinficeringslösning på ett torr duk och sprid ut lösningen på alla utvändiga delar av madrassens eller sittdynans överdrag.
17. Låt desinficeringen verka.
18. Använd vatten och en ny duk för att torka bort alla rester av desinficeringslösning.
19. Torka sedan med en torr duk.
20. Låt madrassens eller sittdynans överdrag lufttorka.
21. Desinficera vid behov madrassens eller sittdynans insida. Öppna dragkedjan för att ta bort överdraget så att du kommer åt de invändiga delarna.
22. Spreja desinficeringslösning på en torr duk och sprid ut lösningen på alla invändiga delar.
23. Låt desinficeringen verka.
24. Använd vatten och en ny duk för att torka bort alla rester av desinficeringslösning.
25. Torka sedan med en torr duk.
26. Låt de inre delarna lufttorka innan du sätter tillbaka madrassens överdrag.
27. Vid behov kan remmarna och madrassens eller sittdynans underdel också rengöras med samma metod. Lossa remmarna så att det är lättare att komma åt.