


Citadel Plus


Lagerung von Patienten – Vorbereitung

1

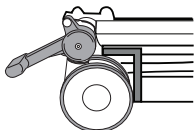

Betätigen Sie die Rollenbremsen.

2

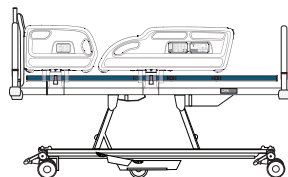


Patientenliegefläche waagrecht ausrichten.

3




Bett auf eine bequeme Arbeitshöhe einstellen.

4

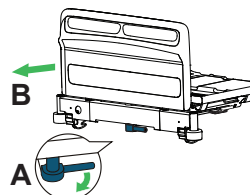

Verlängern Sie erforderlichenfalls den Rahmen und die Liegefläche.

5

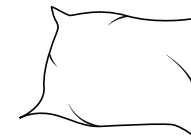


Fügen Sie Kissen, Decken und andere Hilfsmittel hinzu.

6




Drücken Sie die Taste „Null“, um die Waage zurückzusetzen.

7

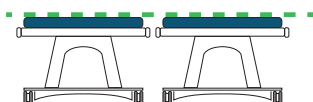


Stellen Sie die Patientenliegefläche auf der gleichen Höhe wie die Transferfläche ein.

8

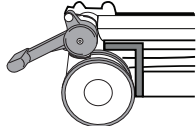


Betätigen Sie die Rollenbremsen aller Systeme.

9

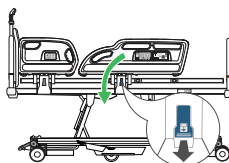


Sicherheitsseiten herunterklappen.

10

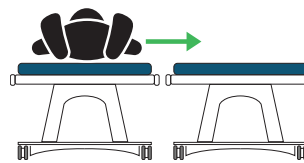

Patienten unter Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und Richtlinien der Einrichtung transferieren.

11

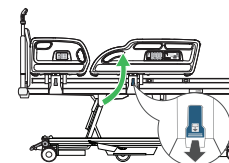

Sicherheitsseiten anheben und verriegeln.

Wiegen Sie den Patienten

 Nicht zur Dosierung von Medikamenten geeignet



Wiegen Sie den Patienten erforderlichenfalls.

Lagerung von Patienten – abschließende Schritte

1




Drücken Sie die Taste „Im Bett“ oder „Ausstieg“, um die Empfindlichkeit des VariZone Patientenerfassungssystems zu aktivieren und einzustellen.

2



Bringen Sie das Bett in eine möglichst niedrige Position, so dass der Patient bequem liegt.

3

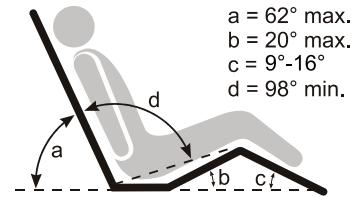

Stellen Sie das Bett auf den gewünschten Winkel ein, so dass der Patient bequem liegt.


4



Sperren Sie gegebenenfalls bestimmte Bettfunktionen je nach Bedarf.


Patiententransfer aus dem Bett

1

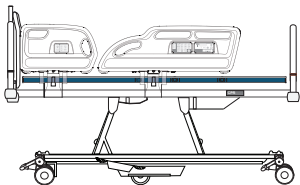


Patientenliegende fläche waagrecht ausrichten.

2

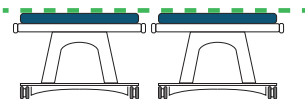


Stellen Sie die Patientenliegende fläche auf der gleichen Höhe wie die Transferfläche ein.

3

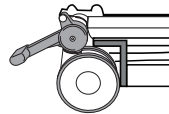


Betätigen Sie die Rollenbremsen aller Systeme.

4

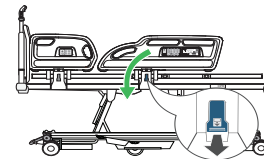

Sicherheitsseiten herunterklappen.

5

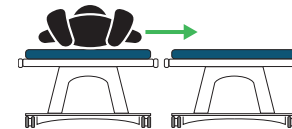

Betten Sie den Patienten unter Beachtung der geltenden Sicherheitsregeln und Richtlinien der Einrichtung um.


6



Falls der Patient nicht zurückkehrt:
– Ziehen Sie das Netzkabel ab und drücken Sie die Taste für den Akkubetrieb.
– Deaktivieren Sie den Akkubetrieb und schalten Sie alle Funktionen ab.


Patiententransport

1

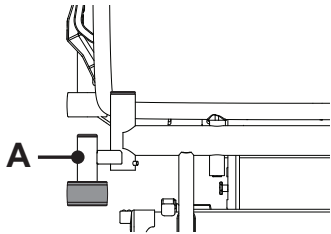

Etwaige Infusionsbeutel
an den Teleskop-
Infusionsständer hängen.

2

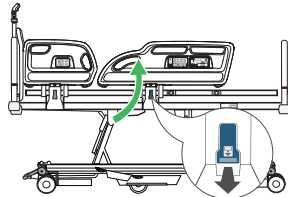


Seitengitter erhöhen
und verriegeln.

3




Fahren Sie vor dem
Transport alle Breiterer-
weiterungen ein.

4

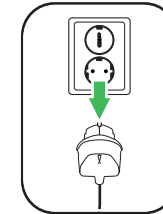


Netzkabel aus der
Wandsteckdose ziehen.

5

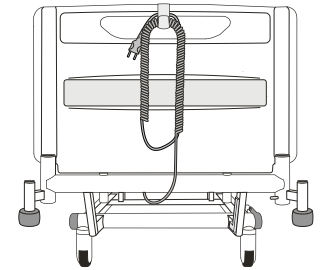

Wickeln Sie das Kabel
auf die Halterungen am
Kopfende des Bettes.

6

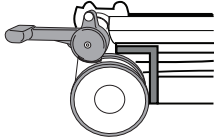


Lösen Sie
die Bremsen.

7




Nutzen Sie zur Unter-
stützung des Transports
den Elektroantrieb.

8

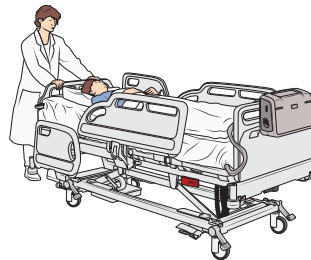

Transportieren
Sie den Patienten unter
Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und
Richtlinien der Einrichtung.

9

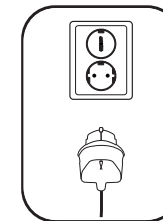

Stecken Sie das Netzkabel
nach dem Patienten-
transport wieder in eine
Wandsteckdose.

