


Citadel Plus


Pozicioniranje pacijenta – priprema

1

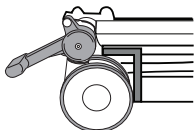

Primijenite kočnice kotača.

2

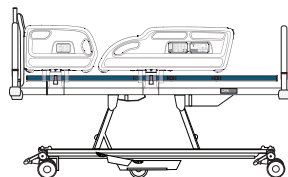


Poravnajte površinu za pacijenta.

3




Krevet namjestite na udobnu radnu visinu.

4

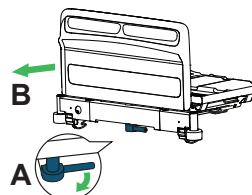

Po potrebi produžite okvir i platformu za madrac.

5

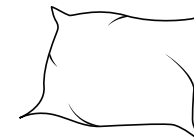


Dodajte jastuke, deke i drugu opremu.

6




Pritisnite gumb za postavljanje težine na nulu da biste resetirali vagu na nulu.

7

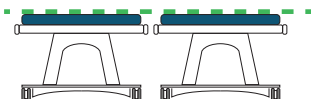


Namjestite visinu površine za pacijenta na visinu površine za premještanje pacijenta.

8

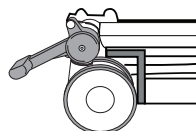


Primijenite kočnice kotača na svim jedinicama.

9

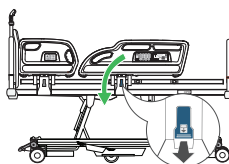


Spustite bočne zaštitne ograde.

10

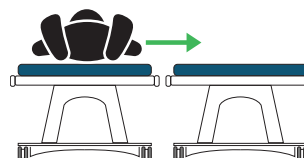

Premjestite pacijenta, pridržavajući se svih važećih sigurnosnih pravila i protokola institucije.

11

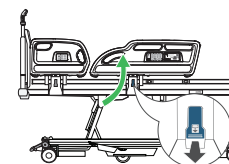

Podignite i blokirajte sve bočne ograde.

Vaganje pacijenta



Nije za doziranje lijeka



Po potrebi izvažite pacijenta.

Pozicioniranje pacijenta - dovršetak

1




Pritisnite gumb U krevetu ili gumb za izlaz da biste uključili i postavili željenu osjetljivost sustava za otkrivanje pomicanja pacijenta VariZone.

2



Krevet postavite na najnižu praktičnu visinu udobnu za pacijenta.

3

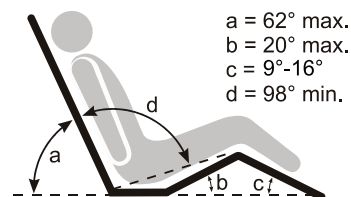

Radi udobnosti pacijenta krevet postavite pod željenim kutom.


4



Prema potrebi blokirajte funkcije kreveta.


Premještanje pacijenta iz kreveta

1

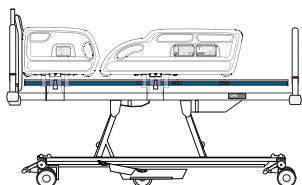


Poravnajte površinu za pacijenta.

2

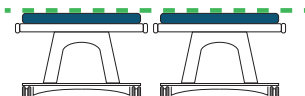


Namjestite visinu površine za pacijenta na visinu površine za premještaj pacijenta.

3

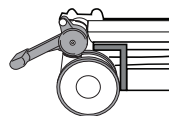


Primijenite kočnice kotača na svim jedinicama.

4

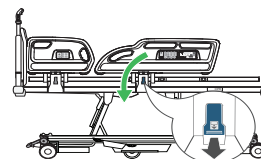

Spustite bočne zaštitne ograde.

5

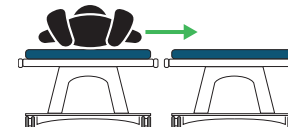

Premjestite pacijenta pridržavajući se svih važećih sigurnosnih pravila i protokola ustanove.

6




Ako se pacijent neće vratiti:

- Iskopčajte kabel za napajanje i pritisnite gumb za baterijsko napajanje.
- Onemogućite baterijsko napajanje i isključite sve funkcije.


Transport pacijenta

1

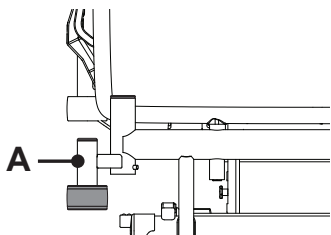

Po potrebi postavite intravenoznu terapiju za pacijenta na stalak za infuziju.

2

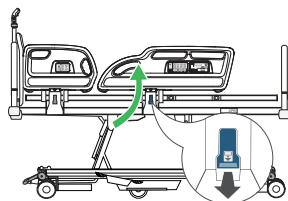


Podignite i blokirajte bočne ograde.

3




Prije transporta ugurajte sve produžetke.

4

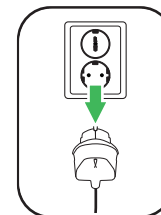


Iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice.

5

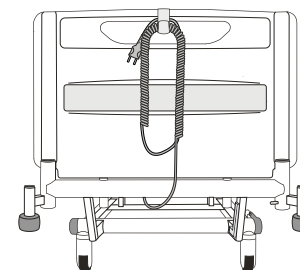

Omotajte kabel na nosače na uzglavlju kreveta.

6

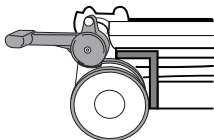


Otpustite kočnice.

7




Upotrijebite električni pogon za pomoć tijekom transporta.

8

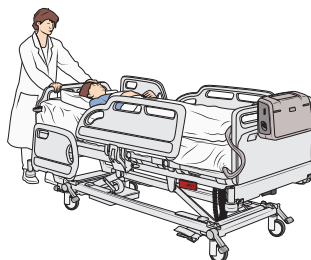

Premjestite pacijenta, pridržavajući se svih važećih sigurnosnih pravila i protokola ustanove.

9

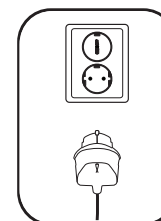

Nakon transporta pacijenta ukopčajte kabel za napajanje u zidnu utičnicu.

