


# Citadel Plus


## Поставување на пациентот - подготовка

1

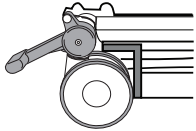

Активирајте ги сопирачките на тркалцата.

2

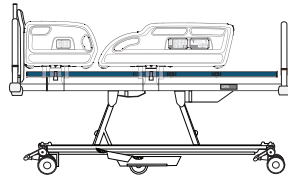


Израмнете ја површината за пациент.

3




Приспособете го креветот на удобна работна висина.

4

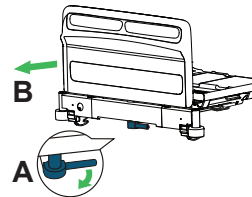

Продолжете ги рамката и платформата на душокот ако е потребно.

5

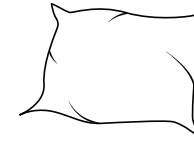


Додајте перници, ќебиња и друга опрема.

6




Притиснете го копчето Нула за да се ресетира скалата за мерење на нула.

7

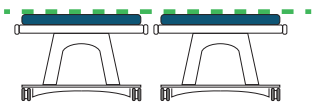


Приспособете ја висината на површината за пациент на истото ниво како и површината на која се префрла пациентот.

8

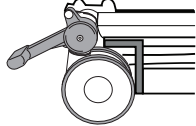


Активирајте ги сопирачките на тркалцата на сите единици.

9

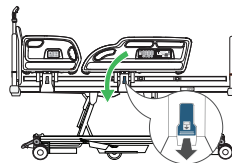


Спуштете ги страничните огради.

10

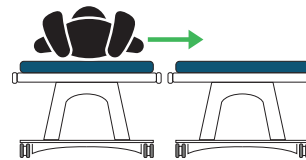


Префрлете го пациентот, следејќи ги сите применливи безбедносни правила и протоколи на институцијата.

11

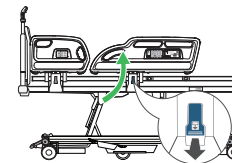

Кренете ги и блокирајте ги сите странични огради.


 Не е за медицинско дозирање



Измерете го пациентот ако е потребно.

## Поставување на пациентот - завршување

**1**



Притиснете го копчето Во кревет или Излегување за да ја активирате и поставите чувствителноста на системот за детекција на движење кај пациент VariZone.

**2**



Доведете го креветот во најниска практична висина за да му биде удобно на пациентот.

**3**



Доведете го креветот во саканиот агол за да му биде удобно на пациентот.

**4**



Блокирајте ги функциите на креветот ако е потребно.

## Префрлање на пациентот од кревет

**1**



Израмнете ја површината за пациент.

**2**



Приспособете ја висината на површината за пациент на истото ниво како и површината на која се префрла пациентот.

**3**



Активирајте ги сопирачките на тркалцата на сите единици.

**4**



Спуштете ги страничните огради.

**5**



Префрлете го пациентот следејќи ги сите применливи правила за безбедност и протоколи на институцијата.


**6**



Ако пациентот не се враќа:  
- Исклучете го кабелот за напојување и притиснете го копчето за напојување од батерија.  
- Оневозможете го напојувањето од батерија и исклучете ги сите функции.


## Транспорт на пациент

1

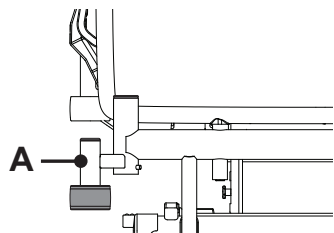

Поставете ја интравенската терапија на пациентот на држачите за интравенска терапија, ако е потребно

2

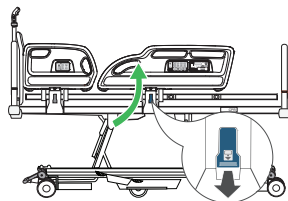


Кренете ги и блокирајте ги страничните огради.

3




Притиснете ги внатре сите продолжетоци за ширина пред транспорт.

4

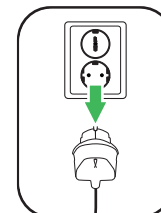


Исклучете го кабелот за напојување од сидниот штекер.

5

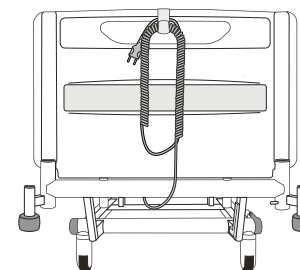

Намотајте го кабелот на држачите на креветот, кај делот за главата.

6

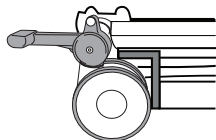


Ослободете ги сопирачките.

7




Користете движење на погон како помош при транспортот.

8

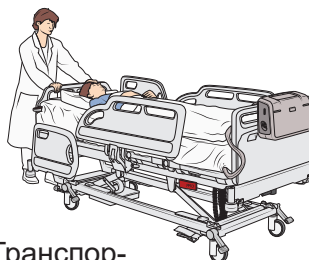

Транспортирајте го пациентот следејќи ги сите применливи безбедносни правила и протоколи на институцијата.

9

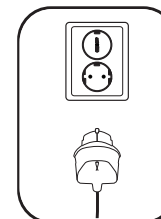

Вклучете го кабелот за напојување во сидниот штекер по транспортот на пациентот.

