
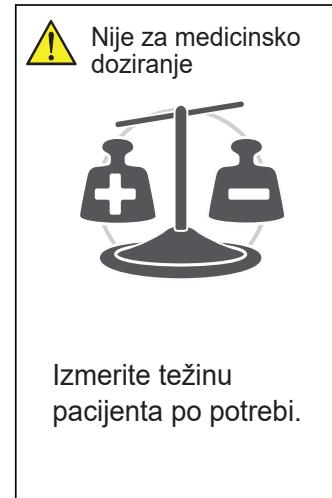
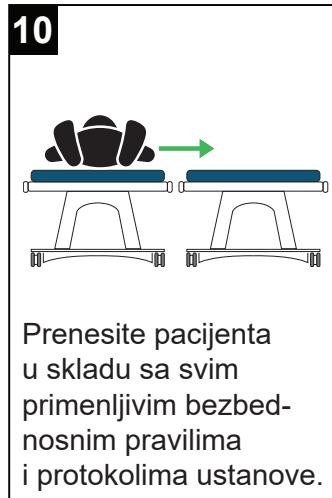
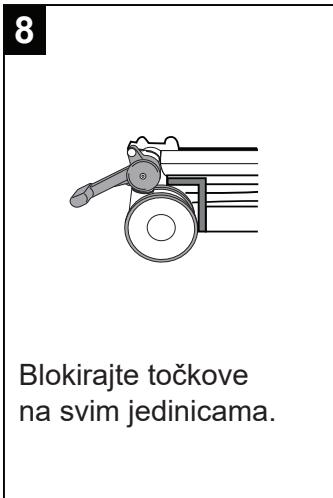
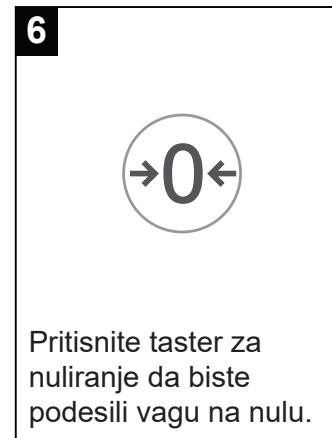


# Citadel Plus

## Postavljanje pacijenta – priprema

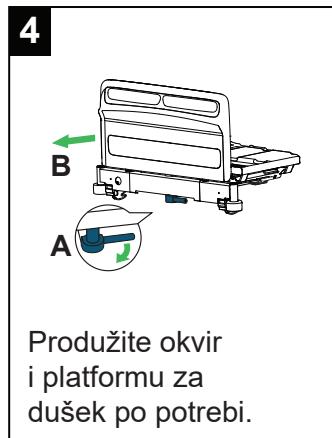

## Postavljanje pacijenta – završetak

1




Pritisnite dugme U krevetu ili Izlazak da biste aktivirali i podesili osetljivost VariZone sistema za detekciju kretanja pacijenta.

2



Podesite krevet na najnižu praktičnu visinu kako bi pacijentu bilo udobno.

3

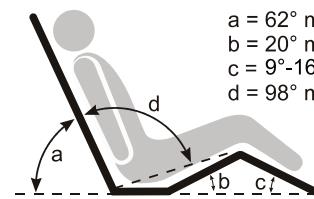

Dovedite krevet u željeni ugao glede udobnosti pacijenta.


4



Zaključajte funkcije kreveta po potrebi.


## Prenos pacijenta iz kreveta

1

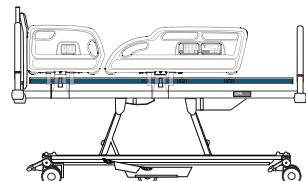


Poravnajte površinu za pacijenta.

2

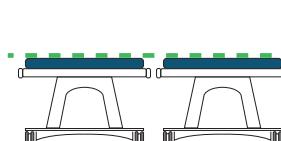


Podesite visinu površine za pacijenta tako da bude ista kao visina površine sa koje se pacijent prebacuje.

3

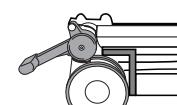


Blokirajte točkove na svim jedinicama.

4

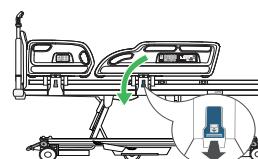

Spustite bočne šine.

5

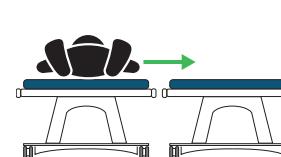

Pridržavajte se svih važećih bezbednosnih pravila i protokola institucije kada premeštate pacijenta.


6



Ako se pacijent neće vraćati:  
- Isključite kabl za napajanje i pritisnite dugme za baterijsko napajanje.  
- Onemogućite baterijsko napajanje i isključite sve funkcije.


## Transport pacijenta

1

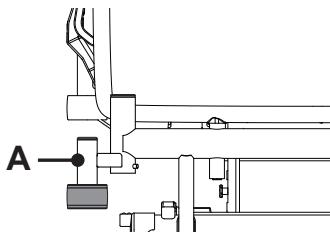

Intravensku terapiju pacijenta postavite na stalke za infuziju, po potrebi.

2

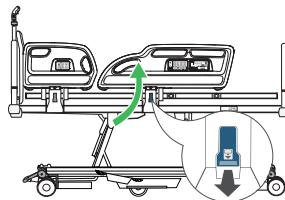


Podignite i zaključajte bočne šine.

3




Gurnite unutra sva proširenja pre transporta.

4

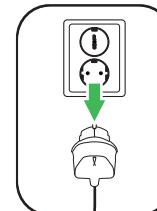


Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

5

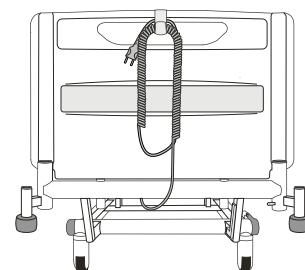

Obmotajte kabl oko nosača na uzglavlju kreveta.

6

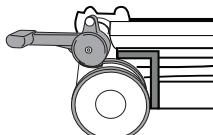


Otpustite kočnice.

7




Koristite mašinski pogon kao pomoć pri transportu.

8

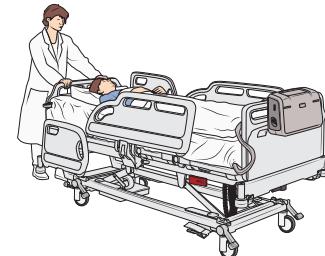

Prebacite pacijenta, sledeći sva primenjiva pravila sigurnosti i protokole ustanove.

9

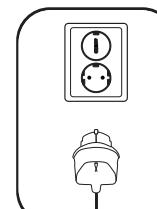

Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu po završetku transporta pacijenta.

