


# Citadel Plus


## Hasta yerleştirme - hazırlık

1

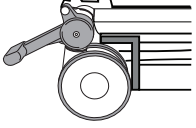

Tekerlek frenlerini etkinleştirin.

2

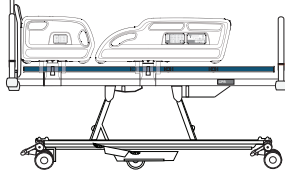


Hasta yüzeyini dengeleyin.

3



Yatağı rahat çalışılabilecek bir yüksekliğe ayarlayın.

4

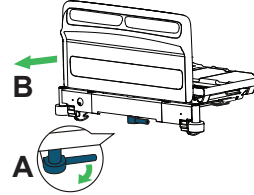

İhtiyaç halinde profili ve yatak platformunu uzatın.

5




Yastık, battaniye ve diğer ekipmanları ekleyin.

6




Tartı göstergesini sıfıra ayarlamak için Sıfırla Düğmesine basın.

7

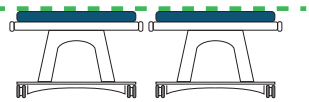


Hasta yüzeyi yüksekliğini hastanın transfer edildiği yüzey yüksekliğiyle aynı seviyeye ayarlayın.

8

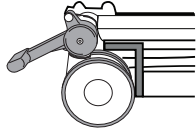


Tüm ünitelerde tekerlek frenlerini etkinleştirin.

9

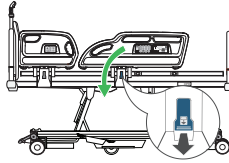


Alt kenar korkuluklar.

10

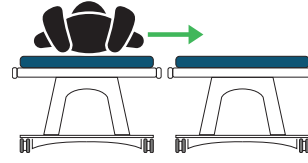

Hastayı transfer edin, transfer esnasında geçerli güvenlik kurallarının ve kurum protokollerinin tamamına uyun.

11

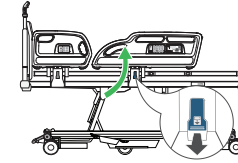

Tüm kenar korkuluklarını yükseltin ve kilitleyin.



İlaç dozajı için uygun değildir



Gerekirse hastayı tartın.

## Hasta yerleştirme - tamamlama

1




VariZone hasta hareket tespit sistemini etkinleştirmek ve hassasiyet seviyesini ayarlamak için Yatakta ya da Çıkış düğmelerine basın.

2



Hastanın rahatı için yatağı en düşük uygun yüksekliğe getirin.

3

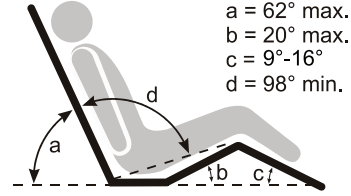

Hastanın konforu için yatağı istenen açığa getirin.


4



Gerekirse yatak fonksiyonlarını kilitleyin.


## Yataktan hasta transferi

1

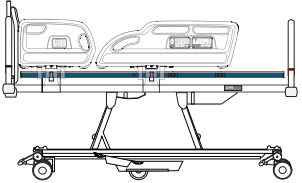


Hasta yüzeyini dengeleyin.

2

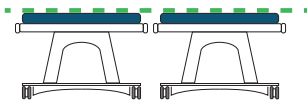


Hasta yüzeyi yüksekliğini hastanın transfer edildiği yüzey yüksekliğiyle aynı seviyeye ayarlayın.

3

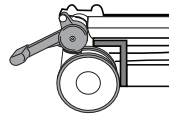


Tüm ünitelerde tekerlek frenlerini etkinleştirin.

4

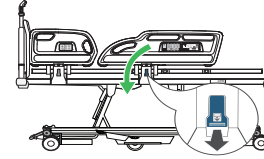

Alt kenar korkuluklar.

5

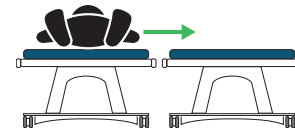

Tüm geçerli güvenlik kurallarını ve kurum protokollerini takip ederek hastayı aktarın.


6



Hasta geri dönmeyecekse:  
- Güç kablosunu prizden çekin ve batarya güç düğmesine basın.  
- Batarya gücünü devre dışı bırakın ve tüm fonksiyonları kapatın.


## Hasta taşıma

1

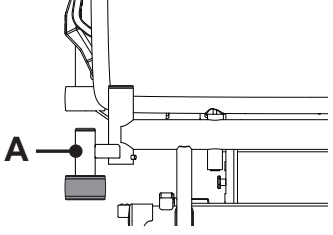

Gerekirse hastanın serum tedavisini serum askılarına takın.

2

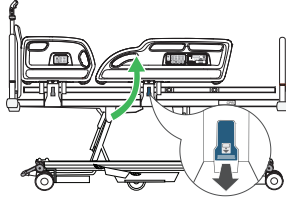


Kenar korkulukları yükseltin ve kilitleyin.

3




Taşımadan önce tüm genişlik uzantılarını içeri itin.

4

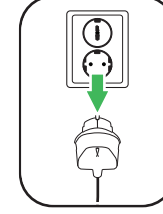


Elektrik kablosunu prizden çekin.

5

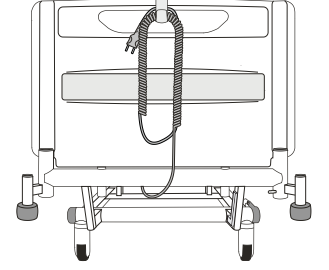

Kabloyu yatağın baş ucundaki braketlere sarın.

6

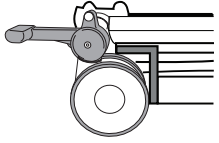


Frenleri serbest bırakın.

7




Taşıma işleminde yardımcı olması için elektrikli tahrik kullanın.

8

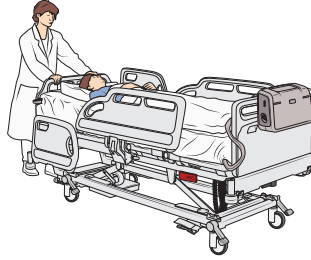

Geçerli güvenlik kurallarının ve kurum protokollerinin tamamına uyarak hastayı taşıyın.

9

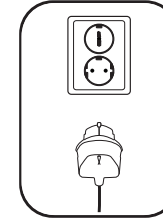

Hastanın taşınmasının ardından güç kablosunu prize takın.

